
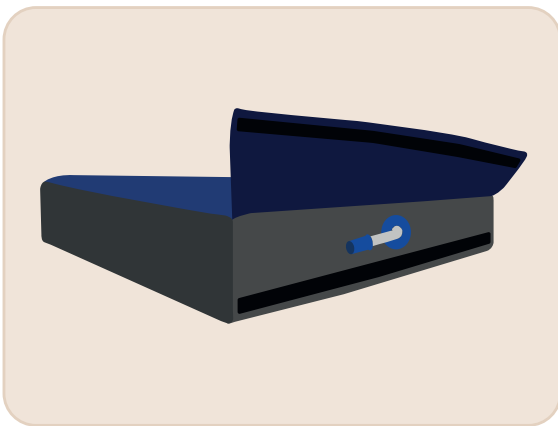



Einstellen des optimalen Sitzkomforts:

Weiche Schutzabdeckung mit Klettverschluss

Griff für den einfachen Transport

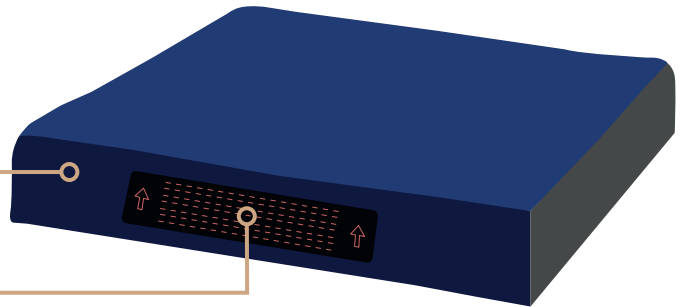


1. Die Schutzabdeckung nach oben klappen.

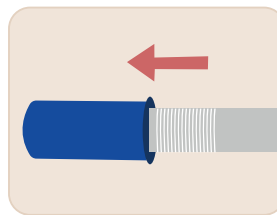


2. Das Ventil durch Ziehen öffnen und ca. 30 Sekunden warten, bis sich die Luftzellen selbstständig aufgeblasen haben.


Die Ventilkappe kann nicht herunterfallen.

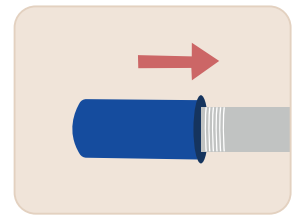


3. Das Ventil durch Drücken schließen.

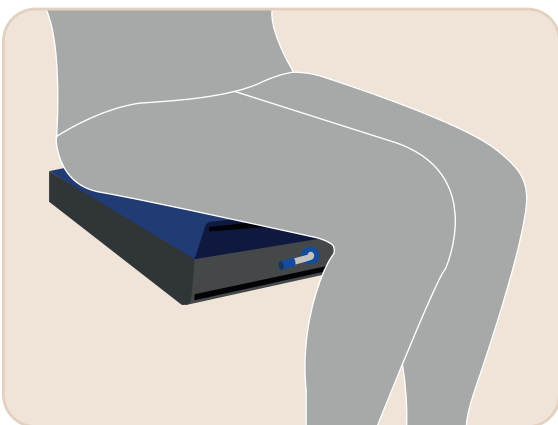

4. Das Kissen auf die Sitzfläche des Rollstuhls oder Stuhls legen, sodass der Haltegriff nach vorne zeigt und die darauf abgebildeten Pfeile nach oben zeigen. Dann auf das Kissen setzen.

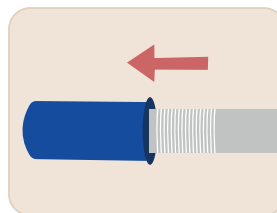

5. Das Ventil vorsichtig wieder öffnen bis der ideale Sitzkomfort erreicht ist.

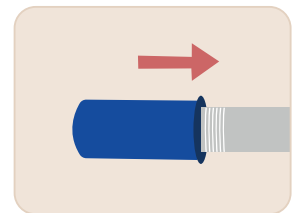

6. Das Ventil wieder schließen. Danach die Schutzabdeckung nach unten klappen.