

GESAMTKATALOG DEKUBITUSTHERAPIE

Überreicht durch:

Scan me!



Hier gelangen Sie zur
aktuellen Online-Version.

1. ÜBER DIE FUNKE MEDICAL GMBH 5 – 10

Firmenportrait	7
Ökologische Verantwortung	8
Zertifizierungen	9

2. GREENLINE® – RESPONSIBLE CARE 11 – 16

3. PRODUKTE 17 – 84

GREENLINE®	19
HOMECARE	19
CLINIC CARE	25
EVAQ®	31
BARIATRIC CARE	39
GELTOUCHLINE®	45
AIRLINE®	49
MEMOLINE®	55
CLINIC CARE	57
EVAQ®	59
Dekubitustherapie-Sitzkissen	61 – 80
Arthrodesensitzkissen	81
Positionierungshilfen	87 – 120
Positionierungskissen	91
Fersenfreilagerungsschuh	115
Umlager- und Wendehilfe	117

INHALT



Produkte für mehr
Nachhaltigkeit!

ÜBER DIE FUNKE MEDICAL GMBH



Firmenportrait



Funke Medical GmbH – seit 1988

Die Funke Medical GmbH ist ein deutsches Unternehmen, welches hochwertige medizinische Liege-, Sitz- und Lagerungssysteme herstellt. Die Produktion erfolgt an drei Standorten, mit 17.800m² Produktionsfläche, im nordrhein-westfälischen Raesfeld. Somit erfolgt die Herstellung der Produkte ausschließlich in Deutschland.

Die Funke Medical GmbH ist Marktführer im Bereich Dekubitusprophylaxe und –therapie in der häuslichen Pflege in Deutschland. Sie ist ein international agierendes Unternehmen, welches bereits über langjährige Geschäftsbeziehungen mit über 1.400 Kunden aus dem Bereich Medizinfachhandel und Kliniken im In- und Ausland verfügt.

Sie möchten gerne Näheres zu unserem Unternehmen und unserer Produktpalette erfahren? Kein Problem! Ob per E-Mail, telefonisch oder auch persönlich – die Mitarbeiter der Funke Medical GmbH stehen Ihnen selbstverständlich jederzeit zur Verfügung.

Weitere Informationen und News unter funke-medical.de!

Herzlichst die Geschäftsführung

Dr. Ramona König (CEO), Helmut Wessels, Christian Maruhn



Verwaltung und Produktionsstätte



Logistik- und Dienstleistungszentrum



Verwaltung und Produktionsstätte

Ökologische Verantwortung

Umwelt- und Klimaschutz liegen uns sehr am Herzen. Aus diesem Grund legen wir großen Wert auf ressourcenschonende Prozesse, um unseren ökologischen Fußabdruck so gering wie möglich zu halten. Um nachhaltiger zu werden, haben wir folgende Maßnahmen ergriffen:



Photovoltaik

Seit 2012 produzieren wir mit 4 Photovoltaikanlagen 250.000 kWh Strom aus Sonnenenergie. Damit decken wir 65% des eigenen Strombedarfs. Dies bedeutet, dass durch die Stromgewinnung für unsere Produktion ca. 130 Tonnen weniger CO₂ pro Jahr in die Umwelt ausgestoßen werden.



Klimafreundliche Matratzen

Unsere GREENLINE®-Matratzen werden aus ECOLAST®-Schaum hergestellt und haben im Vergleich zu herkömmlichen Dekubitustherapie-Matratzen (*Weichlagerungsmatratzen aus Schaumstoff/Wechseldruckmatratzen*) eine ca. 22%* geringere CO₂-Emission.



Nachhaltige Verpackung

Unsere Sitzkissenkartons/HEEL PROTECT®-Kartons bestehen aus Graspapier. Dabei handelt es sich um einen schnellwachsenden, nachhaltigen Rohstoff. Das für die Produktion verwendete Gras stammt von bisher nicht genutzter Grünflächen, sogenannten Ausgleichsflächen. Sie werden zudem lediglich einmal zu Beginn und einmal am Ende des Jahres gemäht, sodass die Hauptvegetationszeiten der Gräser nicht beeinflusst werden.



Wasserersparnis:

Während der Herstellung von Graspapier wird deutlich weniger Wasser benötigt als für Frischfaserzellstoff aus Holz oder die Aufbereitung von Altpapier.



CO₂ Ersparnis:

Graspapier verursacht, im Vergleich zu Frischfaserzellstoff aus Holz, bedeutend weniger CO₂-Emissionen.



Ressourcenschonend:

Minimierung des Verbrauches von wichtigen Ressourcen wie Holz.



Biologisch abbaubar:

Graspapier besteht aus Naturfasern, welche biologisch abbaubar sind. Die verwendeten Flexo-Farben sind wasserlöslich, unbedenklich und können mit dem Karton recycelt werden.



Einsparung von Plastik

Zusätzlich werden die Sitzkissen und HEEL PROTECT® mit einem Frischesiegel, statt einer zusätzlichen Folie versehen. Dadurch sparen wir jährlich 6 Tonnen Folie ein.

Wir möchten mit all diesen Maßnahmen die technische Basis für einen umweltschonenden Umgang mit unseren Ressourcen legen, um unserer ökologischen Verantwortung gerecht zu werden.

THE WORLD IS A FINE PLACE
AND WORTH FIGHTING FOR.

Zertifizierungen

Durch die Zertifizierung nach DIN EN ISO 13485 hat die Funke Medical GmbH die Berechtigung Medizinprodukte herzustellen und nach den einschlägigen Gesetzen in den Verkehr zu bringen. Diese Qualitätsmanagement-Systeme werden regelmäßig durch externe Zertifizierungsgesellschaften überprüft und zertifiziert und zudem behördlich überwacht. Dadurch entwickelt sich das Unternehmen ständig weiter.

Intern wird die Qualität durch einen Qualitätsmanagementbeauftragten, einen Sicherheitsbeauftragten und eine Qualified Person gemäß MDR 2017/745 überwacht.

Die Funke Medical GmbH zeichnet sich durch ihre herausragende medizinische Kompetenz, kontinuierliche hohe Qualität und zuverlässige Lieferfähigkeit aus.

Zertifiziertes
Qualitätsmanagementsystem
nach DIN EN ISO 13485



Zugelassener Hersteller
von CE-ausgezeichneten
Medizinprodukten im Sinne
der MDR 2017/745



Klinische Bewertung
gemäß MEDDEV 2.7.1



Nachverfolgbarkeit aller
Produkte mit Hilfe des
UDI-Codes



Laborstudien:
Mikroklima, Druckentlastung,
Schwerentflammbarkeit,
Biokompatibilität



Qualitätsmanagement

✉ qm@funke-medical.de

☎ +49-2865-2669350

GREENLINE[©] — RESPONSIBLE CARE



— GREENLINE[®] —



RESPONSIBLE CARE

ECOLAST[®]-Schaum

Medizinische Qualität trifft Öko 4.0

ca. **22 %**^{*}
weniger CO₂

ca. 7,2 kg weniger CO₂ pro Matratze

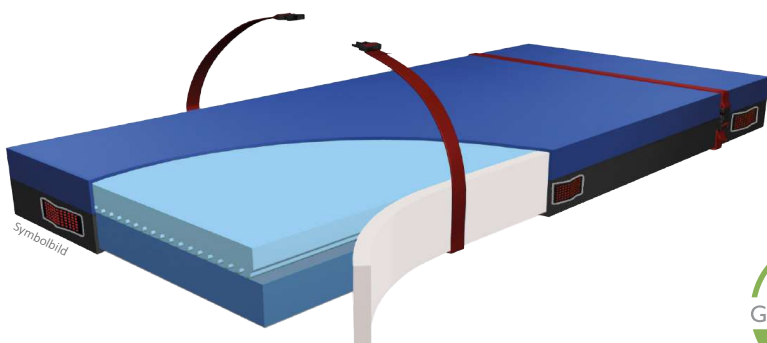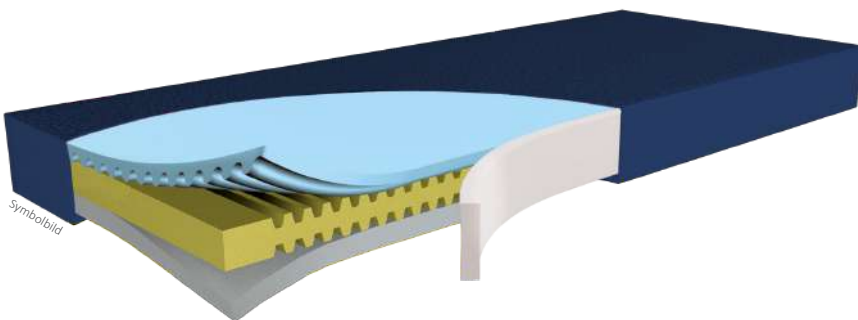


Leisten Sie Ihren Beitrag
zum KLIMASCHUTZ!



GREENLINE[®] Matratzen haben im Vergleich zu herkömmlichen Dekubitustherapie-Matratzen (Weichlagerungs-Schaummatratzen/Wechseldruckmatratzen) eine verminderte CO₂-Emission.


*Quelle: Europur-Studie 2015

Weichlagerungsmatratten aus Schaumstoff

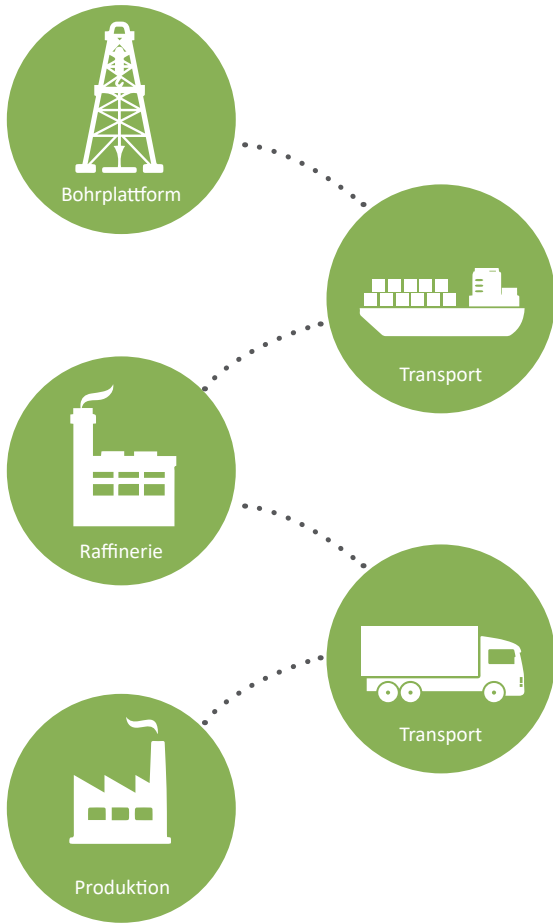


1 kg Schaum = 3 kg CO₂

Herkömmliche
Weichlagerungsmatratten
aus Schaumstoff:

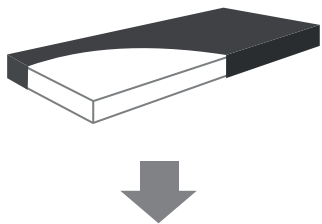


11 kg Schaum
= 33 kg CO₂

— GREENLINE® —

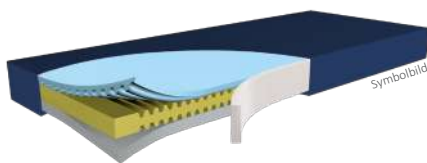


8,6 kg Schaum
= 25,8 kg CO₂

Wechseldruckmatratten

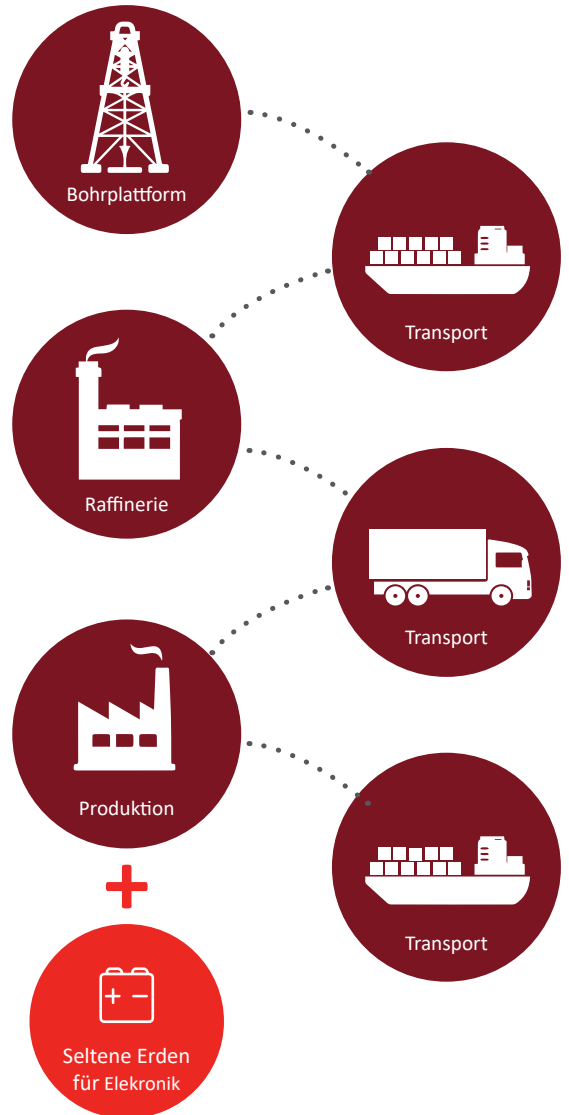

1 kg Plastik = 3,5 kg CO₂

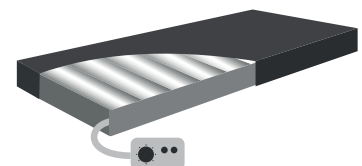

10 kg Plastik
= 35 kg CO₂
+ seltene Erden
+ permanenter Stromverbrauch


ECOLAST® – Technische Vorteile

GREENLINE® Matratzen werden aus ECOLAST®-Schaum hergestellt und haben im Vergleich zu herkömmlichen Dekubitustherapie-Matratzen (*Weichlagerungsmatratzen aus Schaumstoff/Wechseldruckmatratzen*) eine verminderte CO₂-Emission.


ECOLAST®-Schaum ist ein speziell entwickelter Hybridschaumstoff. Im Vergleich zu Standardschaumstoff sorgt die offenere Zellstruktur für eine verbesserte Luftzirkulation, damit der Patient von einem optimalen Mikroklima profitiert.

ECOLAST®-Schaum bietet eine perfekte Druckentlastung und eine vielfach verbesserte Haltbarkeit.


Härteverlust durch Einfluss von Luftfeuchtigkeit
(35 °C, 95% RH*¹)

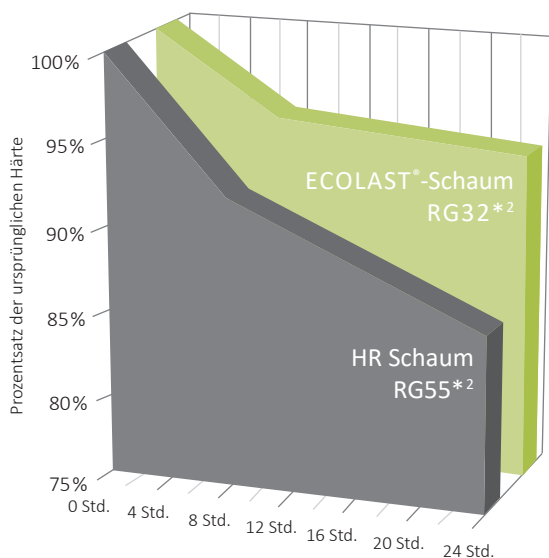

CO₂ Emission pro m³ in kg*³

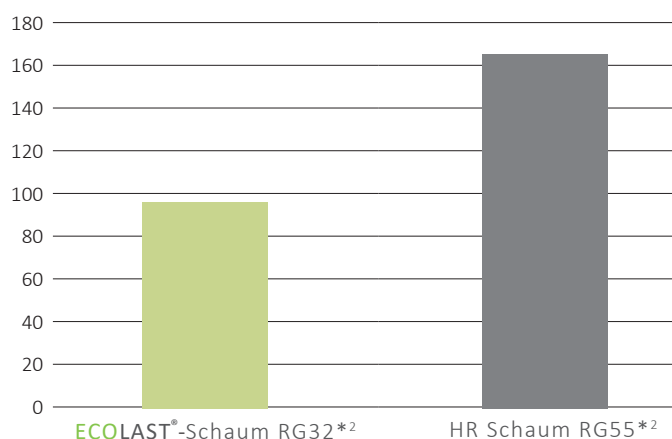

Capability emission figure*⁴

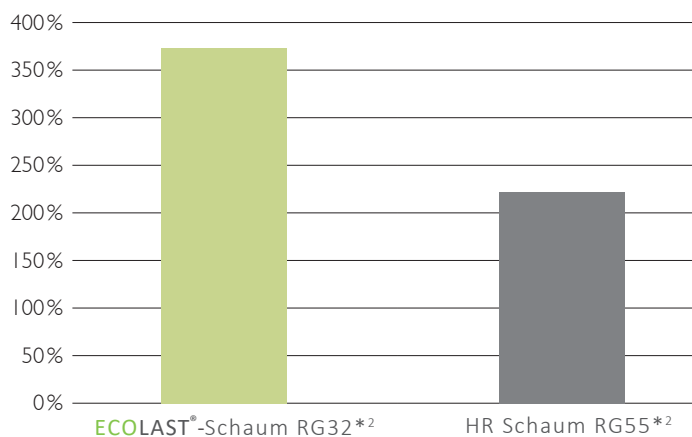

*¹ RH = relative Luftfeuchtigkeit

*² RG = Raumgewicht (kg/m³)

*³ Quelle: Europur-Studie 2015

*⁴ Im Vergleich:

Elastizitäts-Test ASTM D3574/H • Wet-Compression-Test ASTM D395 • Bruchdehnung ISO 1798 • Zugfestigkeit ISO 1798 • CO₂ Emissionswert



PRODUKTE



GREENLINE[©]



HEMOCARE




— GREENLINE[®] —

RESPONSIBLE CARE

ECOLAST[®] - Schaum-Technologie

Medizinische Qualität trifft Öko 4.0

Klimafreundlich

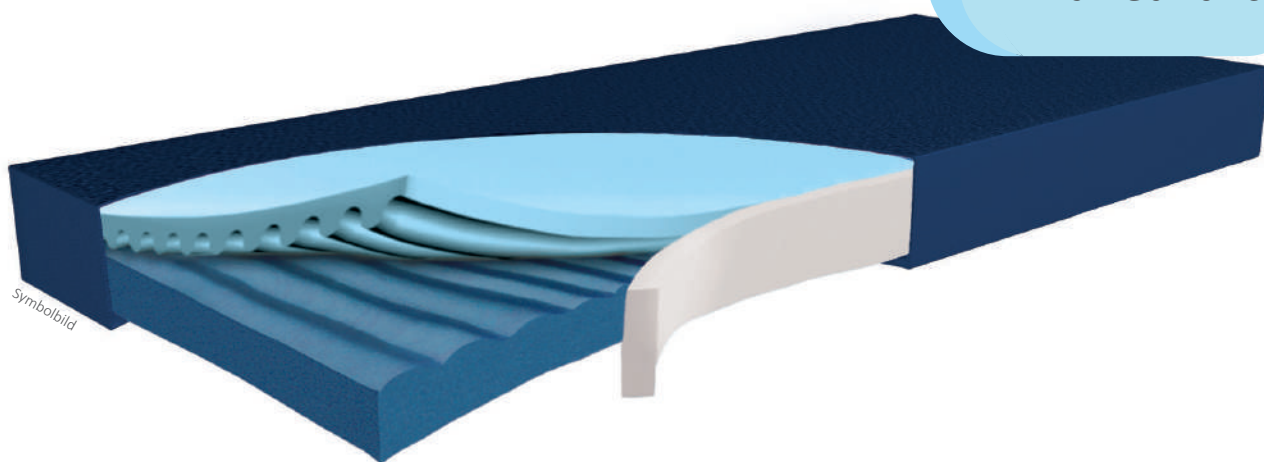

Hyper Foam PLUS

— GREENLINE[®] —

Mehr Informationen über
GREENLINE[®] finden Sie auf
den Seiten 11 – 15



HILFSMITTELNUMMER
11.29.05.0062

Überreicht durch:

PRS
Pressure Relieving Solutions



Thermisch aufbereitbar
nach RKI-Richtlinien

Geeignet zur Schmerzlinderung
durch Entlastungslagerung

Einsetzbar bis Grad 3
(nach Prof. Seiler / EPUAP)

Mittleres Risiko
(Norton-, Braden-, Waterlow-Skala)

HMV-Nr.
11.29.05.0062


Hyper Foam PLUS

GREENLINE®

Dekubitustherapie-Matratze

5 JAHRE
GARANTIE *1

Hyperelastischer 2-schichtiger
Schaumkern (mit Quer- und
Längsschnitten)

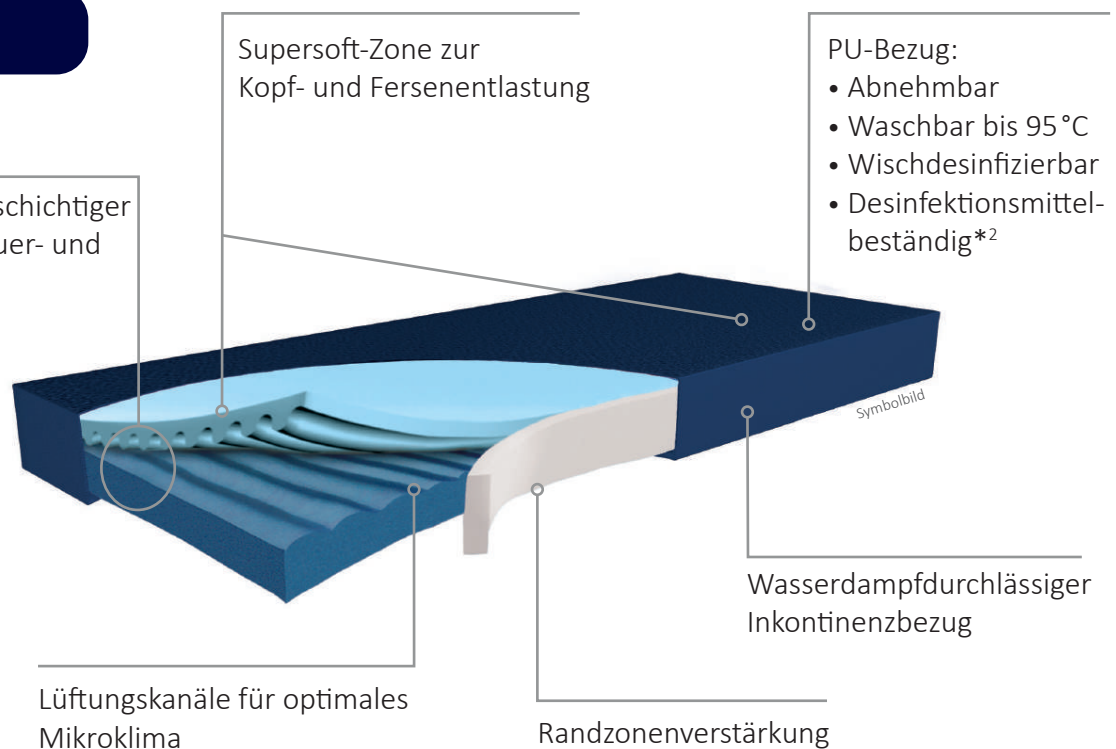

Größe

Höhe	14 cm
Länge	Siehe aktuelle Preisliste
Breite	Siehe aktuelle Preisliste

GREENLINE®

ECOLAST®-Schaum-Technologie:

- Sorgt für eine größere Langlebigkeit
- Weniger CO₂-Emissionen



Offenporiger
atmungsaktiver
ECOLAST®-Schaum



Autoklavierbar



Bezugsmaterial
viren- und
bakteriendicht
gem. ASTM
1670 + 1671



Wasserdicht
dennoch
atmungsaktiv



Druckentlastung
< 18 mmHg



Bi-elastischer
Bezug zur
Minimierung
der Scherkräfte



CE- Kennzeichnung
MDR 2017/745



Wartungsfrei



Schwer
entflammbar
DIN EN 597 (1+2)



Patientengewicht:
0 –
140 kg

*1 Garantie gilt auf funktionelle Eigenschaften des Matratzenkerns (Pro-Rata-Garantie)!

*2 Details siehe Gebrauchsanweisung.




— GREENLINE[®] —

RESPONSIBLE CARE

ECOLAST[®] - Schaum-Technologie

Medizinische Qualität trifft Öko 4.0

ca. 22 %
weniger CO₂

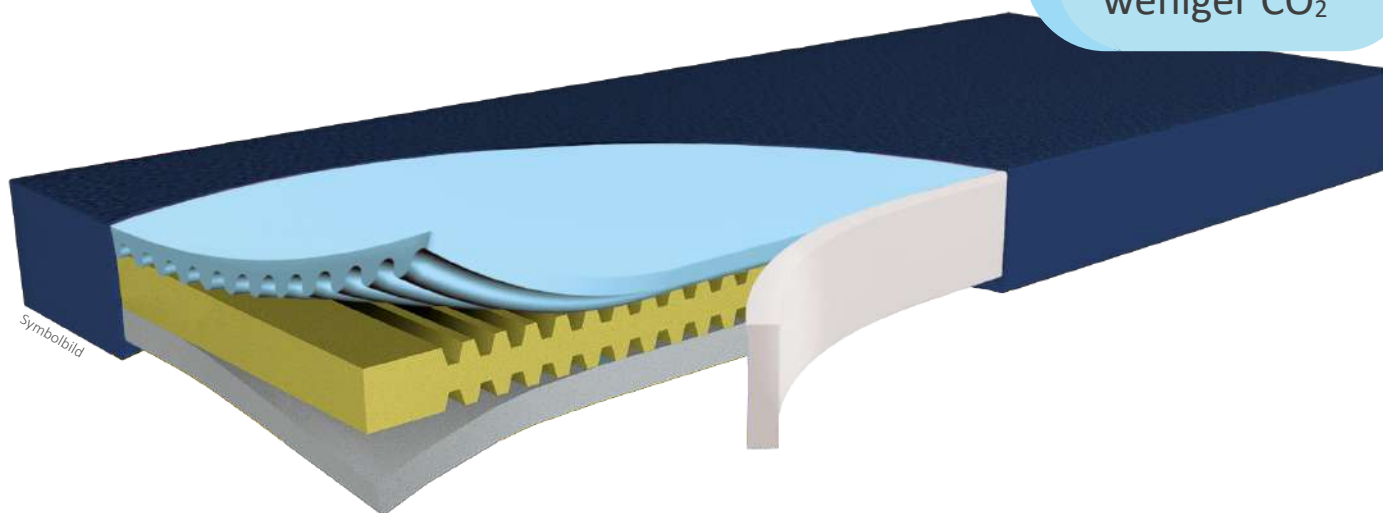

Hyper Foam 2 — GREENLINE[®] —

Mehr Informationen über
GREENLINE[®] finden Sie auf
den Seiten 11 – 15



HILFSMITTELNUMMER
11.29.05.0061

Überreicht durch:

PRS
Pressure Relieving Solutions



*ca. 7,2kg weniger CO₂ pro Matratze (Quelle: Europur-Studie 2015)

Funke Medical GmbH • Ährenfeld 10 • 46348 Raesfeld • Tel.: +49-2865-2669350 • Fax: +49-2865-8133 • info@funke-medical.de

www.funke-medical.de
-Germany-

Thermisch aufbereitbar
nach RKI-Richtlinien

Geeignet zur Schmerzlinderung
durch Entlastungslagerung

Einsetzbar bis Grad 4
(nach Prof. Seiler / EPUAP)

Sehr hohes Risiko
(Norton-, Braden-, Waterlow-Skala)


HMV-Nr.
11.29.05.0061

Hyper Foam 2

— GREENLINE® —

Dekubitustherapie-Matratze

7 JAHRE
GARANTIE *1

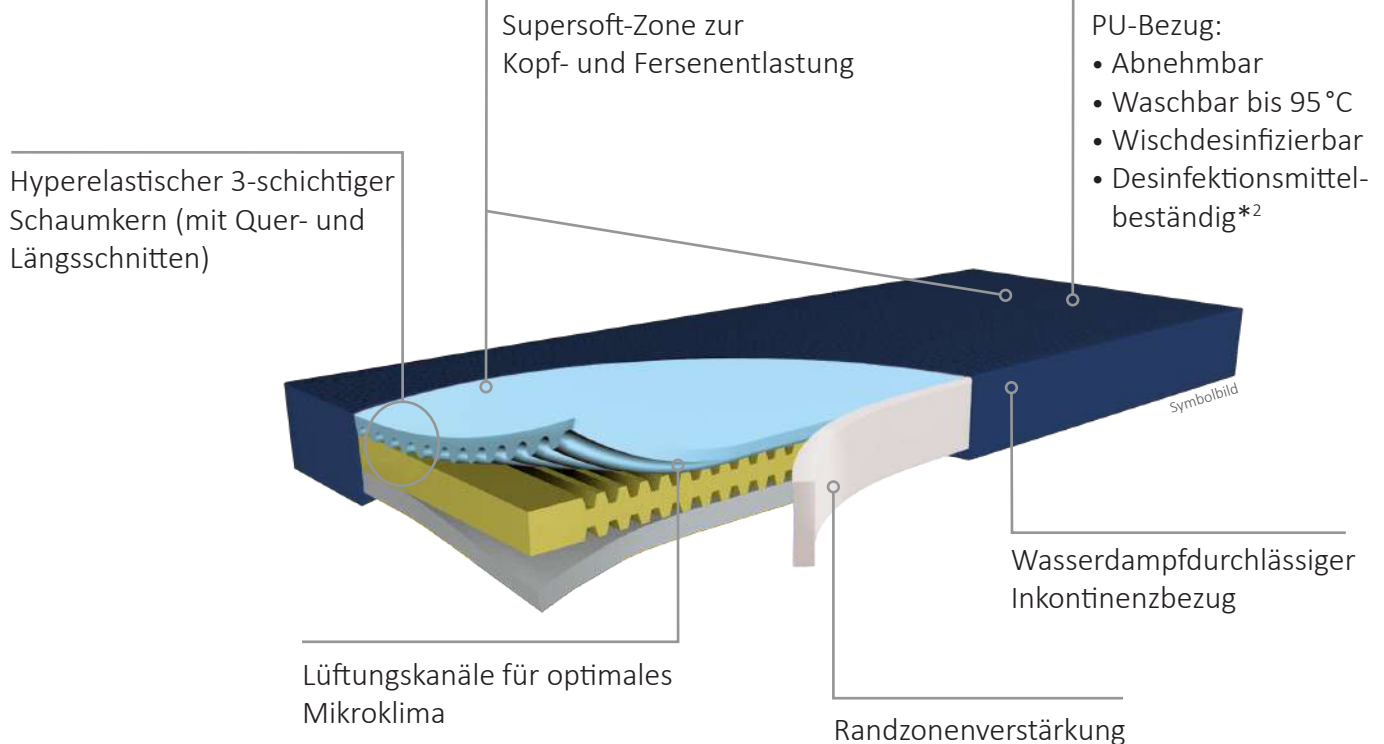

Größe

Höhe	15 cm
Länge	Siehe aktuelle Preisliste
Breite	Siehe aktuelle Preisliste

GREENLINE®

ECOLAST®-Schaum-Technologie:

- Sorgt für eine größere Langlebigkeit
- Weniger CO₂-Emissionen



Offenporiger
atmungsaktiver
ECOLAST®-Schaum



Autoklavierbar




Bezugsmaterial
viren- und
bakteriendicht
gem. ASTM
1670 + 1671



Wasserdicht
dennoch
atmungsaktiv



Druckentlastung
< 18 mmHg

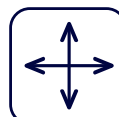

Bi-elastischer
Bezug zur
Minimierung
der Scherkräfte




CE-Kennzeichnung
MDR 2017/745



Wartungsfrei



Schwer
entflammbar
DIN EN 597 (1+2)

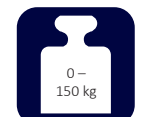

Patientengewicht:
0 bis 150 kg

*1 Garantie gilt auf funktionelle Eigenschaften des Matratzenkerns (Pro-Rata-Garantie)!

*2 Details siehe Gebrauchsanweisung.

GREENLINE[©]



CLINIC CARE




— GREENLINE[®] —

RESPONSIBLE CARE

ECOLAST[®] - Schaum-Technologie

Medizinische Qualität trifft Öko 4.0

Klimafreundlich

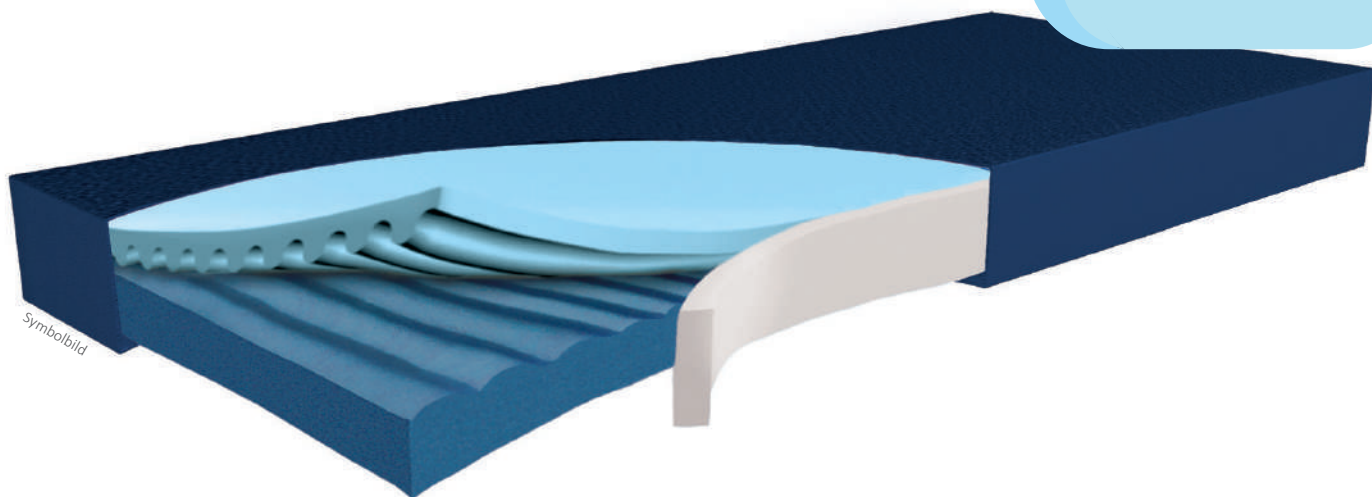

Hyper Foam PLUS
— GREENLINE[®] — *clinic*

Mehr Informationen über
GREENLINE[®] finden Sie auf
den Seiten 11 – 15

Überreicht durch:

PRS
Pressure Relieving Solutions



Thermisch aufbereitbar
nach RKI-Richtlinien

Geeignet zur Schmerzlinderung
durch Entlastungslagerung

Einsetzbar bis Grad 3
(nach Prof. Seiler / EPUAP)


Mittleres Risiko
(Norton-, Braden-, Waterlow-Skala)

Hyper Foam PLUS^{clinic}

GREENLINE®

Dekubitustherapie-Matratze

5 JAHRE
GARANTIE *1

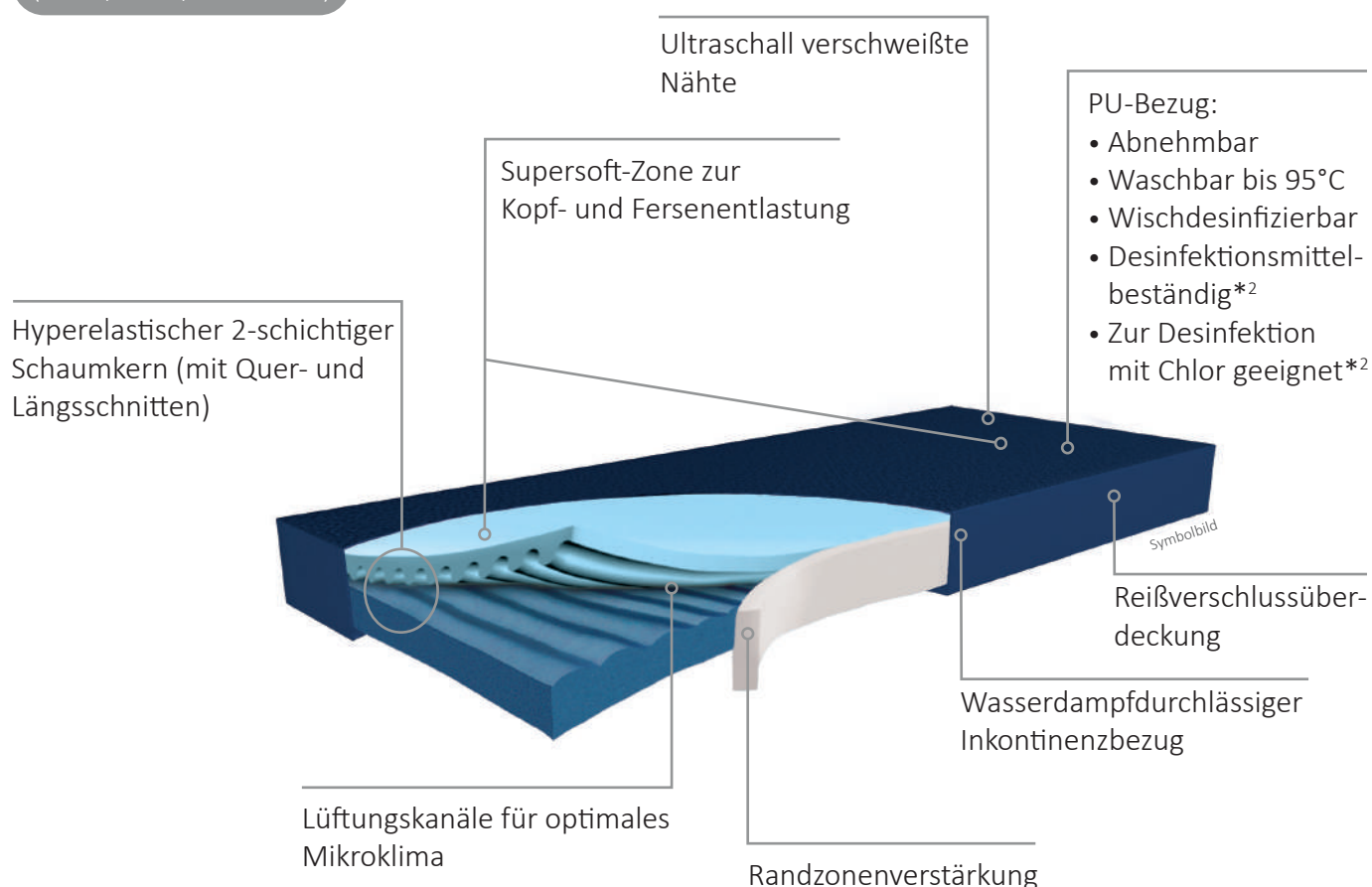

Größe

Höhe	14 cm
Länge	Siehe aktuelle Preisliste
Breite	Siehe aktuelle Preisliste

GREENLINE®

ECOLAST®-Schaum-Technologie:

- Sorgt für eine größere Langlebigkeit
- Weniger CO₂-Emissionen



Offenporiger
atmungsaktiver
ECOLAST®-Schaum



Autoklavierbar




Bezugsmaterial
viren- und
bakteriendicht
gem. ASTM
1670 + 1671



Wasserdicht
dennoch
atmungsaktiv



Druckentlastung
< 18 mmHg

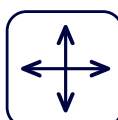

Bi-elastischer
Bezug zur
Minimierung
der Scherkräfte



CE-Kennzeichnung
MDR 2017/745




Wartungsfrei



Schwer
entflammbar
DIN EN 597 (1+2)



Max. 5000 ppm

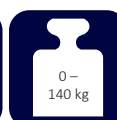

Patientengewicht:
0 bis 140 kg

*1 Garantie gilt auf funktionelle Eigenschaften des Matratzenkerns (Pro-Rata-Garantie)!

*2 Details siehe Gebrauchsanweisung.




— GREENLINE[®] —

RESPONSIBLE CARE

ECOLAST[®] - Schaum-Technologie

Medizinische Qualität trifft Öko 4.0

ca. 22 %
weniger CO₂

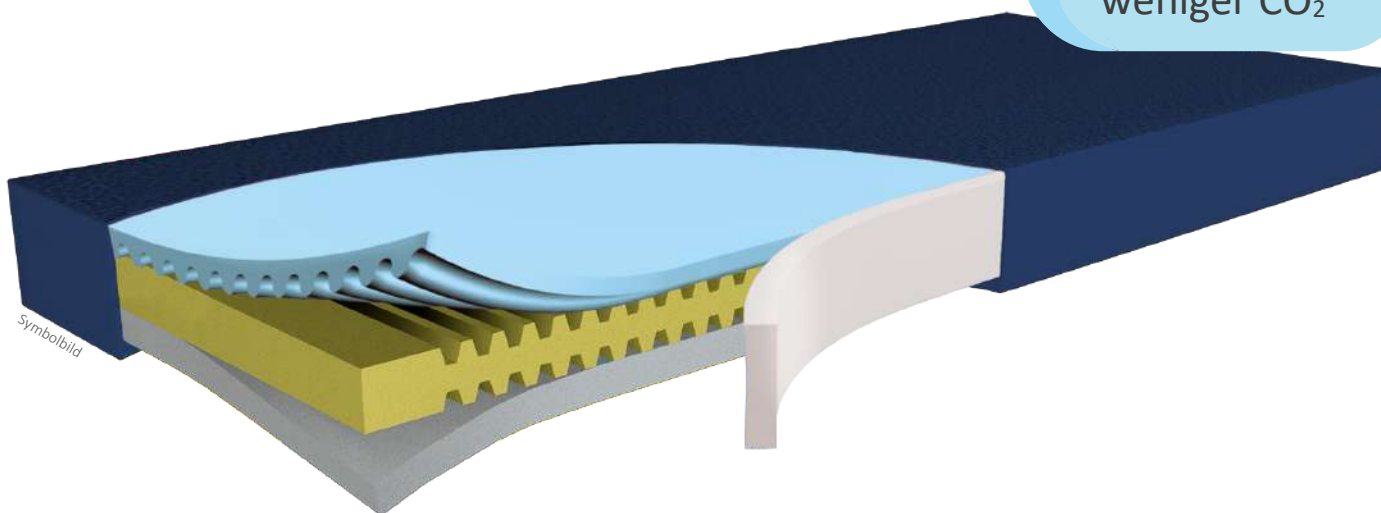

Hyper Foam 2
GREENLINE[®] clinic

Mehr Informationen über
GREENLINE[®] finden Sie auf
den Seiten 11 – 15

Überreicht durch:

PRS
Pressure Relieving Solutions



*ca. 7,2kg weniger CO₂ pro Matratze (Quelle: Europur-Studie 2015)

Funke Medical GmbH • Ährenfeld 10 • 46348 Raesfeld • Tel.: +49-2865-2669350 • Fax: +49-2865-8133 • info@funke-medical.de

www.funke-medical.de
-Germany-

Thermisch aufbereitbar
nach RKI-Richtlinien

Geeignet zur Schmerzlinderung
durch Entlastungslagerung

Einsetzbar bis Grad 4
(nach Prof. Seiler / EPUAP)


Sehr hohes Risiko
(Norton-, Braden-, Waterlow-Skala)

Hyper Foam 2^{clinic}

— GREENLINE® —

Dekubitustherapie-Matratze

7 JAHRE
GARANTIE *1

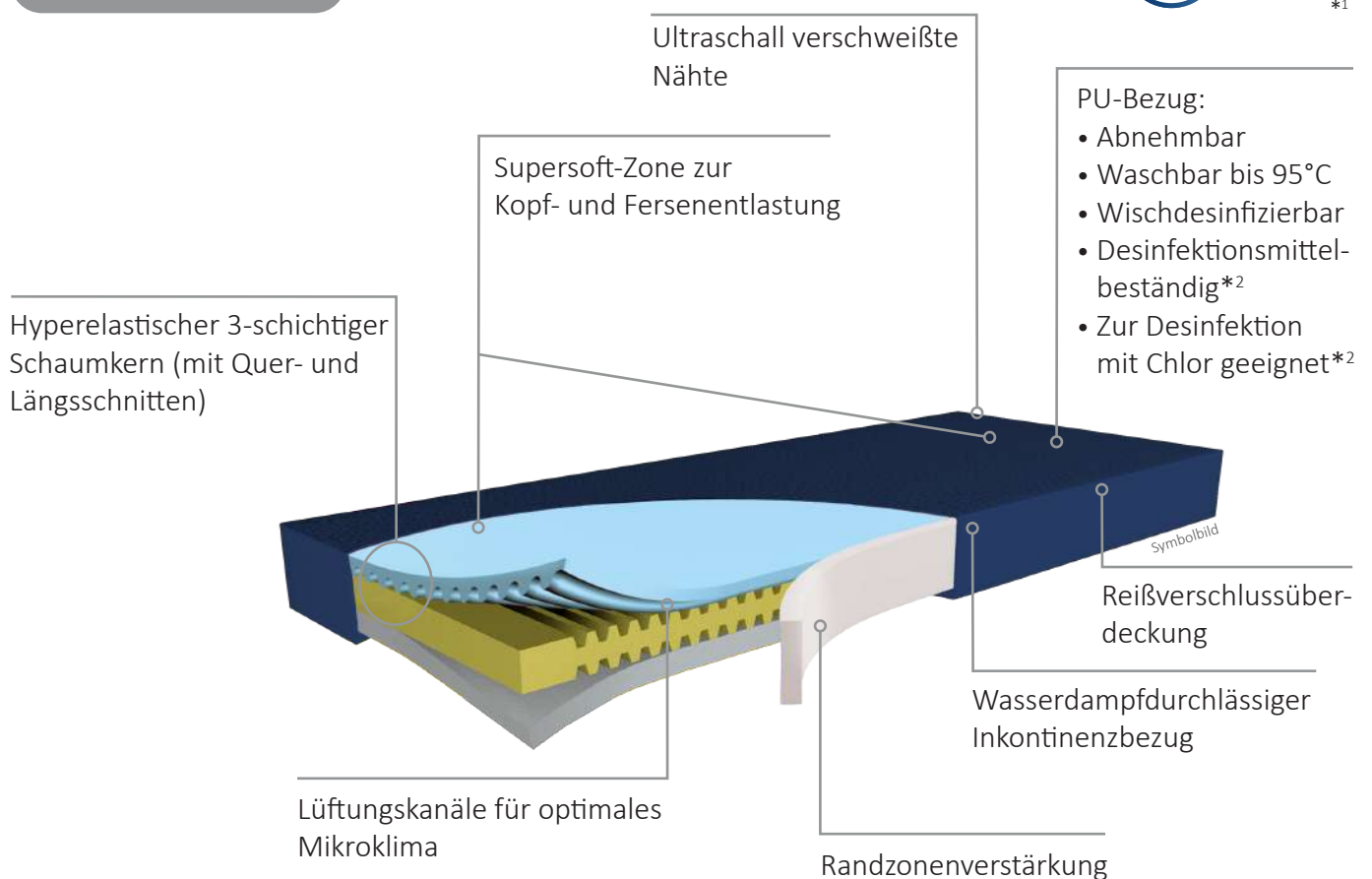

Größe

Höhe	15 cm
Länge	Siehe aktuelle Preisliste
Breite	Siehe aktuelle Preisliste

GREENLINE®

ECOLAST®-Schaum-Technologie:

- Sorgt für eine größere Langlebigkeit
- Weniger CO₂-Emissionen



*1 Garantie gilt auf funktionelle Eigenschaften des Matratzenkerns (Pro-Rata-Garantie)!


*2 Details siehe Gebrauchsanweisung.



Dekubitustherapie-Matratten mit Evakuierungsfunktion



- Your **all-in-one** solution -

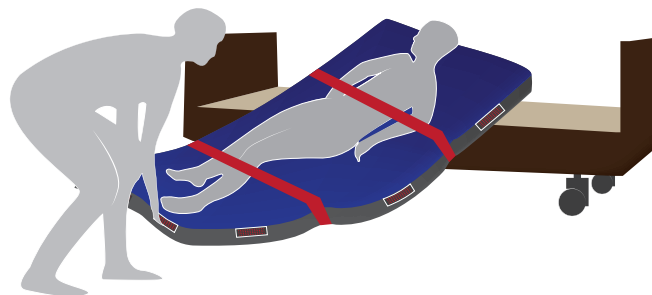



Dekubitustherapie-Matratten mit Evakuierungsfunktion

- Your **all-in-one** solution -

Im Brandfall hat man nur **3 Minuten** Zeit um zu entkommen!



Die EVAQ®-Dekubitustherapie-Matratten sind mit einer Evakuierungsfunktion ausgerüstet.
Patienten können im Brandfall durch nur eine Person evakuiert werden.

Die Dauer pro Stockwerk liegt unter **60 Sekunden**.

Überzeugen Sie sich selbst, indem Sie unseren Film ansehen.

Scan me!



FILMLINK

Schauen Sie sich hier
den Evakuierungsfilm an!




- Your **all-in-one** solution -


Gegenüberstellung – Ausstattung von Einrichtungen

(z.B. Kliniken, Altenheimen)

Ausstattung ohne EVAQ®

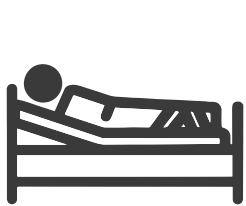

+

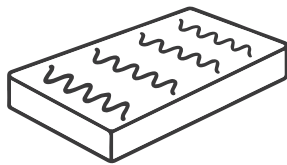


Standard-Pflegematratze
meistens ohne
Dekubitustherapie-Funktion

+



Evakuierungssystem
z.B. Krankentragen,
Rettungstücher

+

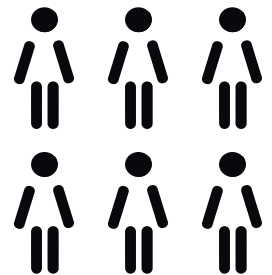


4 – 6 Retter

Im Evakuierungsfall

Ausstattung mit EVAQ®



+

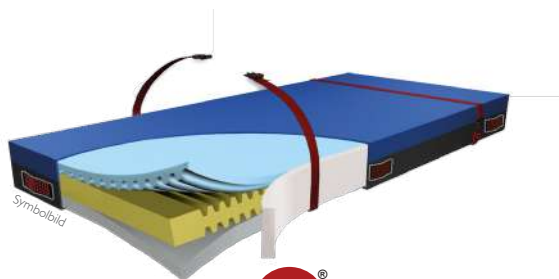

evAQ®

=

Matratze
+ Dekubitustherapie-System
+ Evakuierungssystem

+



1 Retter

Im Evakuierungsfall

Ressourcen-Ersparnis (Geld und Personal)!



Dekubitustherapie-Matratten mit Evakuierungsfunktion

Alle Matratzen dieses Programmes sind mit einer Evakuierungsfunktion ausgerüstet. Diese ermöglicht Ihnen die schnelle und problemlose Evakuierung der Patienten ohne eine Umbettung auf Bergetücher oder Tragen!


Bei Evakuierungssystemen wie Tragen und Bergetücher benötigen sie oftmals zwei oder mehr Personen zur Durchführung.

Bei der Verwendung der EVAQ®-Dekubitustherapie-Matratten können Sie eine schonende Evakuierung, auch über Treppen, mit nur einer Person vornehmen!

§§ Mal abgesehen davon, dass jeder Betreiber einer Einrichtung die Verantwortung für schnellste Evakuierungsmaßnahmen hat! §§

SICHERER → SCHNELLER → SCHONENDER

- Sicherheitsgurte mit Schnellverschluss
- Spezielles Gleitmaterial an der Unterseite
- Treppenevakuierung möglich
- Randzonenverstärkung für mehr Stabilität
- Bergegriffe am Bezug

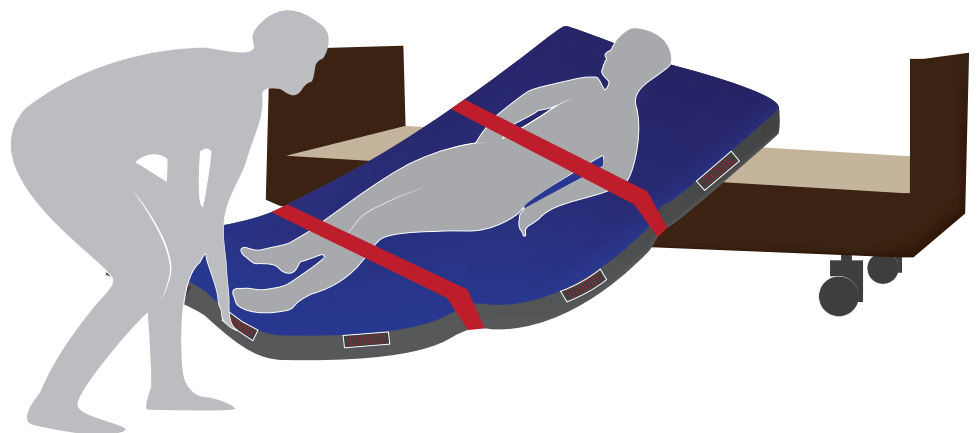




— GREENLINE[®] —

RESPONSIBLE CARE

ECOLAST[®] - Schaum-Technologie

Medizinische Qualität trifft Öko 4.0

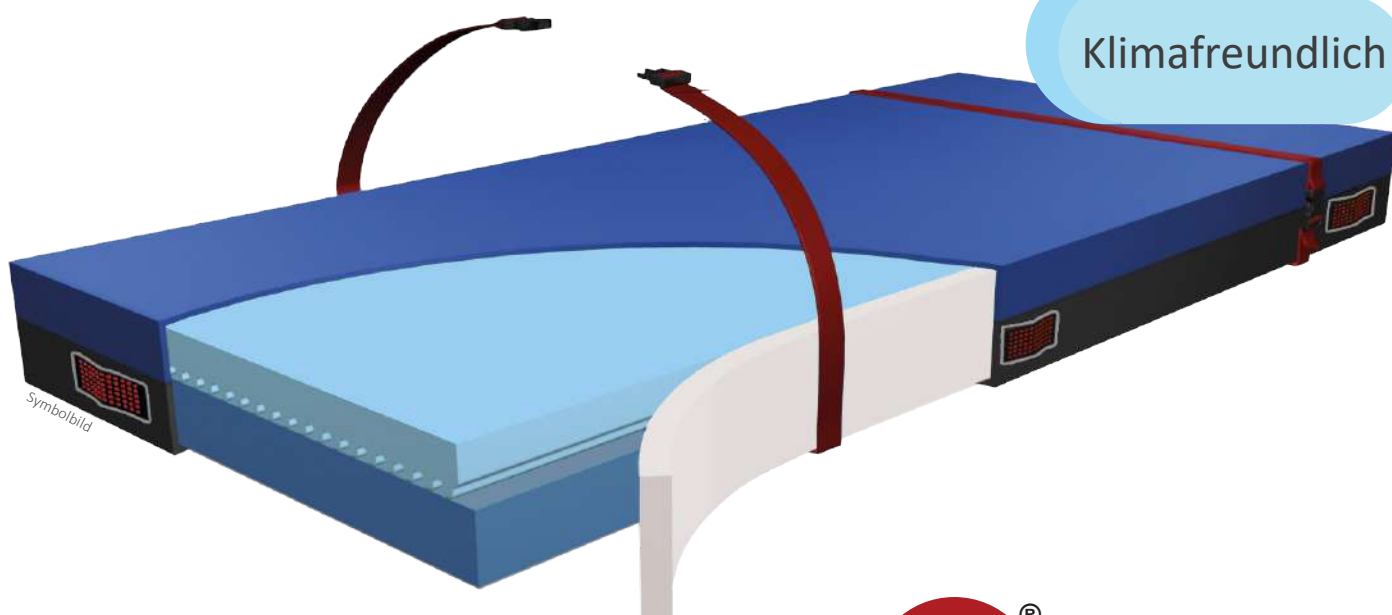

evAQ[®] - PRO

— GREENLINE[®] —
- Your **all-in-one** solution -

Mehr Informationen über
GREENLINE[®] finden Sie auf
den Seiten 11 – 15

Überreicht durch:

PRS 
Pressure Relieving Solutions



Thermisch aufbereitbar
nach RKI-Richtlinien

Geeignet zur Schmerzlinderung
durch Entlastungslagerung


Einsetzbar bis Grad 3
(nach Prof. Seiler / EPUAP)

Mittleres Risiko
(Norton-, Braden-, Waterlow-Skala)

evAQ® - PRO
— GREENLINE® —

Dekubitustherapie-Matratze mit Evakuierungssystem

5 JAHRE GARANTIE
*1

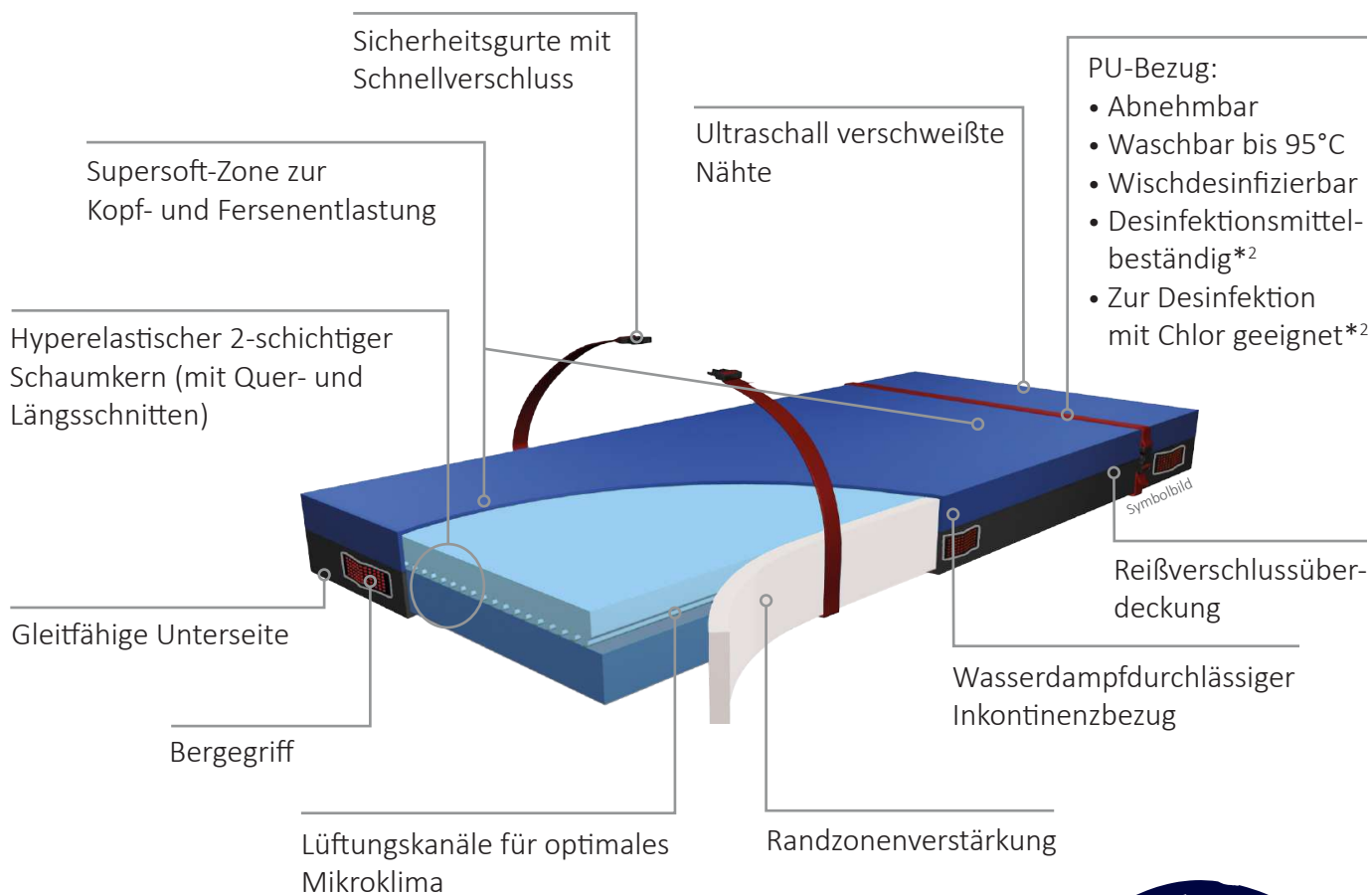

Größe

Höhe	14 cm
Länge	Siehe aktuelle Preisliste
Breite	Siehe aktuelle Preisliste

GREENLINE®

ECOLAST®-Schaum-Technologie:

- Sorgt für eine größere Langlebigkeit
- Weniger CO₂-Emissionen



*1 Garantie gilt auf funktionelle Eigenschaften des Matratzenkerns (Pro-Rata-Garantie)!

*2 Details siehe Gebrauchsanweisung.




— GREENLINE[®] —

RESPONSIBLE CARE

ECOLAST[®] - Schaum-Technologie

Medizinische Qualität trifft Öko 4.0

ca. 22 %
weniger CO₂

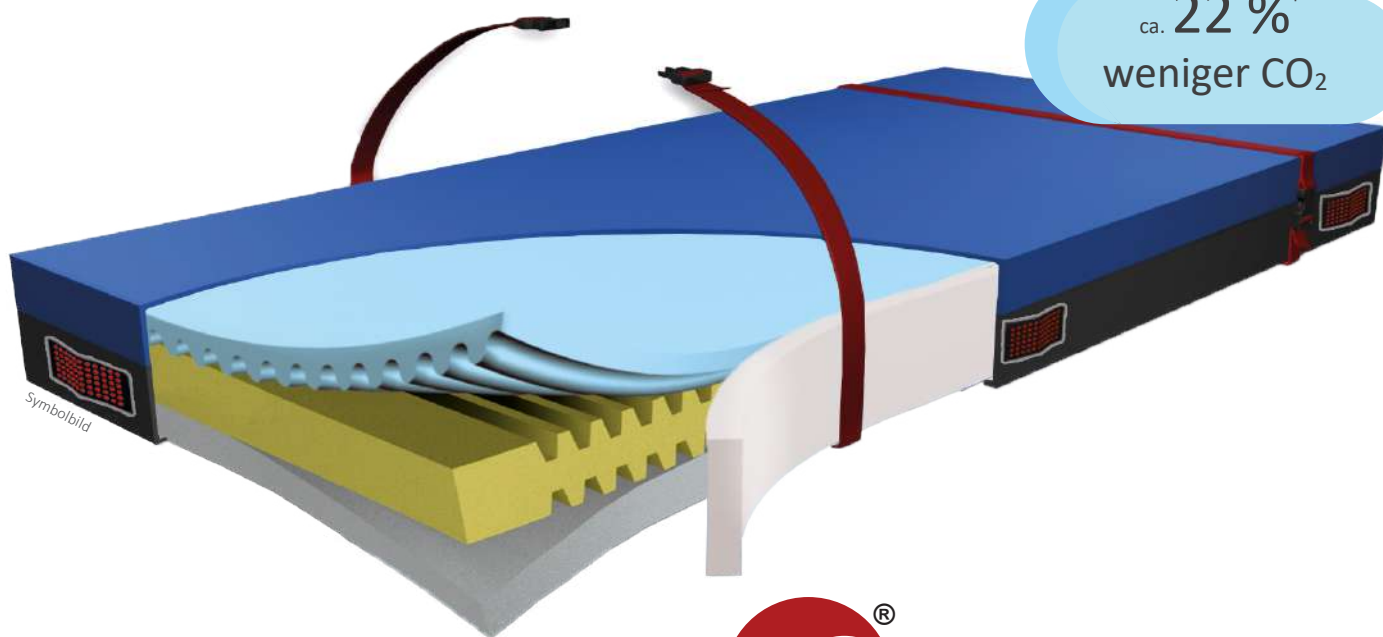

Symbolbild

evAQ[®] - PRO II

— GREENLINE[®] —

- Your **all-in-one** solution -

Mehr Informationen über
GREENLINE[®] finden Sie auf
den Seiten 11 – 15

Überreicht durch:

PRS
Pressure Relieving Solutions



*ca. 7,2kg weniger CO₂ pro Matratze (Quelle: Europur-Studie 2015)

Funke Medical GmbH • Ährenfeld 10 • 46348 Raesfeld • Tel.: +49-2865-2669350 • Fax: +49-2865-8133 • info@funke-medical.de

www.funke-medical.de

-Germany-

Thermisch aufbereitbar
nach RKI-Richtlinien

Geeignet zur Schmerzlinderung
durch Entlastungslagerung

Einsetzbar bis Grad 4
(nach Prof. Seiler / EPUAP)


Sehr hohes Risiko
(Norton-, Braden-, Waterlow-Skala)

evAQ® - PRO II

— GREENLINE® —

Dekubitustherapie-Matratze mit Evakuierungssystem

7 JAHRE GARANTIE *1

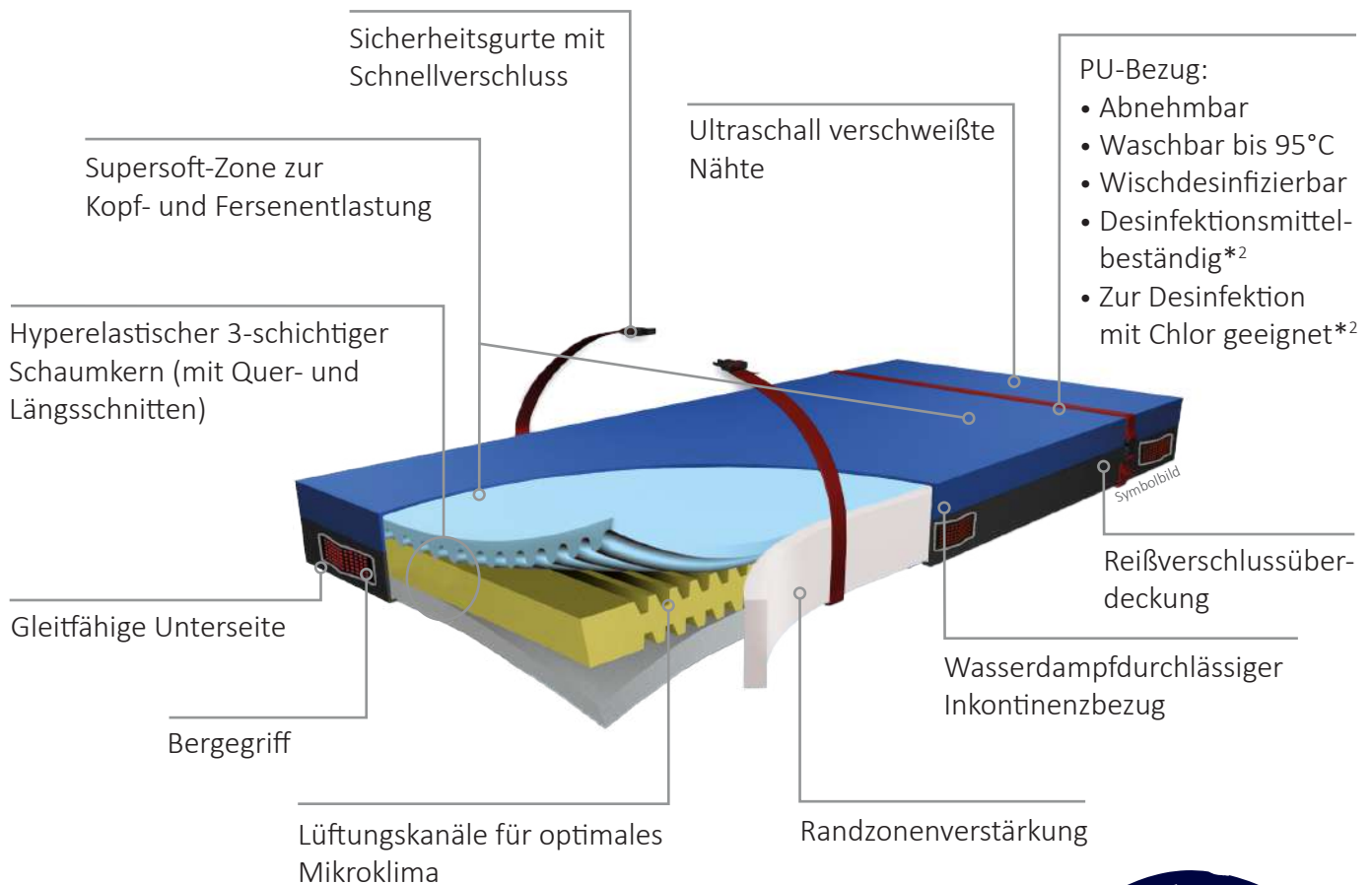

Größe

Höhe	15 cm
Länge	Siehe aktuelle Preisliste
Breite	Siehe aktuelle Preisliste

GREENLINE®

ECOLAST®-Schaum-Technologie:

- Sorgt für eine größere Langlebigkeit
- Weniger CO₂-Emissionen



*1 Garantie gilt auf funktionelle Eigenschaften des Matratzenkerns (Pro-Rata-Garantie)!

*2 Details siehe Gebrauchsanweisung.

GREENLINE[©]



BARIATRIC CARE


— GREENLINE[®] —

RESPONSIBLE CARE

ECOLAST[®] - Schaum-Technologie

Medizinische Qualität trifft Öko 4.0

Klimafreundlich

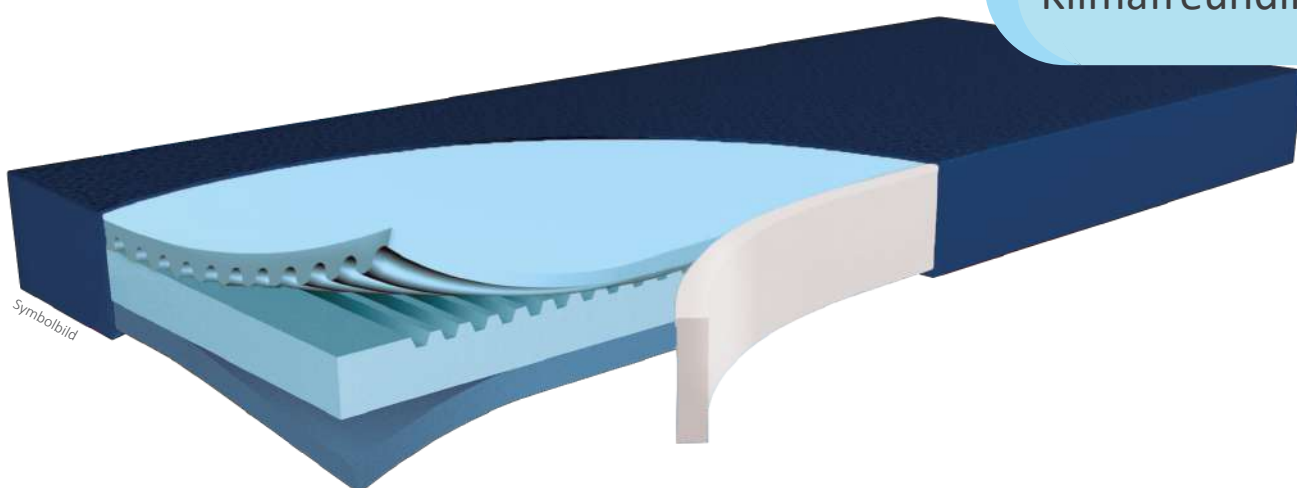

MAXX 250

— GREENLINE[®] —

Mehr Informationen über
GREENLINE[®] finden Sie auf
den Seiten 11 – 15



HILFSMITTELNUMMER
11.29.05.0063

Überreicht durch:

PRS
Pressure Relieving Solutions



Thermisch aufbereitbar
nach RKI-Richtlinien

Geeignet zur Schmerzlinderung
durch Entlastungslagerung

Einsetzbar bis Grad 4
(nach Prof. Seiler / EPUAP)

Sehr hohes Risiko
(Norton-, Braden-, Waterlow-Skala)


HMV-Nr.
11.29.05.0063

MAXX 250

— GREENLINE® —

Dekubitustherapie-Schwerlastmatratze

7 JAHRE GARANTIE *1

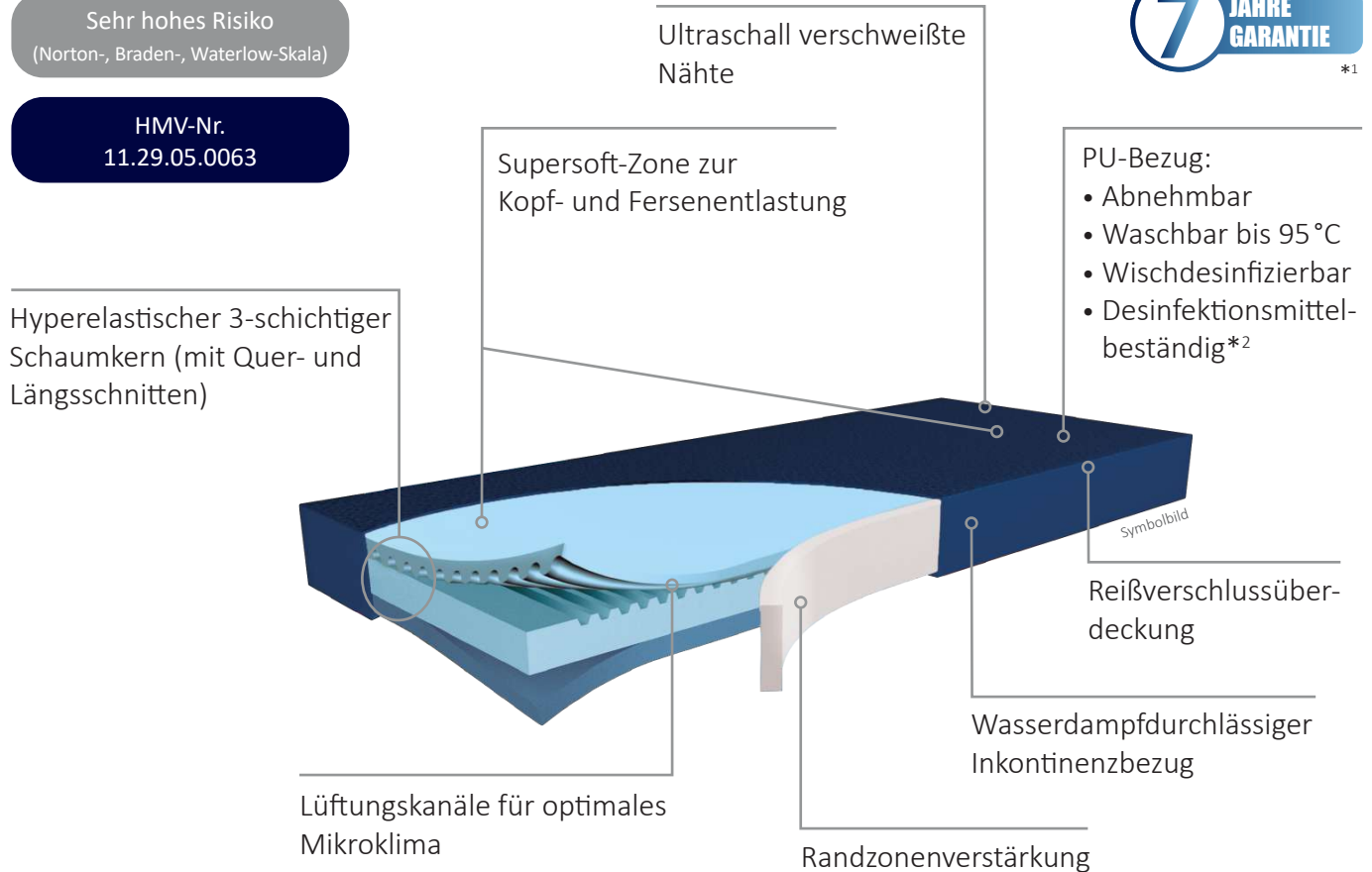

Größe

Höhe	18 cm
Länge	Siehe aktuelle Preisliste
Breite	Siehe aktuelle Preisliste

GREENLINE®

ECOLAST®-Schaum-Technologie:

- Sorgt für eine größere Langlebigkeit
- Weniger CO₂-Emissionen



*1 Garantie gilt auf funktionelle Eigenschaften des Matratzenkerns (Pro-Rata-Garantie)!

*2 Details siehe Gebrauchsanweisung.


— GREENLINE[®] —

RESPONSIBLE CARE

ECOLAST[®] - Schaum-Technologie

Medizinische Qualität trifft Öko 4.0

Klimafreundlich

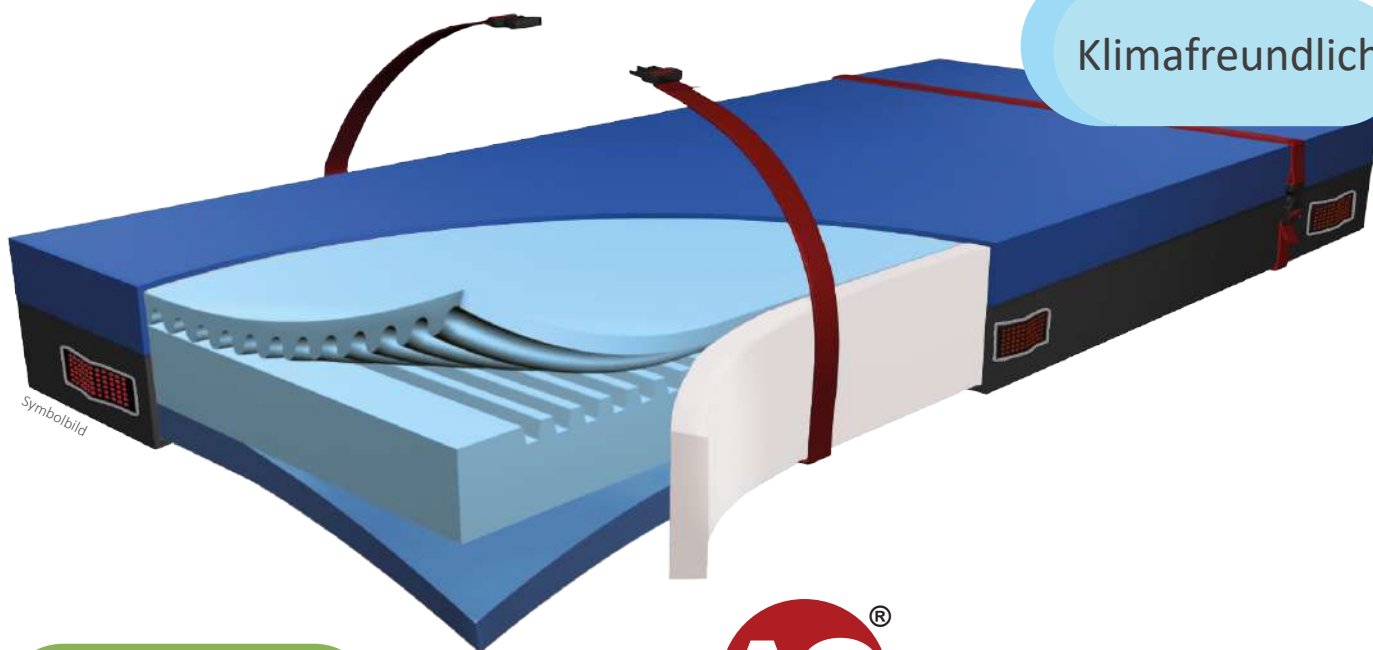

Mehr Informationen über
GREENLINE[®] finden Sie auf
den Seiten 11 – 15

Mehr Informationen über
EVAQ[®] finden Sie auf den
Seiten 35 – 38

evAQ[®] - PRO XL

— GREENLINE[®] —
- Your **all-in-one** solution -

Überreicht durch:

PRS
Pressure Relieving Solutions



Thermisch aufbereitbar
nach RKI-Richtlinien

Geeignet zur Schmerzlinderung
durch Entlastungslagerung

Einsetzbar bis Grad 4
(nach Prof. Seiler / EPUAP)

Sehr hohes Risiko
(Norton-, Braden-, Waterlow-Skala)

evAQ® - PRO XL
GREENLINE®

Dekubitustherapie-Schwerlastmatratze mit Evakuierungssystem

7 JAHRE GARANTIE
*1



Größe

Höhe	18 cm
Länge	Siehe aktuelle Preisliste
Breite	Siehe aktuelle Preisliste

GREENLINE®

ECOLAST®-Schaum-Technologie:

- Sorgt für eine größere Langlebigkeit
- Weniger CO₂-Emissionen



*1 Garantie gilt auf funktionelle Eigenschaften des Matratzenkerns (Pro-Rata-Garantie)!

*2 Details siehe Gebrauchsanweisung.




GELTOUCHLINE[®]





HEMOCARE MIT SYSTEM

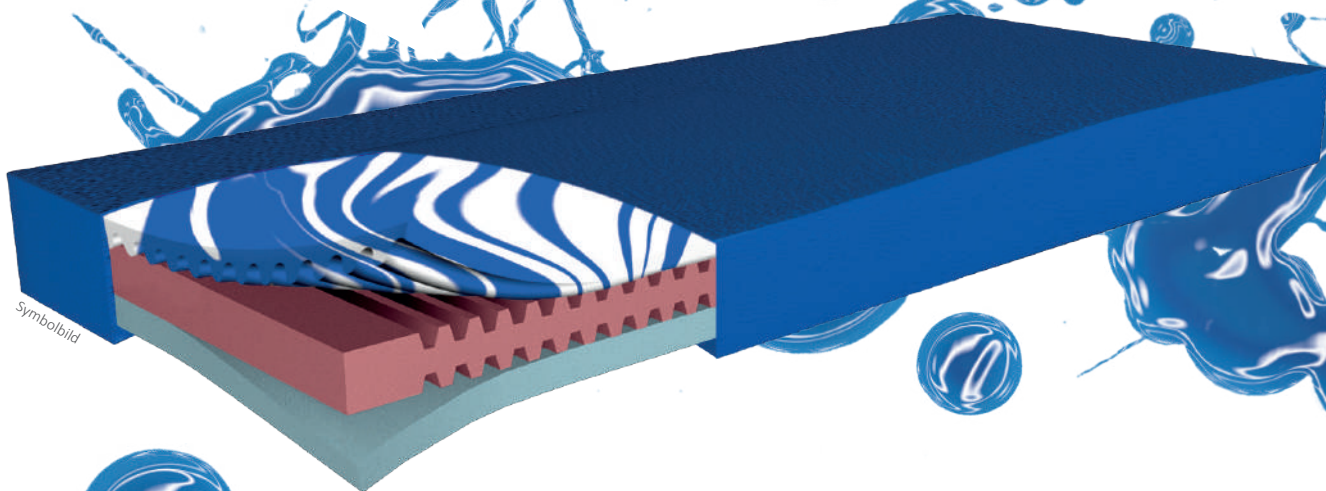

Symbolbild

Hyper Foam GEL



HILFSMITTELNUMMER
11.29.05.0057

Überreicht durch:

PRS
Pressure Relieving Solutions

Thermisch aufbereitbar
nach RKI-Richtlinien

Geeignet zur Schmerzlinderung
durch Entlastungslagerung

Einsetzbar bis Grad 4
(nach Prof. Seiler / EPUAP)


Sehr hohes Risiko
(Norton-, Braden-, Waterlow-Scale)

HMV-Nr.
11.29.05.0057

Hyper Foam GEL


Dekubitustherapie-Matratze

5 JAHRE
GARANTIE *1

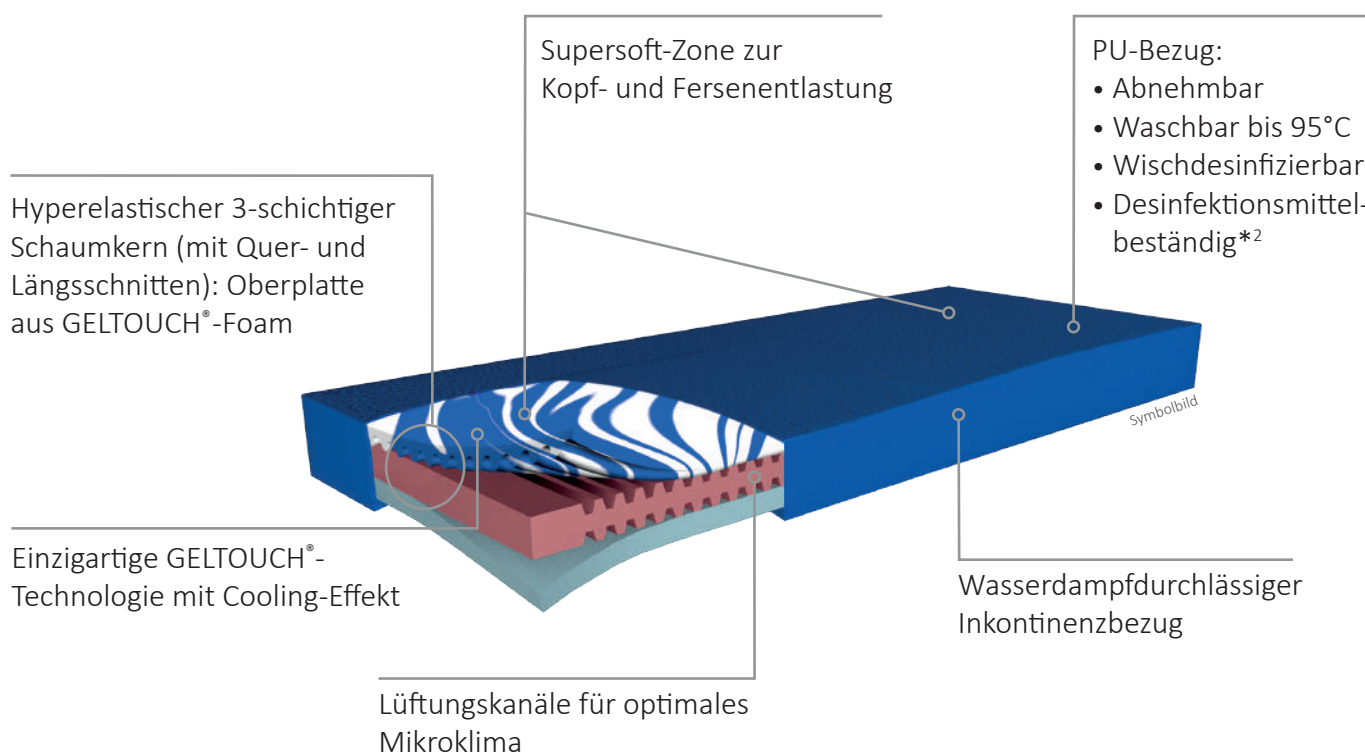

Größe

Höhe	15 cm
Länge	Siehe aktuelle Preisliste
Breite	Siehe aktuelle Preisliste

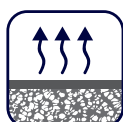

Offenporiger atmungsaktiver Geltouch®-Foam + HR-Foam



Autoklavierbar




Bezugsmaterial viren- und bakterien-todtich gem. ASTM 1670 + 1671



Wasserdicht dennoch atmungsaktiv



Druckentlastung < 18 mmHg

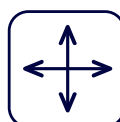

Bi-elastischer Bezug zur Minimierung der Scherkräfte




CE-Kennzeichnung MDR 2017/745



Wartungsfrei



Schwer entflammbar DIN EN 597 (1+2)

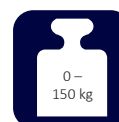

Patientengewicht: 0 bis 150 kg


*¹ Garantie gilt auf funktionelle Eigenschaften des Matratzenkerns (Pro-Rata-Garantie)!

*² Details siehe Gebrauchsanweisung.

AIRLINE[©]



HEMOCARE MIT SYSTEM

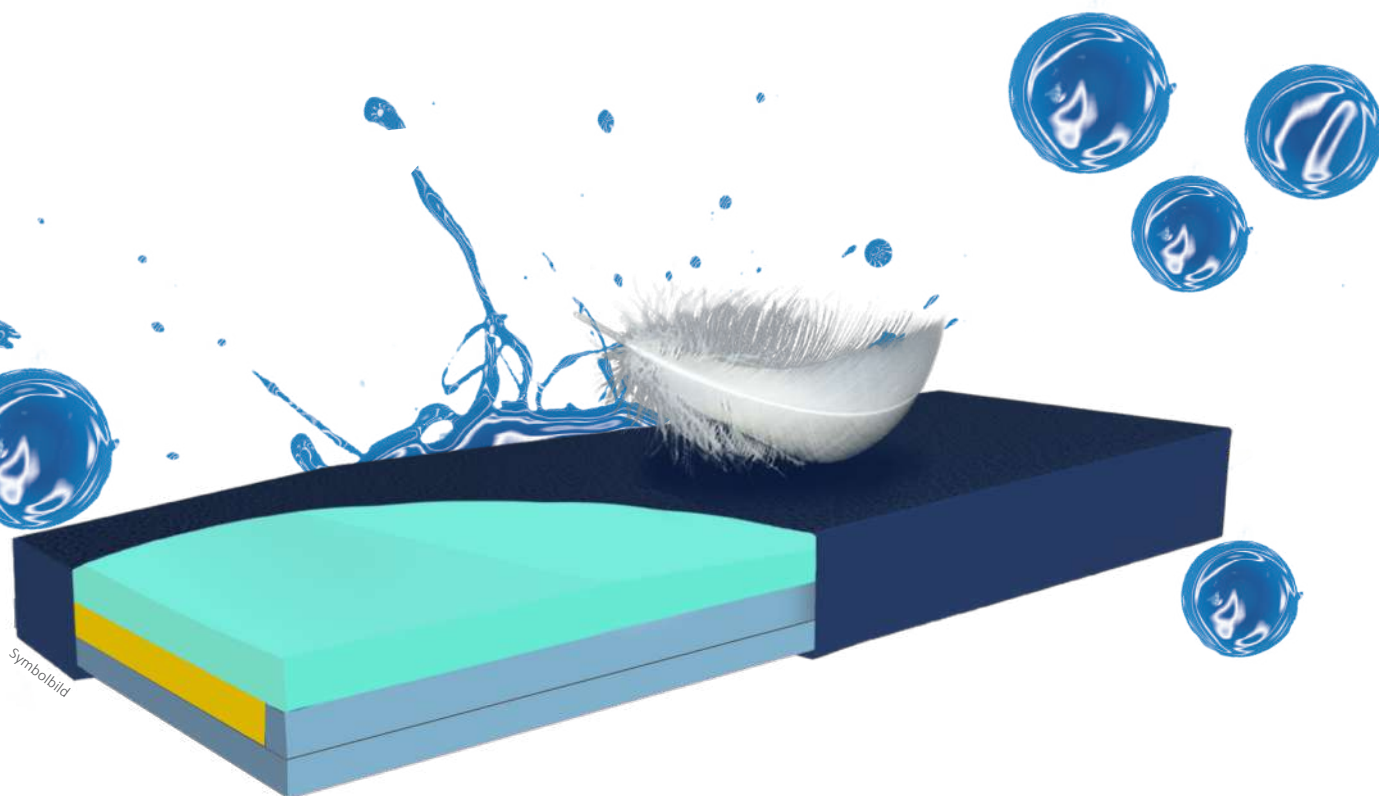

Hyper AIR® hybrid - LUFTZELLEN-MATRATZE -



HILFSMITTELNUMMER
11.29.13.0001

Überreicht durch:

PRS 
Pressure Relieving Solutions

Thermisch aufbereitbar
nach RKI-Richtlinien

Geeignet zur Schmerzlinderung
durch Entlastungslagerung

Einsetzbar bis Grad 4
(nach Prof. Seiler / EPUAP)

Sehr hohes Risiko
(Norton-, Braden-, Waterlow-Scale)

HMV-Nr.
11.29.13.0001

Oberplatte:
ECOLAST®-Foam

Visco-Foam

Mit wasserdampfdurchlässigem
PU-Inkontinenzbezug:

- Abnehmbar
- Waschbar bis 95°C
- Wischdesinfizierbar
- Desinfektionsmittelbeständig*²
- Zur Desinfektion mit Chlor geeignet*²
- Ultraschall verschweißte Nähte
- Reißverschlussüberdeckung

Größe

Höhe	16 cm
Länge	Siehe aktuelle Preisliste
Breite	Siehe aktuelle Preisliste

GREENLINE®

ECOLAST®-Schaum-Technologie:

- Sorgt für eine größere Langlebigkeit
- Weniger CO₂-Emissionen

Hyper AIR® hybrid


Dekubitustherapie-Luftzellen-Matratze

5 JAHRE
GARANTIE

*1

Absenkung zur
Fersenentlastung

Supersoft-Zone zur
Kopfentlastung

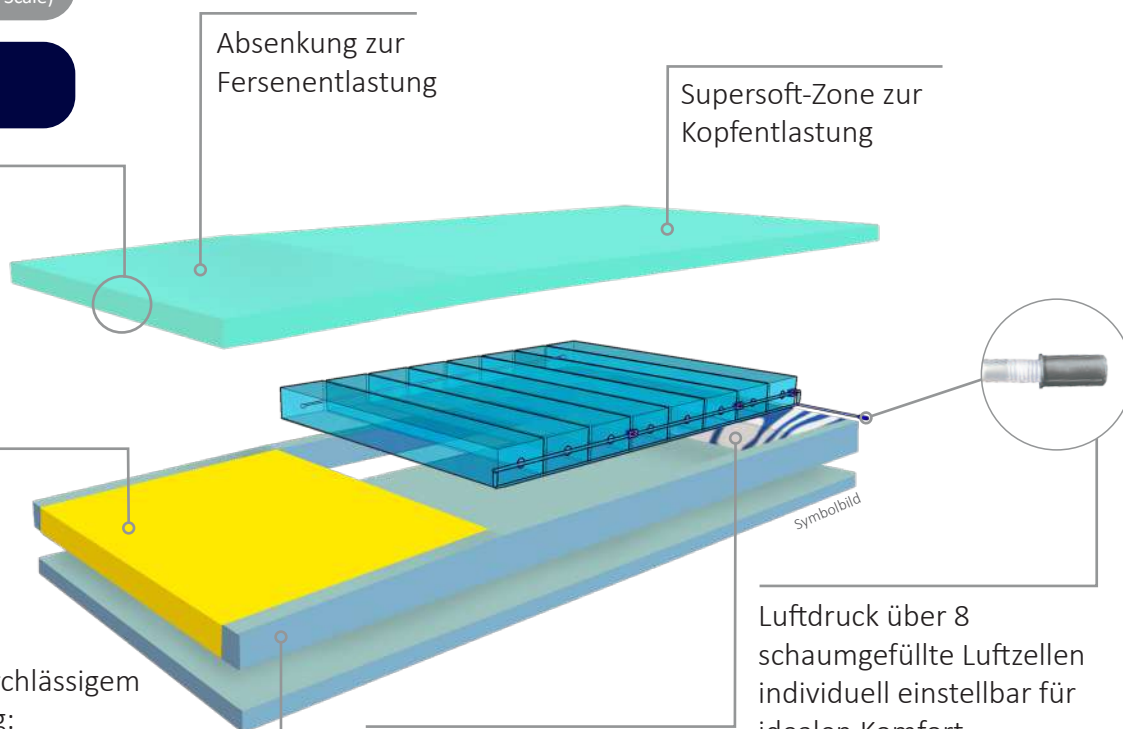

Einzigartige GELTOUCH®-
Technologie mit Cooling-Effekt

Randzonenverstärkung

Luftdruck über 8
schaumgefüllte Luftzellen
individuell einstellbar für
idealen Komfort



Offener poriger
atmungsaktiver
GELTOUCH®-Foam
+ ECOLAST®-Foam
+ Visco-Foam



Autoklavierbar
105°C
221°F



Bezugsmaterial
viren- und
bakterien-tauglich
gem. ASTM
1670 + 1671



Wasserdicht,
dennoch
atmungsaktiv



Druckentlastung
< 18 mmHg



Bi-elastischer
Bezug zur
Minimierung
der Scherkräfte



CE-Kennzeichnung
MDR 2017/745



Wartungsfrei



Schwer
entflammbar
DIN EN 597 (1+2)



Kein Ausfallrisiko
durch
selbstauflasende
FOAM-IN-CELL-
TECHNOLOGIE



NO
RISK



CL



0 –
250 kg

*1 Garantie gilt auf funktionelle Eigenschaften des Matratzenkerns (Pro-Rata-Garantie)!


*2 Details siehe Gebrauchsanweisung.

Hyper AIR® hybrid

- LUFTZELLEN-MATRATZE -



JETZT ANSEHEN
auf YouTube!

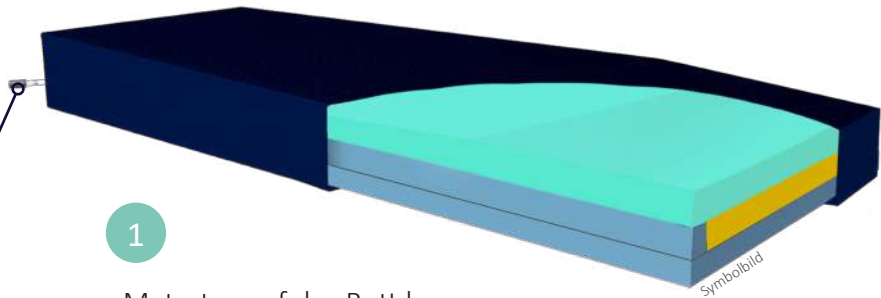

1

Matratze auf das Bett legen.
Bitte beachten Sie den Aufdruck
„THIS SIDE UP“.

2

Ventil durch Ziehen öffnen und
ca. 5 Minuten warten, bis sich
die Luftzellen selbstständig
aufgeblasen haben.

(Ventilkappe kann nicht herunterfallen.)

3

Ventil durch
Drücken schließen.

4

Legen Sie den Patienten auf die
Matratze. Öffnen Sie vorsichtig das
Ventil durch Ziehen der grauen Kappe,
damit Luft entweicht und führen Sie
gleichzeitig einen Fingertest* durch.

5

Ventil durch
Drücken schließen.


6

Tägliche Überprüfung der richtigen
Befüllung der Luftkammern wird
empfohlen, ggf. ist eine Anpassung
notwendig.


*Führen Sie eine Hand unter das Gesäß. Der
optimale Liegekomfort ist erreicht, wenn nur
noch eine geringe Fingerbewegung von
1 – 2,5 cm möglich ist.



MEMOLINE[®]

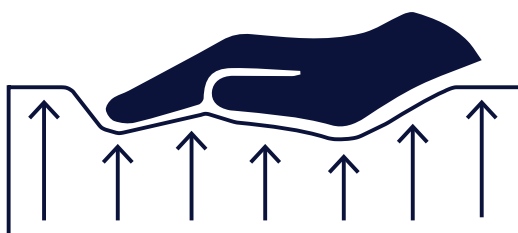

CLINIC CARE/OBJEKTEINRICHTUNG MIT SYSTEM

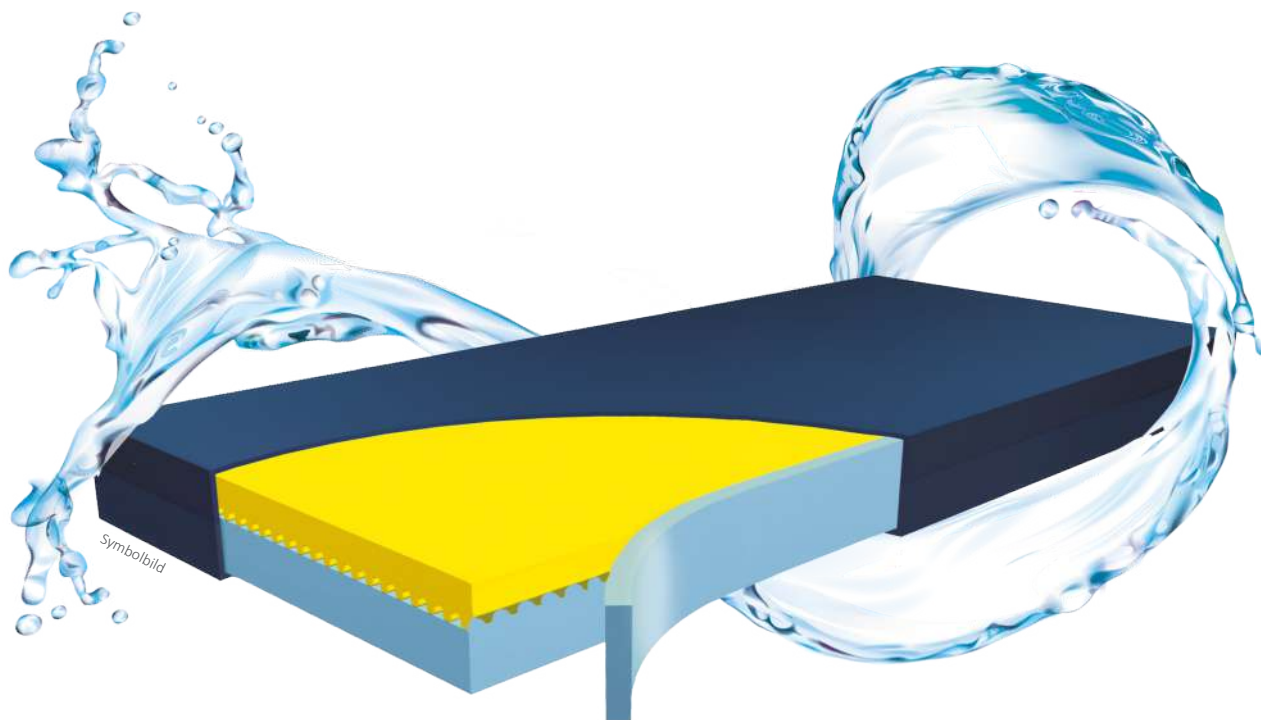

Hyper Foam VISCO^{clinic}

Überreicht durch:

PRS
Pressure Relieving Solutions

Thermisch aufbereitbar
nach RKI-Richtlinien

Geeignet zur Schmerzlinderung
durch Entlastungslagerung

Einsetzbar bis Grad 3
(nach Prof. Seiler / EPUAP)

Mittleres Risiko
(Norton-, Braden-, Waterlow-Skala)

Hyper Foam VISCO^{clinic}

Dekubitustherapie-Matratze

5 JAHRE GARANTIE
*1



Größe


Höhe	14 cm
Länge	Siehe aktuelle Preisliste
Breite	Siehe aktuelle Preisliste



*1 Garantie gilt auf funktionelle Eigenschaften des Matratzenkerns (Pro-Rata-Garantie)!

*2 Details siehe Gebrauchsanweisung.

CLINIC CARE/OBJEKTEINRICHTUNG MIT SYSTEM

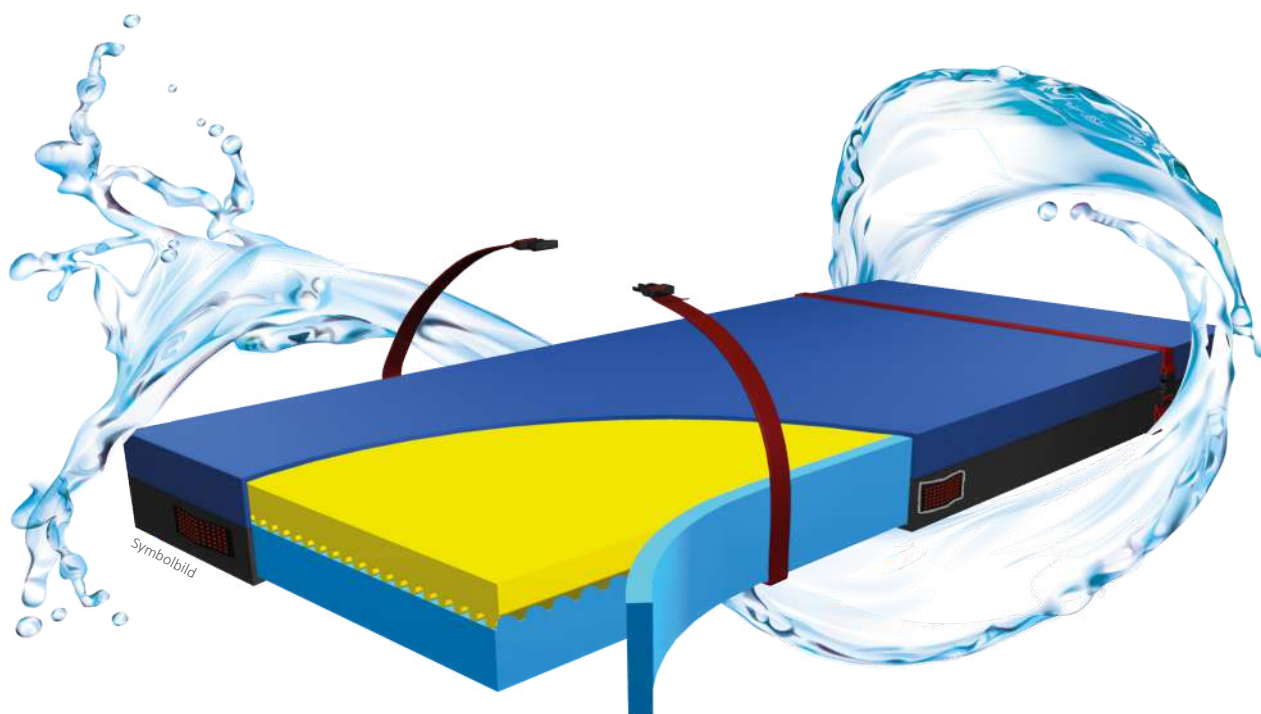

evAQ[®] - PRO VISCO

- Your **all-in-one** solution -

Mehr Informationen über
EVAQ[®] finden Sie auf den
Seiten 35 – 38

Überreicht durch:

PRS
Pressure Relieving Solutions

Thermisch aufbereitbar
nach RKI-Richtlinien

Geeignet zur Schmerzlinderung
durch Entlastungslagerung

Einsetzbar bis Grad 3
(nach Prof. Seiler / EPUAP)

Mittleres Risiko
(Norton-, Braden-, Waterlow-Skala)

evAQ® - PRO VISCO

Dekubitustherapie-Matratze
mit Evakuierungssystem

5 JAHRE
GARANTIE

*1



Größe

Höhe	14 cm
Länge	Siehe aktuelle Preisliste
Breite	Siehe aktuelle Preisliste



Offenporiger
atmungsaktiver
HR-Foam +
Visco-Foam



Autoklavierbar



Bezugsmaterial
viren- und
bakteriendicht
gem. ASTM
1670 + 1671



Wasserdicht
dennoch
atmungsaktiv



Druckentlastung
< 18 mmHg



Bi-elastischer
Bezug zur
Minimierung
der Scherkräfte



CE-Kennzeichnung
MDR 2017/745



Wartungsfrei



Schwer
entflammbar
DIN EN 597 (1+2)



Max. 5000 ppm



Patientengewicht:
0 bis 140 kg



Evakuierungs-
funktion

*1 Garantie gilt auf funktionelle Eigenschaften des Matratzenkerns (Pro-Rata-Garantie)!

*2 Details siehe Gebrauchsanweisung.




DEKUBITUSTHERAPIE – SITZKISSEN





Dekubitustherapie-Sitzkissen

XAIR[®] hybrid

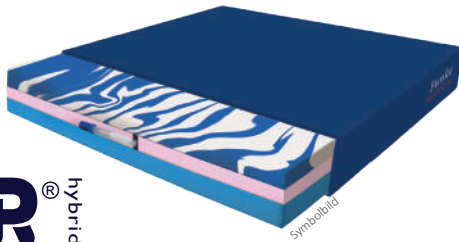

4 Zur Dekubitusprophylaxe und -therapie bis Grad 4 einsetzbar (EPUAP)

RISK Sehr hohes Risiko
(Norton-, Braden-, Waterlow-Skala)

✓ HMV-Nr. 11.39.03.9001

XSEAT[®]



4 Zur Dekubitusprophylaxe und -therapie bis Grad 4 einsetzbar (EPUAP)

RISK Sehr hohes Risiko
(Norton-, Braden-, Waterlow-Skala)

✓ HMV-Nr. 11.39.01.1036

XSEAT[®] clinic




4 Zur Dekubitusprophylaxe und -therapie bis Grad 4 einsetzbar (EPUAP)

RISK Sehr hohes Risiko
(Norton-, Braden-, Waterlow-Skala)

Bezug einfach zu desinfizieren

XSEAT[®] light

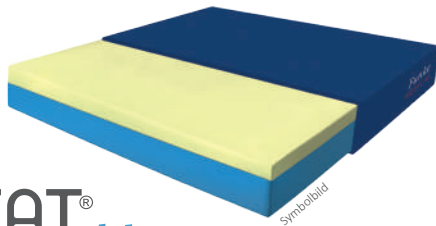

Zur Dekubitusprophylaxe

Bezug einfach zu desinfizieren

GEL[®] SEAT




4 Zur Dekubitusprophylaxe und -therapie bis Grad 4 einsetzbar (EPUAP)

RISK Sehr hohes Risiko
(Norton-, Braden-, Waterlow-Skala)

✓ HMV-Nr. 11.39.02.1020

GEL[®] SEAT
-COMBI-

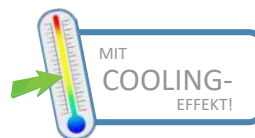

GEL[®] SEAT
clinic



4 Zur Dekubitusprophylaxe und -therapie bis Grad 4 einsetzbar (EPUAP)

RISK Sehr hohes Risiko
(Norton-, Braden-, Waterlow-Skala)

✓ HMV-Nr. 11.39.02.3006

4 Zur Dekubitusprophylaxe und -therapie bis Grad 4 einsetzbar (EPUAP)

RISK Sehr hohes Risiko
(Norton-, Braden-, Waterlow-Skala)

Bezug einfach zu desinfizieren



Funke Medical GmbH ist Sponsoring-Partner der deutschen Rollstuhlbasketball A-Nationalmannschaften

Am 17.11.2014 unterschrieben für die Funke Medical GmbH Patricia Funke und Helmut Wessels und für den Deutschen Rollstuhl-Sportverband e.V., Fachbereich Rollstuhlbasketball - A-Nationalmannschaften Herren und Damen-, Andreas Joneck, einen Sponsoringvertrag.

diesen als authentischen Werbepartner zu gewinnen.“, so Patricia Funke und Helmut Wessels (Vorstände für Marketing und Sales).

„Wir wollen zusammen mit dem Rollstuhl-Sportverband e.V. eine Partnerschaft leben, von der beide Seiten profitieren. Von daher wollen wir weiter an der Popularität des Sportes und der Herausstellung der technischen Möglichkeiten für gehbehinderte Menschen arbeiten.“, ergänzt Helmut Wessels.

„Es war für uns nur eine logische Konsequenz den Kontakt zum Rollstuhlbasketball zu suchen, um



Die Damen gewannen das Endspiel souverän und wurden somit verdient Europameister.

Nationalspielerin im Rollstuhlbasketball Annabel Breuer ist unser Werbegesicht für die von der Funke Medical GmbH entwickelten Sitzkissen XSEAT® und GELSEAT®.



Annabel Breuer
Nationalspielerin
Rollstuhlbasketball-


Official sponsor



- 2010: Silber Weltmeisterschaft (Birmingham, GB)
- 2011: Gold Europameisterschaft (Nazareth, IL)
- 2012: Gold Sommer-Paralympics (London, GB)
- 2013: Silber Europameisterschaft (Frankfurt, DE)
- 2014: Silber Weltmeisterschaft (Toronto, CA)
- 2015: Gold Europameisterschaft (Worcester, GB)
- 2016: Silber Sommer-Paralympics (Rio de Janeiro, BR)
- 2017: Silber Europameisterschaft (Teneriffa, ES)
- 2018: Bronze Weltmeisterschaft (Hamburg, DE)
- 2019: Bronze Europameisterschaft (Rotterdam, NL)



DEKUBITUSTHERAPIE MIT SYSTEM

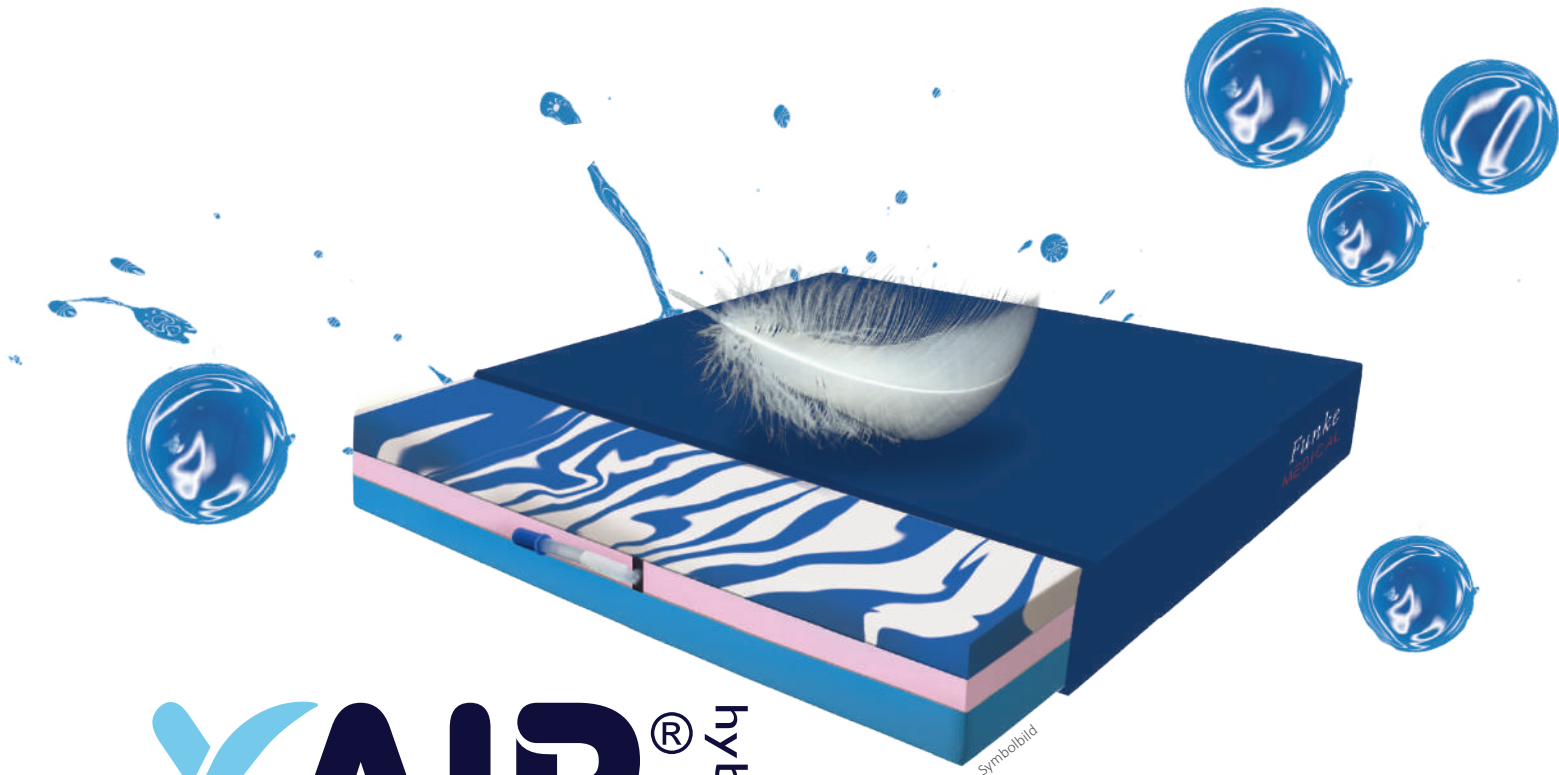

XAIR[®] hybrid

- LUFTZELLEN-SITZKISSEN -
Für aktive Rollstuhlfahrer!



HILFSMITTELNUMMER
11.39.03.9001



Annabel Breuer
Nationalspielerin
Rollstuhlbasketball-

Überreicht durch:

Official sponsor



2010: Silber Weltmeisterschaft (Birmingham, GB)
2011: Gold Europameisterschaft (Nazareth, IL)
2012: Gold Sommer-Paralympics (London, GB)
2013: Silber Europameisterschaft (Frankfurt, DE)
2014: Silber Weltmeisterschaft (Toronto, CA)
2015: Gold Europameisterschaft (Worcester, GB)
2016: Silber Sommer-Paralympics (Rio de Janeiro, BR)
2017: Silber Europameisterschaft (Teneriffa, ES)
2018: Bronze Weltmeisterschaft (Hamburg, DE)
2019: Bronze Europameisterschaft (Rotterdam, NL)

Thermisch aufbereitbar
nach RKI-Richtlinien

Einsetzbar bis Grad 4
(nach Prof. Seiler/EPUAP)

Sehr hohes Risiko
(Norton-, Braden-, Waterlow-Skala)

HMV-Nr.
11.39.03.9001

XAIR® hybrid

Dekubitustherapie-Luftzellen-Sitzkissen

für aktive Rollstuhlfahrer!

3 JAHRE GARANTIE *


Bezug:

- Abnehmbar
- Waschbar bis 60°C

Mesh³-Gewebe zur Klimaregulierung

Wasserdichter und dennoch
atmungsaktiver Bezug

Individuell einstellbar
durch Ventil
(Einhandbedienung)

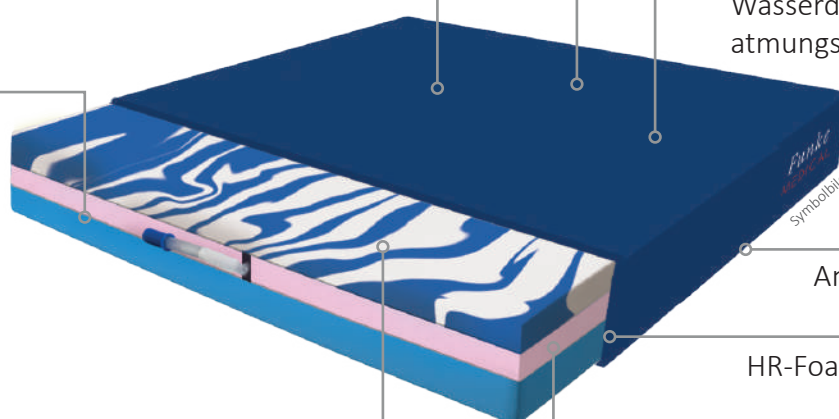

Anti-Slip-Unterseite

HR-Foam

Einzigartige Geltouch®-
Technologie mit Cooling-Effekt

Hyperelastischer 3-schichtiger
Schaumkern: Oberplatte aus
Geltouch®-Foam

Größe

Art. - Nr.

Breite x Tiefe x Höhe

38 x 40 x 8	XAIR3840
40 x 40 x 8	XAIR4040
40 x 42 x 8	XAIR4042
41 x 46 x 8	XAIR4146
42 x 40 x 8	XAIR4240
42 x 42 x 8	XAIR4242
42 x 44 x 8	XAIR4244
42 x 46 x 8	XAIR4246
42 x 52 x 8	XAIR4252
45 x 42 x 8	XAIR4542


Größe

Art. - Nr.

Breite x Tiefe x Höhe

45 x 44 x 8	XAIR4544
45 x 46 x 8	XAIR4546
46 x 51 x 8	XAIR4651
48 x 42 x 8	XAIR4842
48 x 44 x 8	XAIR4844
48 x 46 x 8	XAIR4846
50 x 42 x 8	XAIR5042
51 x 44 x 8	XAIR5144
51 x 46 x 8	XAIR5146
52 x 52 x 8	XAIR5252

JETZT ANSEHEN
auf YouTube!

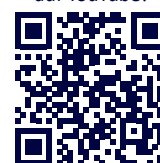

XAIR® hybrid-Film



Offenporiger
atmungsaktiver
Geltouch®-Foam
+ HR-Foam
+ Visco-Foam



Autoklavierbar




Bezugsmaterial
viren- und
bakteriendicht
gem. ASTM
1670 + 1671



Wasserdicht
dennoch
atmungsaktiv



Optimierte
Druckentlastung

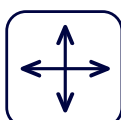

Bi-elastischer
Bezug zur
Minimierung
der Scherkräfte




CE - Kennzeichnung
MDR 2017/745



Wartungsfrei



Schwer
entflammbar
DIN EN 597 (1+2)

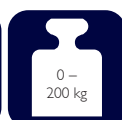

Patientengewicht:
0 bis 200 kg



Sehr leicht

* Garantie gilt auf funktionelle Eigenschaften des Kissenkerns (Pro-Rata-Garantie)!



JETZT ANSEHEN
auf YouTube!



Symbolbild


Griff für den
einfachen Transport

Weiche Schutzabdeckung
mit Klettverschluss




1

Schutzabdeckung nach
oben klappen.

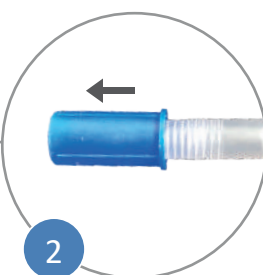

2

Ventil durch Ziehen öffnen und
ca. 30 Sekunden warten, bis sich
die Luftkissen selbstständig
aufgeblasen haben.
(Ventilkappe kann nicht herunterfallen.)

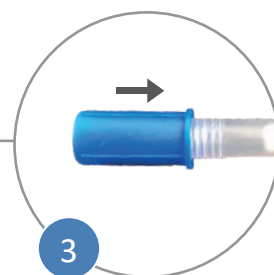

3

Ventil durch
Drücken schließen.




4

Kissen auf die Sitzfläche des
Rollstuhles oder Sitzes legen.


(Der Haltegriff muss nach vorne und die darauf
angebrachten Pfeile müssen nach oben zeigen.)

Auf das Kissen setzen.

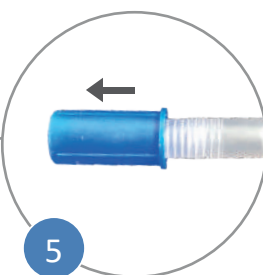

5

Vorsichtig das Ventil
wieder öffnen bis der ideale
Sitzkomfort erreicht ist.

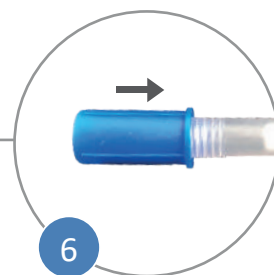


6


Ventil wieder schließen.
Danach die Schutzabdeckung
wieder nach unten klappen.

Viscoschaum-Zelle
zur Entlastung des
Kreuzbeins

Gelschaum-Zellen
zur Entlastung
der Sitzbeinhöcker

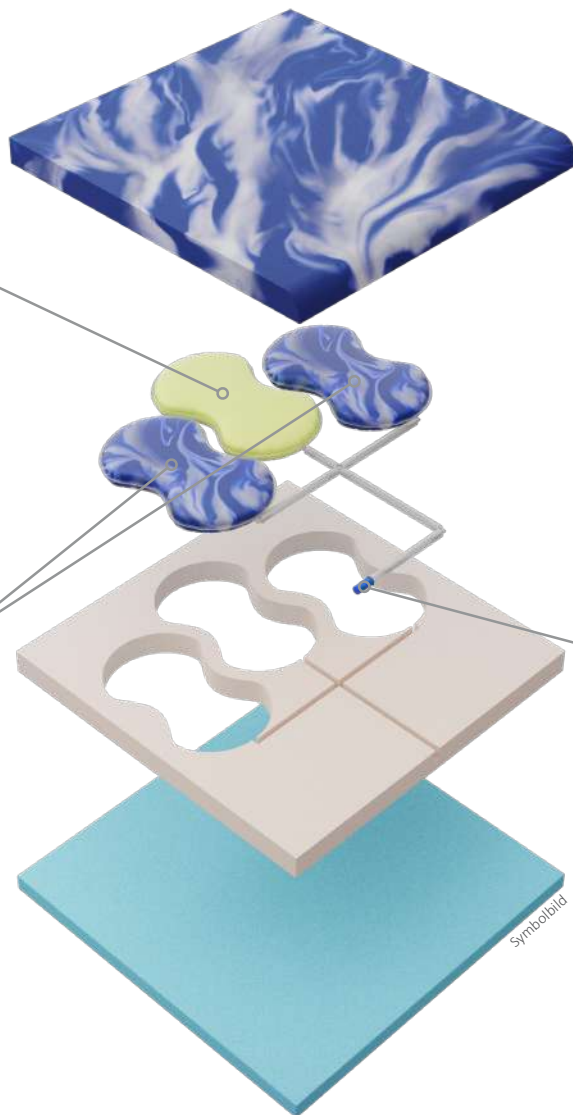

Einhandventil ermöglicht
leichtes Öffnen und Schließen
(Ventilkappe kann beim Öffnen
nicht herunterfallen)

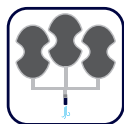

3-Kammer-Sitzkissen
sorgt für eine optimale
Druckentlastung



Individuell einstellbar
für idealen Sitzkomfort



Keine Pumpe oder andere
Werkzeuge notwendig



Schnelle und einfache
Anpassung an die äußeren
Druckverhältnisse




Kein Ausfallrisiko durch
selbstaufblasende FOAM-
IN-CELL-TECHNOLOGIE



Sehr leicht –
70 % weniger Gewicht als
herkömmliche Luftzellen-Sitzkissen

DEKUBITUSTHERAPIE MIT SYSTEM

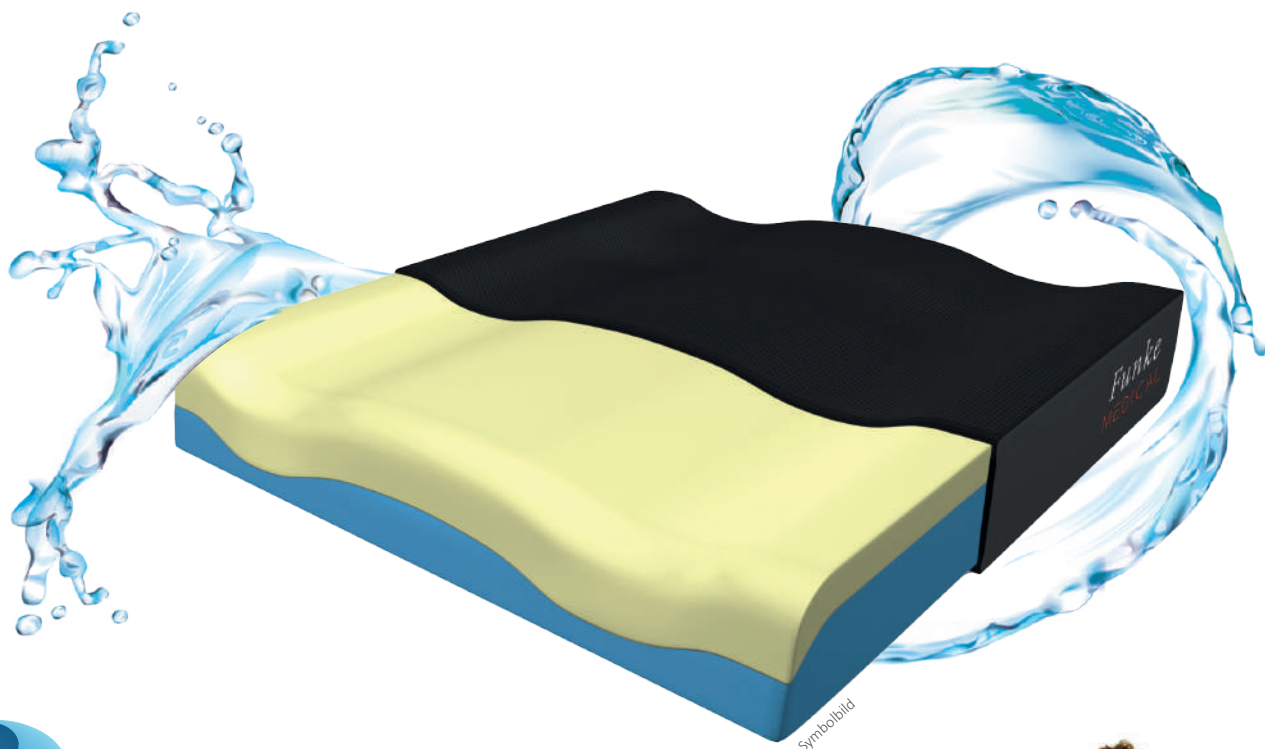

XSEAT®
- SITZKISSEN -



HILFSMITTELNUMMER
11.39.01.1036



Annabel Breuer
Nationalspielerin
Rollstuhlbasketball-

Überreicht durch:

Official sponsor



2010: Silber Weltmeisterschaft (Birmingham, GB)
2011: Gold Europameisterschaft (Nazareth, IL)
2012: Gold Sommer-Paralympics (London, GB)
2013: Silber Europameisterschaft (Frankfurt, DE)
2014: Silber Weltmeisterschaft (Toronto, CA)
2015: Gold Europameisterschaft (Worcester, GB)
2016: Silber Sommer-Paralympics (Rio de Janeiro, BR)
2017: Silber Europameisterschaft (Teneriffa, ES)
2018: Bronze Weltmeisterschaft (Hamburg, DE)
2019: Bronze Europameisterschaft (Rotterdam, NL)

Thermisch aufbereitbar
nach RKI-Richtlinien

Einsetzbar bis Grad 4
(nach Prof. Seiler / EPUAP)

Sehr hohes Risiko
(Norton-, Braden-, Waterlow-Skala)

HMV-Nr.
11.39.01.1036

XSEAT®

Dekubitustherapie-Sitzkissen

**3 JAHRE
GARANTIE**



Größe	Art. - Nr.
Breite x Tiefe x Höhe	
38 x 40 x 8	X-SEAT3840* ¹
40 x 40 x 8	X-SEAT4040
40 x 42 x 8	X-SEAT4042* ¹
41 x 46 x 8	X-SEAT4146
42 x 40 x 8	X-SEAT4240
42 x 42 x 8	X-SEAT4242* ¹
42 x 44 x 8	X-SEAT4244* ¹
42 x 46 x 8	X-SEAT4246
42 x 52 x 8	X-SEAT4252
45 x 42 x 8	X-SEAT4542* ¹

Größe	Art. - Nr.
Breite x Tiefe x Höhe	
45 x 44 x 8	X-SEAT4544* ¹
45 x 46 x 8	X-SEAT4546* ¹
46 x 51 x 8	X-SEAT4651
48 x 42 x 8	X-SEAT4842* ¹
48 x 44 x 8	X-SEAT4844* ¹
48 x 46 x 8	X-SEAT4846* ¹
50 x 42 x 8	X-SEAT5042
51 x 44 x 8	X-SEAT5144* ¹
51 x 46 x 8	X-SEAT5146* ¹
52 x 52 x 8	X-SEAT5252



Offenporiger
atmungsaktiver
HR-Foam +
Visco-Foam



Autoklavierbar




Bezugsmaterial
viren- und
bakteriendicht
gem. ASTM
1670 + 1671



Wasserdicht
dennoch
atmungsaktiv



Optimierte
Druckentlastung

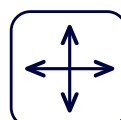

Bi-elastischer
Bezug zur
Minimierung
der Scherkräfte



CE - Kennzeichnung
MDR 2017/745



Wartungsfrei



Schwer
entflammbar
DIN EN 597 (1+2)



Patientengewicht:
20 bis 120 kg

* Garantie gilt auf funktionelle Eigenschaften des Kissenkerns (Pro-Rata-Garantie)!



DEKUBITUSTHERAPIE MIT SYSTEM



Überreicht durch:

Official sponsor



A Breuer
Annabel Breuer
Nationalspielerin
Rollstuhlbasketball

- 2010: Silber Weltmeisterschaft (Birmingham, GB)
- 2011: Gold Europameisterschaft (Nazareth, IL)
- 2012: Gold Sommer-Paralympics (London, GB)
- 2013: Silber Europameisterschaft (Frankfurt, DE)
- 2014: Silber Weltmeisterschaft (Toronto, CA)
- 2015: Gold Europameisterschaft (Worcester, GB)
- 2016: Silber Sommer-Paralympics (Rio de Janeiro, BR)
- 2017: Silber Europameisterschaft (Teneriffa, ES)
- 2018: Bronze Weltmeisterschaft (Hamburg, DE)
- 2019: Bronze Europameisterschaft (Rotterdam, NL)

Thermisch aufbereitbar
nach RKI-Richtlinien

Einsetzbar bis Grad 4
(nach Prof. Seiler / EPUAP)

Sehr hohes Risiko
(Norton-, Braden-, Waterlow-Skala)


Bezug einfach zu desinfizieren

XSEAT[®]
clinic

Dekubitustherapie-Sitzkissen

3 JAHRE
GARANTIE

*1

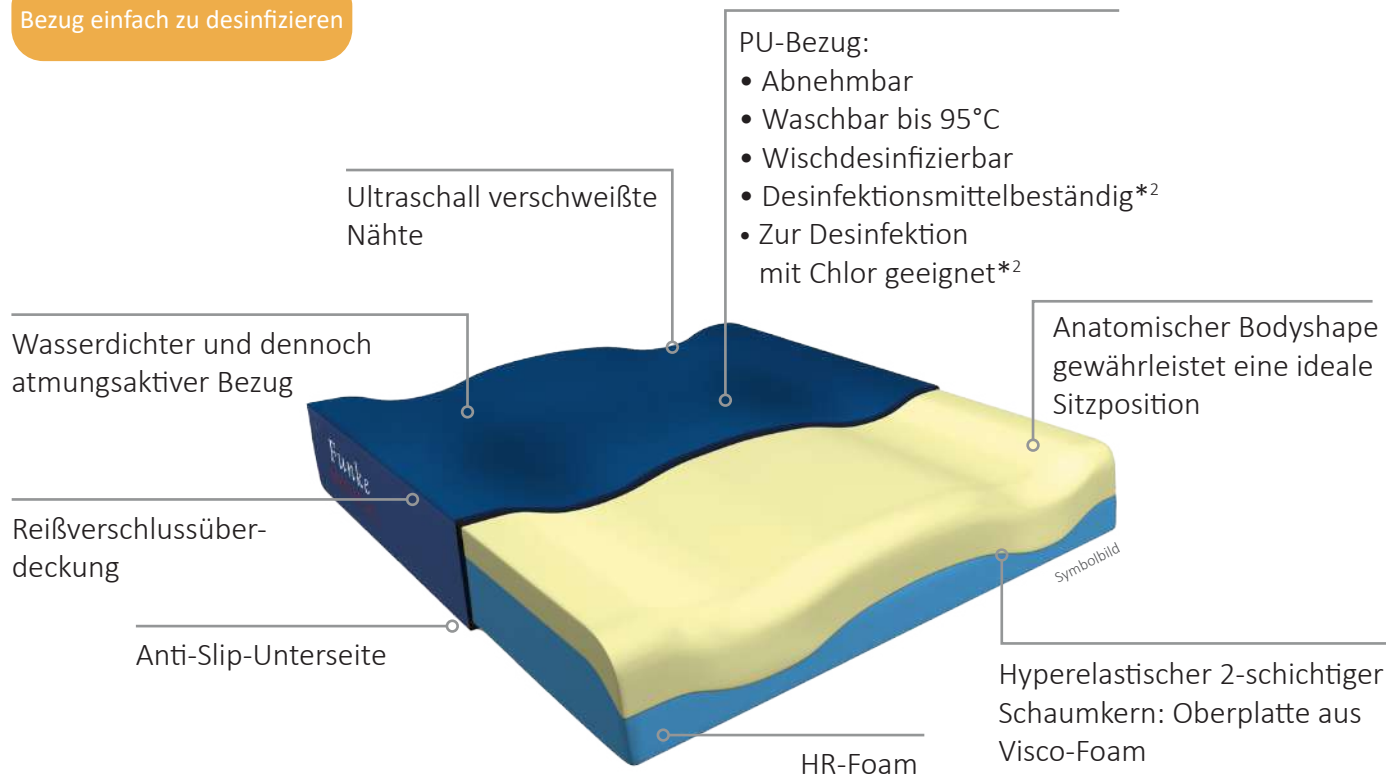


Größe	Art. - Nr.	Größe	Art. - Nr.
Breite x Tiefe x Höhe		Breite x Tiefe x Höhe	
38 x 40 x 8	X-SEATCL3840	45 x 44 x 8	X-SEATCL4544
40 x 40 x 8	X-SEATCL4040	45 x 46 x 8	X-SEATCL4546
40 x 42 x 8	X-SEATCL4042	46 x 51 x 8	X-SEATCL4651
41 x 46 x 8	X-SEATCL4146	48 x 42 x 8	X-SEATCL4842
42 x 40 x 8	X-SEATCL4240	48 x 44 x 8	X-SEATCL4844
42 x 42 x 8	X-SEATCL4242	48 x 46 x 8	X-SEATCL4846
42 x 44 x 8	X-SEATCL4244	50 x 42 x 8	X-SEATCL5042
42 x 46 x 8	X-SEATCL4246	51 x 44 x 8	X-SEATCL5144
42 x 52 x 8	X-SEATCL4252	51 x 46 x 8	X-SEATCL5146
45 x 42 x 8	X-SEATCL4542	52 x 52 x 8	X-SEATCL5252



*1 Garantie gilt auf funktionelle Eigenschaften des Kissenkerns (Pro-Rata-Garantie)!

*2 Details siehe Gebrauchsanweisung.

DEKUBITUSTHERAPIE MIT SYSTEM

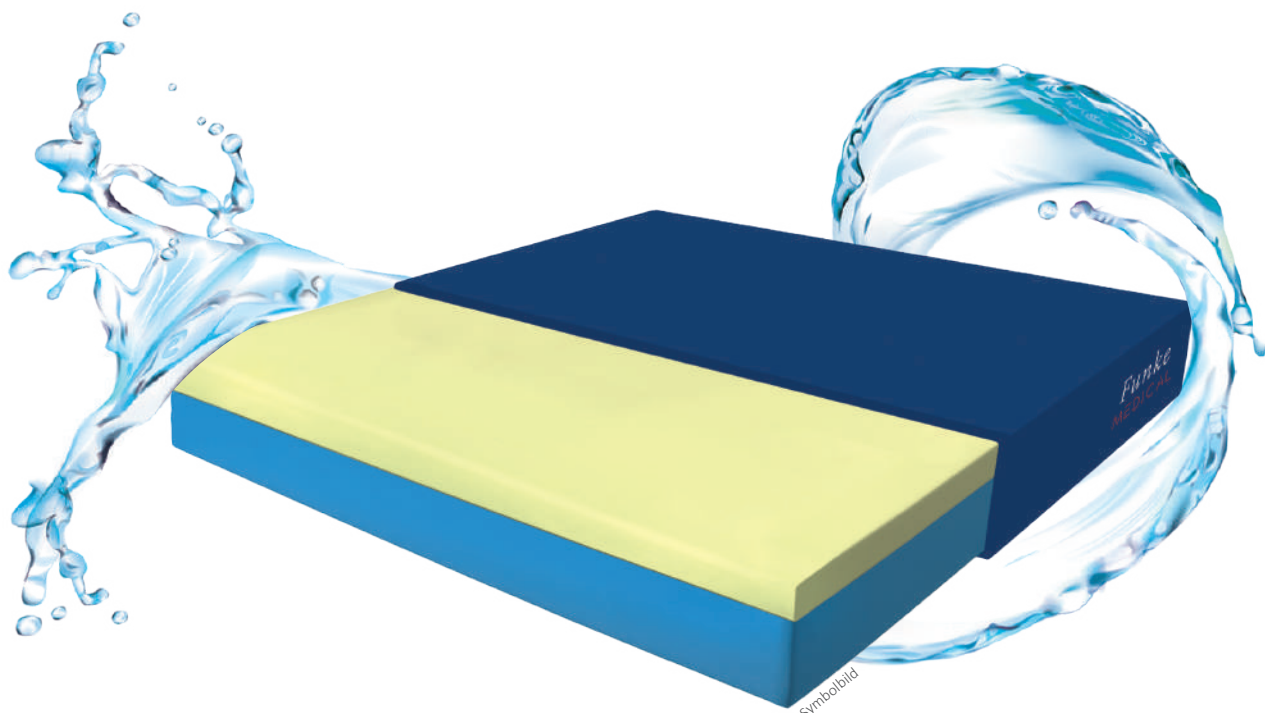

XSEAT®
light

- SITZKISSEN -

Überreicht durch:

Official sponsor



2010: Silber Weltmeisterschaft (Birmingham, GB)
2011: Gold Europameisterschaft (Nazareth, IL)
2012: Gold Sommer-Paralympics (London, GB)
2013: Silber Europameisterschaft (Frankfurt, DE)
2014: Silber Weltmeisterschaft (Toronto, CA)
2015: Gold Europameisterschaft (Worcester, GB)
2016: Silber Sommer-Paralympics (Rio de Janeiro, BR)
2017: Silber Europameisterschaft (Teneriffa, ES)
2018: Bronze Weltmeisterschaft (Hamburg, DE)
2019: Bronze Europameisterschaft (Rotterdam, NL)

A Breuer
Annabel Breuer
Nationalspielerin
Rollstuhlbasketball-



Thermisch aufbereitbar
nach RKI-Richtlinien

Zur Dekubitusprophylaxe

Bezug einfach zu desinfizieren

XSEAT[®]
light

Dekubitusprophylaxe-Sitzkissen


1 JAHR
GARANTIE

*1

Wasserdichter und dennoch
atmungsaktiver Bezug

PU-Bezug:

- Abnehmbar
- Waschbar bis 95°C
- Wischdesinfizierbar
- Desinfektionsmittelbeständig*²

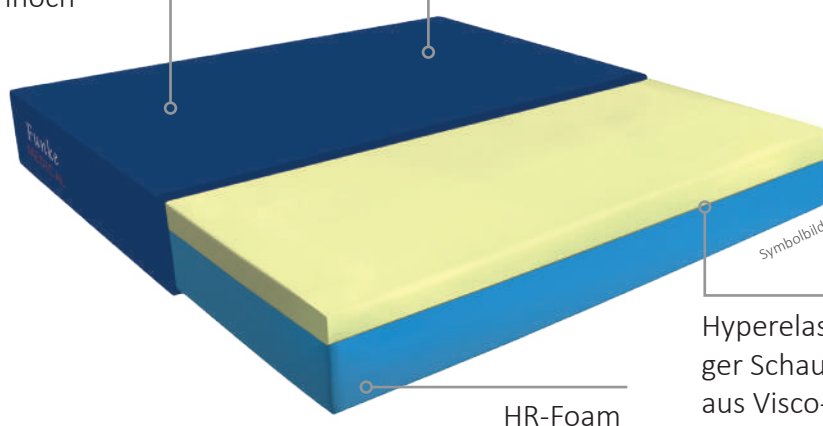

Hyperelastischer 2-schichtiger
Schaumkern: Oberplatte
aus Visco-Foam

Größe	Art. - Nr.
Breite x Tiefe x Höhe	
38 x 40 x 5	X-SEATL3840
40 x 40 x 5	X-SEATL4040
40 x 42 x 5	X-SEATL4042
41 x 46 x 5	X-SEATL4146
42 x 40 x 5	X-SEATL4240
42 x 42 x 5	X-SEATL4242
42 x 44 x 5	X-SEATL4244
42 x 46 x 5	X-SEATL4246
42 x 52 x 5	X-SEATL4252
45 x 42 x 5	X-SEATL4542

Größe	Art. - Nr.
Breite x Tiefe x Höhe	
45 x 44 x 5	X-SEATL4544
45 x 46 x 5	X-SEATL4546
46 x 51 x 5	X-SEATL4651
48 x 42 x 5	X-SEATL4842
48 x 44 x 5	X-SEATL4844
48 x 46 x 5	X-SEATL4846
50 x 42 x 5	X-SEATL5042
51 x 44 x 5	X-SEATL5144
51 x 46 x 5	X-SEATL5146
52 x 52 x 5	X-SEATL5252



Offenporiger
atmungsaktiver
HR-Foam +
Visco-Foam




Autoklavierbar



Bezugsmaterial
viren- und
bakteriendicht
gem. ASTM
1670 + 1671



Wasserdicht
dennoch
atmungsaktiv

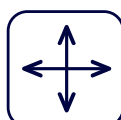

Bi-elastischer
Bezug zur
Minimierung
der Scherkräfte



CE-Kennzeichnung
MDR 2017/745



Wartungsfrei



Schwer
entflammbar
DIN EN 597 (1+2)



Patientengewicht:
20 bis 120 kg

*1 Garantie gilt auf funktionelle Eigenschaften des Kissenkerns (Pro-Rata-Garantie)!

*2 Details siehe Gebrauchsanweisung.



DEKUBITUSTHERAPIE MIT SYSTEM



MIT
COOLING-
EFFEKT!

GEL SEAT®

- SITZKISSEN -



HILFSMITTELNUMMER
11.39.02.1020

Überreicht durch:

Official sponsor



2010: Silber Weltmeisterschaft (Birmingham, GB)
2011: Gold Europameisterschaft (Nazareth, IL)
2012: Gold Sommer-Paralympics (London, GB)
2013: Silber Europameisterschaft (Frankfurt, DE)
2014: Silber Weltmeisterschaft (Toronto, CA)
2015: Gold Europameisterschaft (Worcester, GB)
2016: Silber Sommer-Paralympics (Rio de Janeiro, BR)
2017: Silber Europameisterschaft (Teneriffa, ES)
2018: Bronze Weltmeisterschaft (Hamburg, DE)
2019: Bronze Europameisterschaft (Rotterdam, NL)

A Breuer
Annabel Breuer
Nationalspielerin
Rollstuhlbasketball-



Thermisch aufbereitbar
nach RKI-Richtlinien

Einsetzbar bis Grad 4
(nach Prof. Seiler/EPUAP)

Sehr hohes Risiko
(Norton-, Braden-, Waterlow-Skala)

HMV-Nr.
11.39.02.1020

GEL SEAT®

Dekubitustherapie-Sitzkissen

3 JAHRE
GARANTIE *


Einzigartige
GELTOUCH®- Technologie
mit Cooling-Effekt

Gelpad:

- Optimal zentriert zur maximalen Entlastung der Sitzbeinhöcker
- Zur Stoßdämpfung
- Verminderung der Scherkräfte

Bezug:

- Abnehmbar
- Waschbar bis 60°C
- Ultraschall verschweißte Nähte an der Oberseite
- Wasserdicht dennoch atmungsaktiv
- Mesh³-Gewebe zur Klimaregulierung
- Anti-Slip-Unterseite

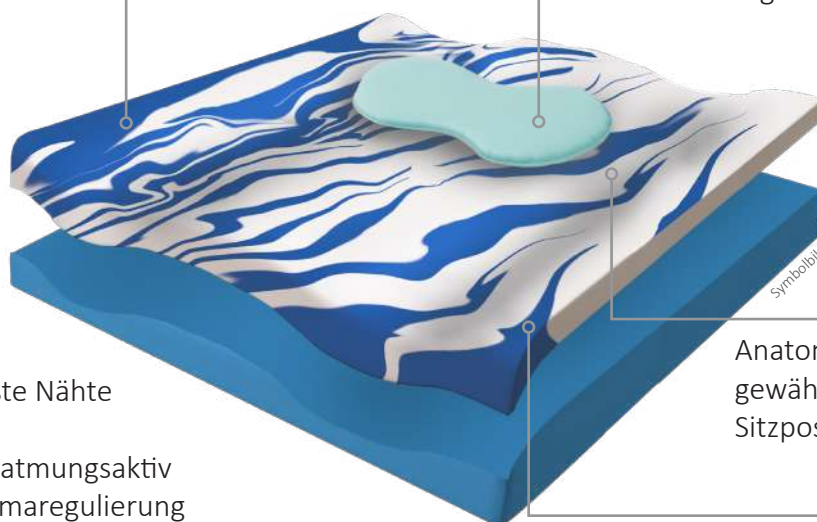

Anatomischer Bodyshape
gewährleistet eine ideale
Sitzposition

Hyperelastischer 2-schichtiger
Schaumkern: Oberplatte aus
GELTOUCH®-Foam

Größe	Art. - Nr.
Breite x Tiefe x Höhe	
38 x 40 x 8	G-SEAT3840
40 x 40 x 8	G-SEAT4040
40 x 42 x 8	G-SEAT4042
41 x 46 x 8	G-SEAT4146
42 x 40 x 8	G-SEAT4240
42 x 42 x 8	G-SEAT4242
42 x 44 x 8	G-SEAT4244
42 x 46 x 8	G-SEAT4246
42 x 52 x 8	G-SEAT4252
45 x 42 x 8	G-SEAT4542

Größe	Art. - Nr.
Breite x Tiefe x Höhe	
45 x 44 x 8	G-SEAT4544
45 x 46 x 8	G-SEAT4546
46 x 51 x 8	G-SEAT4651
48 x 42 x 8	G-SEAT4842
48 x 44 x 8	G-SEAT4844
48 x 46 x 8	G-SEAT4846
50 x 42 x 8	G-SEAT5042
51 x 44 x 8	G-SEAT5144
51 x 46 x 8	G-SEAT5146
52 x 52 x 8	G-SEAT5252

JETZT ANSEHEN
auf YouTube!



GELSEAT®-Film



Offenporiger
atmungsaktiver
Geltouch®-Foam
+ HR-Foam



Autoklavierbar




Bezugsmaterial
viren- und
bakteriendicht
gem. ASTM
1670 + 1671



Wasserdicht
dennoch
atmungsaktiv



Optimierte
Druckentlastung

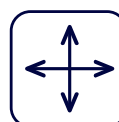

Bi-elastischer
Bezug zur
Minimierung
der Scherkräfte



CE - Kennzeichnung
MDR 2017/745



Wartungsfrei




Schwer
entflammbar
DIN EN 597 (1+2)



Patientengewicht:
20 bis 120 kg

* Garantie gilt auf funktionelle Eigenschaften des Kissenkerns (Pro-Rata-Garantie)!

DEKUBITUSTHERAPIE MIT SYSTEM

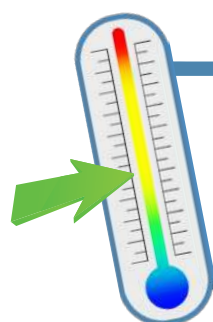

MIT
COOLING-
EFFEKT!

GEL[®] SEAT

— COMBI —

- SITZKISSEN -



HILFSMITTELNUMMER
11.39.02.3006

Überreicht durch:

Official sponsor



2010: Silber Weltmeisterschaft (Birmingham, GB)
2011: Gold Europameisterschaft (Nazareth, IL)
2012: Gold Sommer-Paralympics (London, GB)
2013: Silber Europameisterschaft (Frankfurt, DE)
2014: Silber Weltmeisterschaft (Toronto, CA)
2015: Gold Europameisterschaft (Worcester, GB)
2016: Silber Sommer-Paralympics (Rio de Janeiro, BR)
2017: Silber Europameisterschaft (Teneriffa, ES)
2018: Bronze Weltmeisterschaft (Hamburg, DE)
2019: Bronze Europameisterschaft (Rotterdam, NL)

A Breuer
Annabel Breuer
Nationalspielerin
-Rollstuhlbasketball-



Thermisch aufbereitbar
nach RKI-Richtlinien

Einsetzbar bis Grad 4
(nach Prof. Seiler/EPUAP)

Sehr hohes Risiko
(Norton-, Braden-, Waterlow-Skala)

HMV-Nr.
11.39.02.3006

GEL SEAT

— COMBI —


Dekubitustherapie-Sitzkissen

3 JAHRE
GARANTIE *

Bezug:

- Abnehmbar
- Waschbar bis 60°C
- Ultraschall verschweißte Nähte an der Oberseite
- Wasserdicht dennoch atmungsaktiv
- Mesh³-Gewebe zur Klimaregulierung
- Anti-Slip-Unterseite

Oberplatte aus
GELTOUCH®-Foam
mit Cooling-Effekt

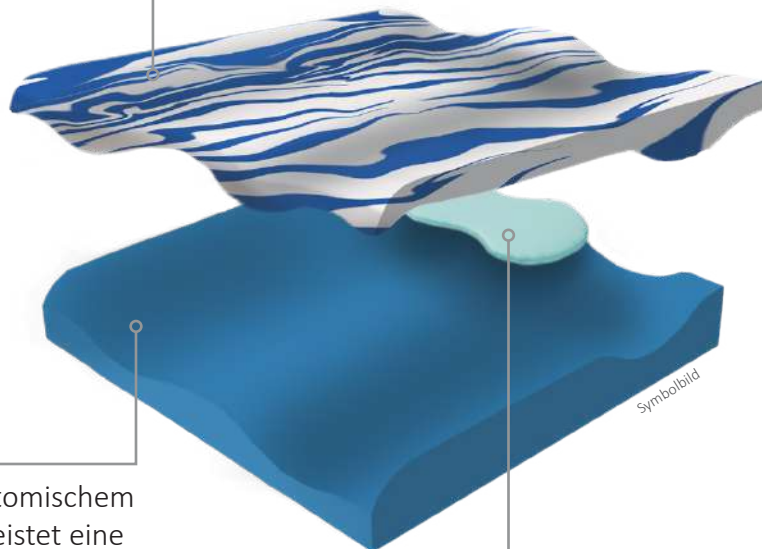

Unterplatte mit anatomischem
Bodyshape gewährleistet eine
ideale Sitzposition

Gelpad:

- Optimal zentriert zur maximalen Entlastung der Sitzbeinhöcker
- Zur Stoßdämpfung
- Verminderung der Scherkräfte

Größe	Art. - Nr.
Breite x Tiefe x Höhe	
38 x 40 x 8	GC-SEAT3840
40 x 40 x 8	GC-SEAT4040
40 x 42 x 8	GC-SEAT4042
41 x 46 x 8	GC-SEAT4146
42 x 40 x 8	GC-SEAT4240
42 x 42 x 8	GC-SEAT4242
42 x 44 x 8	GC-SEAT4244
42 x 46 x 8	GC-SEAT4246
42 x 52 x 8	GC-SEAT4252
45 x 42 x 8	GC-SEAT4542


Größe	Art. - Nr.
Breite x Tiefe x Höhe	
45 x 44 x 8	GC-SEAT4544
45 x 46 x 8	GC-SEAT4546
46 x 51 x 8	GC-SEAT4651
48 x 42 x 8	GC-SEAT4842
48 x 44 x 8	GC-SEAT4844
48 x 46 x 8	GC-SEAT4846
50 x 42 x 8	GC-SEAT5042
51 x 44 x 8	GC-SEAT5144
51 x 46 x 8	GC-SEAT5146
52 x 52 x 8	GC-SEAT5252



Offenporiger
atmungsaktiver
Geltouch®-Foam
+ HR-Foam



Autoklavierbar

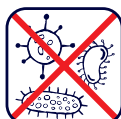


Bezugsmaterial
viren- und
bakteriendicht
gem. ASTM
1670 + 1671



Wasserdicht
dennoch
atmungsaktiv



Optimierte
Druckentlastung

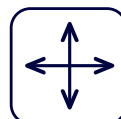

Bi-elastischer
Bezug zur
Minimierung
der Scherkräfte



CE - Kennzeichnung
MDR 2017/745



Wartungsfrei



Schwer
entflammbar
DIN EN 597 (1+2)




Patientengewicht:
20 bis 120 kg

* Garantie gilt auf funktionelle Eigenschaften des Kissenkerns (Pro-Rata-Garantie)!



DEKUBITUSTHERAPIE MIT SYSTEM

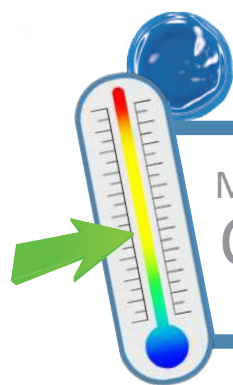

MIT
COOLING-
EFFEKT!

GEL SEAT[®]
clinic

- SITZKISSEN -

Überreicht durch:

Official sponsor



2010: Silber Weltmeisterschaft (Birmingham, GB)
2011: Gold Europameisterschaft (Nazareth, IL)
2012: Gold Sommer-Paralympics (London, GB)
2013: Silber Europameisterschaft (Frankfurt, DE)
2014: Silber Weltmeisterschaft (Toronto, CA)
2015: Gold Europameisterschaft (Worcester, GB)
2016: Silber Sommer-Paralympics (Rio de Janeiro, BR)
2017: Silber Europameisterschaft (Teneriffa, ES)
2018: Bronze Weltmeisterschaft (Hamburg, DE)
2019: Bronze Europameisterschaft (Rotterdam, NL)

A Breuer
Annabel Breuer
Nationalspielerin
Rollstuhlbasketball-



Thermisch aufbereitbar
nach RKI-Richtlinien

Einsetzbar bis Grad 4
(nach Prof. Seiler / EPUAP)

Sehr hohes Risiko
(Norton-, Braden-, Waterlow-Skala)

Bezug einfach zu desinfizieren

GEL SEAT[®]
clinic

Dekubitustherapie-Sitzkissen

3 JAHRE
GARANTIE

*1




Größe	Art. - Nr.	Größe	Art. - Nr.
Breite x Tiefe x Höhe		Breite x Tiefe x Höhe	
38 x 40 x 8	G-SEATCL3840	45 x 44 x 8	G-SEATCL4544
40 x 40 x 8	G-SEATCL4040	45 x 46 x 8	G-SEATCL4546
40 x 42 x 8	G-SEATCL4042	46 x 51 x 8	G-SEATCL4651
41 x 46 x 8	G-SEATCL4146	48 x 42 x 8	G-SEATCL4842
42 x 40 x 8	G-SEATCL4240	48 x 44 x 8	G-SEATCL4844
42 x 42 x 8	G-SEATCL4242	48 x 46 x 8	G-SEATCL4846
42 x 44 x 8	G-SEATCL4244	50 x 42 x 8	G-SEATCL5042
42 x 46 x 8	G-SEATCL4246	51 x 44 x 8	G-SEATCL5144
42 x 52 x 8	G-SEATCL4252	51 x 46 x 8	G-SEATCL5146
45 x 42 x 8	G-SEATCL4542	52 x 52 x 8	G-SEATCL5252





*1 Garantie gilt auf funktionelle Eigenschaften des Kissenkerns (Pro-Rata-Garantie)!

*2 Details siehe Gebrauchsanweisung.

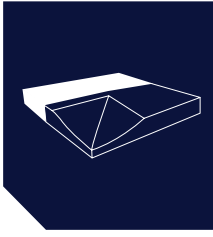


ARTHRODESENSITZKISSEN

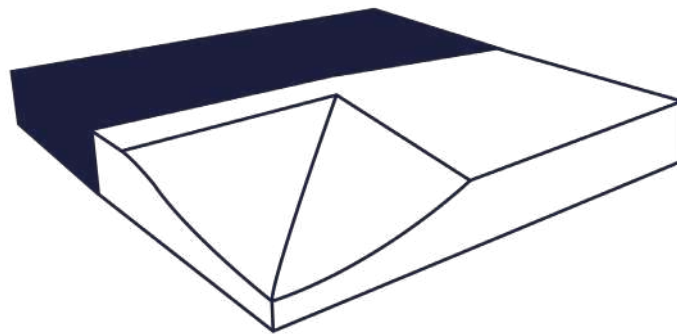

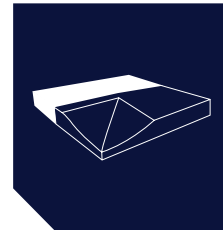

ORTHOPEDICS MIT SYSTEM

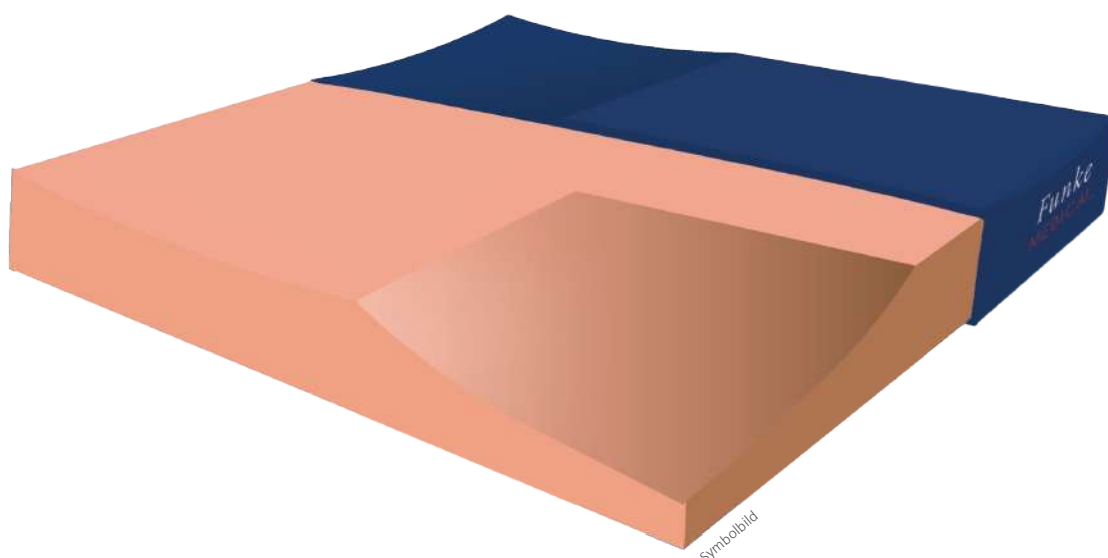


ARTHROSEAT[®]

- ARTHRODESENSITZKISSEN -



HILFSMITTELNUMMER
26.46.01.0011

Überreicht durch:

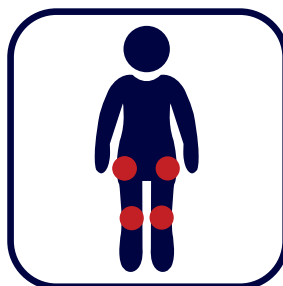

Beidseitig einsetzbar

Einsetzbar bei **linksseitiger**
oder **rechtsseitiger** Hüft-/
Knieschädigung

Thermisch aufbereitbar
nach RKI-Richtlinien

Geeignet zur Schmerzlinderung
durch entlastende Positionierung
der Hüft- und Kniegelenke

Bezug ist problemlos mit
haushaltsüblichen Mitteln
zu reinigen und einfach
zu desinfizieren

HMV-Nr.
26.46.01.0011

ARTHROSEAT[©]

Arthrodesensitzkissen

3 JAHRE
GARANTIE
*1

PU-Bezug:

- Abnehmbar
- Waschbar bis 95°C
- Wischdesinfizierbar
- Desinfektionsmittelbeständig*²

Griff für den einfachen
Transport

Wasserdichter und dennoch
atmungsaktiver Bezug

Anatomischer Bodyshape gewährleistet
eine ideale Sitzposition

Anti-Slip-Unterseite

Ergonomisch geformte
Sitzfläche für schmerzfreies
und bequemes Sitzen

Offenporiger
atmungsaktiver
Schaum

Einsetzbar bei linksseitiger oder
rechtsseitiger Hüft-/Knieschädigung

Symbolbild

Größe

Art. - Nr.

Breite x Tiefe x Höhe

40 x 40 x 7 / 1,5 A-SEAT4040

42 x 42 x 7 / 1,5 A-SEAT4242

44 x 44 x 7 / 1,5 A-SEAT4444



Offenporiger
atmungsaktiver
Schaum



Autoklavierbar



Bezugsmaterial
viren- und
bakteriendicht
gem. ASTM
1670 + 1671



Wasserdicht
dennoch
atmungsaktiv



Beidseitig
einsetzbar



CE - Kennzeichnung
MDR 2017/745



Wartungsfrei



Schwer
entflammbar
DIN EN 597 (1+2)




Patientengewicht:
0 bis 200 kg

*¹ Garantie gilt auf funktionelle Eigenschaften des Kissenkerns (Pro-Rata-Garantie)!


*² Details siehe Gebrauchsanweisung.

ARTHROSEAT[®]

- ARTHRODESENSITZKISSEN -

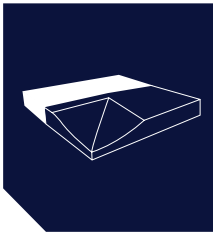

Haltegriff für den
einfachen Transport

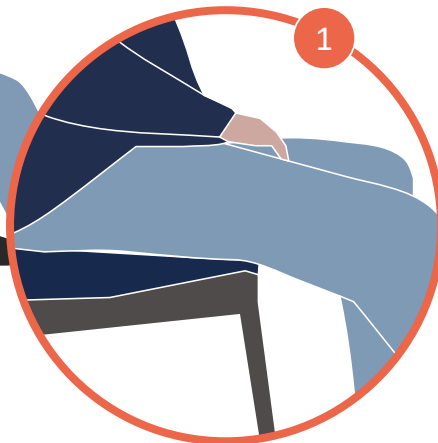

1

Rechtsseitige Hüft-/Knieschädigung:
Legen Sie das Kissen auf die Sitz-
fläche des Rollstuhls oder Sitzes und den
Haltegriff nach links. Bitte beachten Sie
zusätzlich den jeweiligen Aufdruck auf
der Kissenvorderseite.

Das Arthrodesensitzkissen kann
für die Nutzung der andere Seite
einfach gedreht werden.




2

Linksseitige Hüft-/Knieschädigung: Legen Sie das Kissen auf die
Sitzfläche des Rollstuhls oder Sitzes und den Haltegriff nach hinten.
Bitte beachten Sie zusätzlich den jeweiligen Aufdruck auf der Kissen-
vorderseite.



POSITIONIERUNGSHILFEN

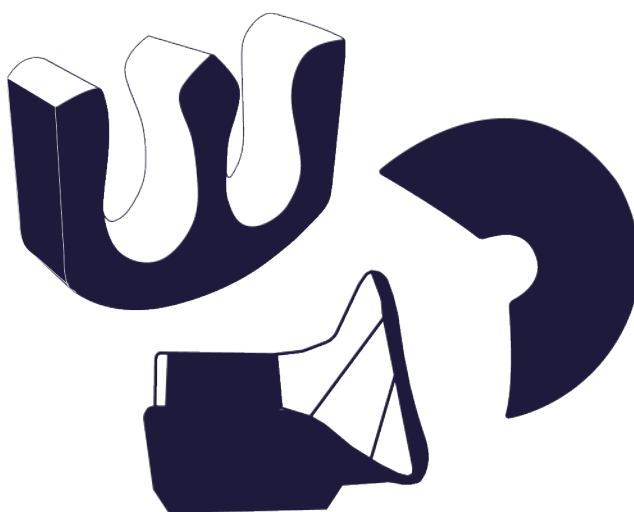

Positionierungs- und Mobilitätshilfen

POSIMED®

POSITIONIERUNGSKISSEN



Zur Dekubitusprophylaxe
und-therapie



Geeignet zur Schmerzlinderung
durch Entlastungslagerung



Schnelle Anpassung
an die Körperkontur



HEEL PROTECT®

FERSENFREILAGERUNGSSCHUH



Zur Dekubitusprophylaxe
und-therapie



Geeignet zur Therapie
des diabetischen Fußes



HMV-Nr. 11.11.05.0036



MobiTurn®

UMLAGER- UND WENDEHILFE




Ermöglicht rücken- und
kräfteschonendes Arbeiten



Einfache Patientendrehung



HMV-Nr. 22.29.01.2077

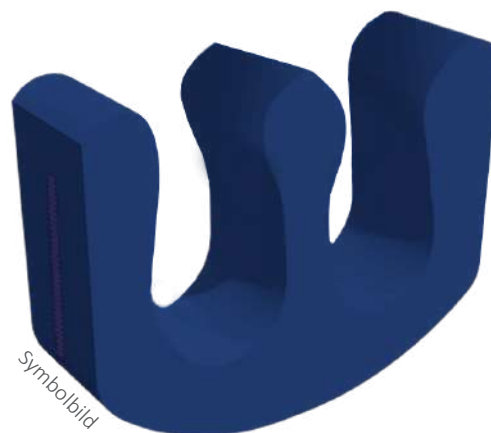

POSIMED®

Produktübersicht

Universalkissen*



Für alle üblichen
Positionierungsarten einsetzbar

Größe	Art. - Nr.
37 / 26	PO-UNIK3726
56 / 40	PO-UNIG5640

Fersenschiene



z.B. zur Lagerung und
Positionierung der Ferse

Größe	Art. - Nr.
39 / 21 / 8	PO-FERS3921

Unterarmschiene



z.B. zur Lagerung und
Positionierung des Unterarms

Größe	Art. - Nr.
39 / 21 / 8	PO-UNTE3921

Spreizkissen



z.B. zur Lagerung von Knie,
Knöchel und Epicondylus

Größe	Art. - Nr.
60 / 35	PO-SPRE6035

Rollenkissen*



z.B. zur Unterstützung und Positionierung
von Knie, Nacken und anderen Gliedmaßen

Größe	Art. - Nr.
60 / 21	PO-ROLL6021

Hüftspreizkissen



z.B. zur Lagerung und Positionierung
der Hüfte → reduziert die Gefahr der
Verrenkung bei Hüftprothesen

Größe	Art. - Nr.
35 / 28 / 14	PO-HUEFT3528

Full Body Positionierungskissen*



z.B. zur Unterstützung in der stabilen
30°-Lagerung, mit integriertem Kopfkissen

Größe	Art. - Nr.
170 / 74	PO-LAGE0165
182 / 54	PO-LAGE1165

Halbkreis



z.B. zur Lagerung und Positionierung
des Oberkörpers

Größe	Art. - Nr.
137 / 80	PO-HALB1378

*Hinweis: Das Positionierungskissen ist bei entsprechender Indikation mit der Krankenkasse abrechenbar.

POSIMED®


Positionierungskissen

POSIMED®-Kissen sind Positionierungskissen für die Dekubitusprophylaxe und -therapie in verschiedenen Formen und Größen zur optimalen Lagerung des Patienten.


Durch die verschiedenen Positionierungskissen wird der Patient marginal bewegt und die Druckverteilung an den Hauptauflagepunkten ermöglicht dem Patienten ein entspanntes und druckentlastendes Liegen. Ziel ist es, die Dauer und die Intensität der Druckeinwirkung so gering wie möglich zu halten. Unsere Positionierungskissen basieren auf einer druckentlastenden und positionierfähigen Kugelfüllung!

Positionierungsbeispiele


30°-Seitenlagerung

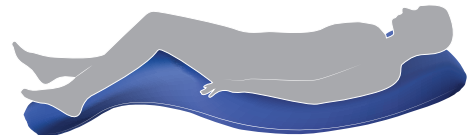


Fersenhochlagerung

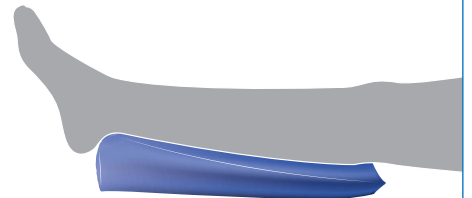

Halb sitzend

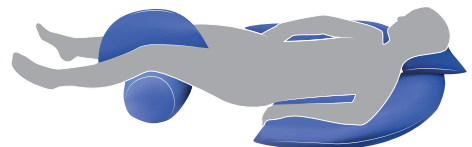

135°-Lagerung

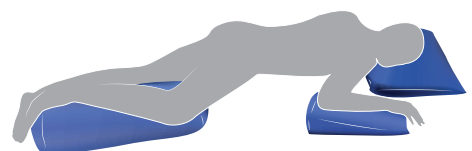

DEKUBITUSTHERAPIE UND PATIENTENPOSITIONIERUNG MIT SYSTEM



POSIMED®
- POSITIONIERUNGSKISSEN -
universalkissen

Überreicht durch:



HILFSMITTELNUMMER
11.11.05.0042

Thermisch aufbereitbar
nach RKI-Richtlinien

Geeignet zur Schmerzlinderung
durch Entlastungslagerung

Zur Dekubitusprophylaxe
und -therapie

Bezug einfach zu desinfizieren

HMV-Nr.
11.11.05.0042

POSIMED®

- POSITIONIERUNGSKISSEN -
universalkissen

5 JAHRE
GARANTIE

*1

Kissen:

- Waschbar bis 60°C
- Autoklavierbar
- Wischdesinfizierbar
- Desinfektionsmittelbeständig*²
- Zur Desinfektion
mit Chlor geeignet*²

Biokompatibel

Wasserdampfdurchlässiger
Inkontinenzbezug gewährleistet
ein hervorragendes Mikroklima

Kügelchenfüllung sorgt für:

- Schnelle Anpassung an die
Körperkontur
- Sichere Patientenlagerung
- Physiologische Wärmeerhaltung

Zur Unterstützung der Lagerung von
Extremitäten

Symbolbild

Art. - Name

Größe

Art. - Nr.

Länge x Breite

Universalkissen klein

37 x 26

PO-UNIK3726


Universalkissen groß

56 x 40

PO-UNIG5640



Autoklavierbar

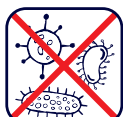


Bezugsmaterial
viren- und
bakteriedicht
gem. ASTM
1670 + 1671



Wasserdicht
dennoch
atmungsaktiv



Druckentlastung
durch Entlastungs-
lagerung

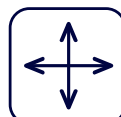

Bi-elastischer
Bezug zur
Minimierung
der Scherkräfte



CE- Kennzeichnung
MDR 2017/745



Wartungsfrei



Schwer
entflammbar
DIN EN 597 (1+2)



Leicht zu
reinigen durch
Wischdesinfektion



Max. 5000 ppm

*1 Garantie gilt auf funktionelle Eigenschaften (Pro-Rata-Garantie)!

*2 Details siehe Gebrauchsanweisung.

Statische Positionierungskissen für die Extremitäten helfen bei der Dekubitusprophylaxe und/oder -therapie. Sie dienen der Unterstützung der Freilagerung und der Lageveränderung sowie der Stabilisierung von Lagepositionen von zu pflegenden Personen insbesondere im Bett. Die Positionierungskissen können die manuellen Positionswechsel nicht ersetzen, aber ggf. die Intervalle der Positionswechsel verlängern und die Positionierung ermöglichen. Die Intervalldauer ist vom individuellen Gesundheitszustand der zu pflegenden Person abhängig. Um den sicheren Einsatz des Positionierungskissens zu gewährleisten, muss die Pflegeperson über das entsprechende fachliche Know-how verfügen oder in die Anwendung des Produktes von einer Pflegefachkraft eingewiesen worden sein.

Indikationen:

- **Dekubitus-therapie und -prophylaxe:** Durch die schonende Positionierung können gefährdete Körperregionen wie Arme, Beine und/oder Fersen temporär frei oder weich gelagert werden.
- **Mobilitätseinschränkungen und/oder Schädigung der Körperwahrnehmung:** Das Positionierungskissen unterstützt die Reduktion der Stärke von Druck- und Scherkräften und die Sicherung der Lageposition bei zu pflegenden Personen, die einen eigenständigen Positionswechsel nicht mehr durchführen können.
- **Schmerzen:** Geeignet zur Schmerzlinderung durch Entlastungslagerung

Positionierungsbeispiele

Allgemeine Vorbereitung




A.

Überprüfen Sie zuerst das Universalkissen auf Sauberkeit und eventuelle Schäden.



B.

Bitte achten Sie während des Lagerungsvorganges auf eine gleichmäßige Verteilung der Kugelfüllung im Kissen.

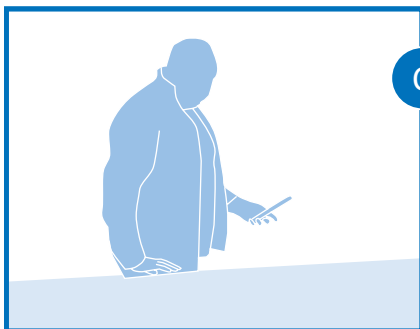


C.

Das Pflegebett sollte auf die Arbeitshöhe der Pflegeperson eingestellt werden. Hierbei gilt die Höhe des Hüftkopfs der Pflegeperson als Orientierungspunkt.

Falls die zu pflegende Person ansprechbar ist, sollte sie über jeden Schritt informiert werden. Stellen Sie dabei Augenkontakt her und sofern von der zu pflegenden Person akzeptiert, legen Sie die Hand auf die Schulter.


Positionierung des Arms

Das Universalkissen dient zur druckentlastenden Positionierung von gefährdeten Körperregionen wie z.B. der Arme.

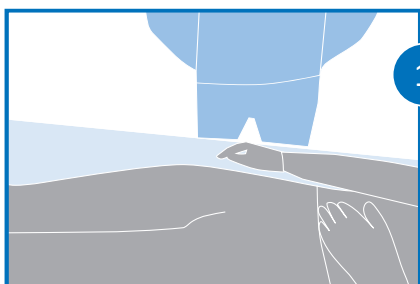


1.

Die zu pflegende Person sollte sich in der Rückenlage im Bett befinden. Die Pflegeperson befindet sich am zum entlastenden Arm.

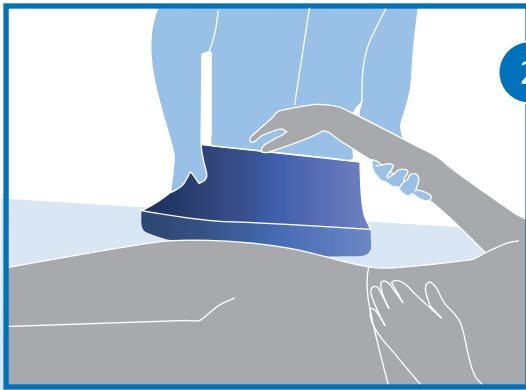

Die Pflegeperson sollte darauf achten, den Arm nicht direkt an den Gelenken anzufassen. Die Pflegeperson fasst mit der einen Hand an den Unterarm der zu pflegenden Person und mit der anderen Hand schiebt sie das Universalkissen unter den Unterarm.

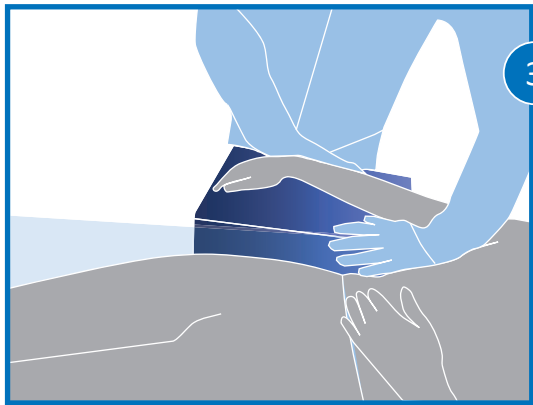

Der Ellbogen der zu pflegenden Person sollte entweder freiliegen oder ganz auf dem Kissen aufliegen. Der Arm sollte sich nicht auf der Kante befinden.

Vergewissern Sie sich, falls möglich, ob die zu pflegende Person mit der Position einverstanden ist und überprüfen Sie den Arm nochmal auf eine gute Positionierung.


Um die zu pflegende Person wieder in die Ausgangsposition zu bringen, sollten folgende Maßnahmen ergriffen werden:

Die Pflegeperson hebt den Arm der zu pflegenden Person an und entfernt das Universalkissen. Vergewissern Sie sich erneut, ob die zu pflegende Person bequem liegt.

Positionierung des Beins

Das Universalkissen dient zur druckentlastenden Positionierung von gefährdeten Körperregionen wie Beine und Fersen.

Bereiten Sie, wie im Bild A-C beschrieben, den Lagerungsvorgang vor.

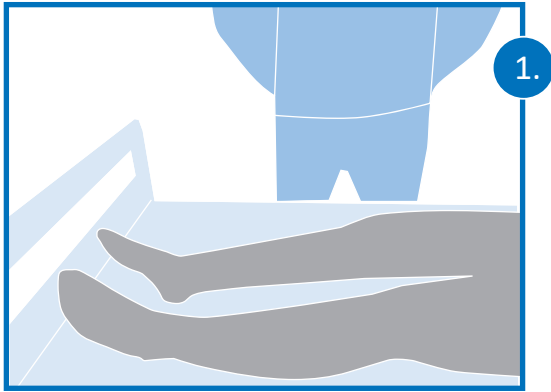


Die zu pflegende Person sollte sich in der Rückenlage im Bett befinden. Die Pflegeperson befindet sich am zum entlastenden Bein.



Die Pflegeperson sollte darauf achten, das Bein nicht direkt an den Gelenken anzufassen.

Die Pflegeperson fasst mit der einen Hand an den Unterschenkel der zu pflegenden Person und mit der anderen Hand schiebt sie das Universalkissen unter den Unterschenkel.

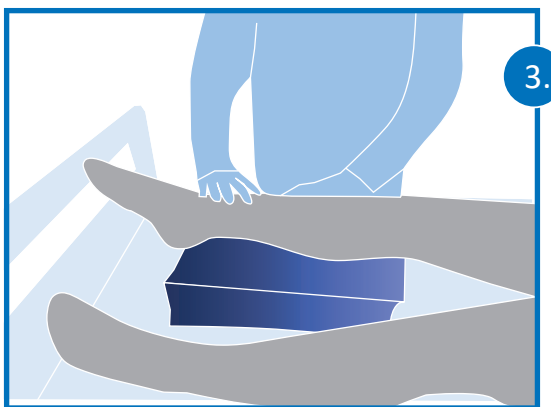

Die Ferse der zu pflegenden Person sollte freiliegen. Vergewissern sie sich, falls möglich, ob die zu pflegende Person mit der Position einverstanden ist und überprüfen Sie das Bein nochmal auf eine gute Positionierung.

Um die zu pflegende Person wieder in die Ausgangsposition zu bringen, sollten folgende Maßnahmen ergriffen werden:
Die Pflegeperson hebt das Bein der zu pflegenden Person an und entfernt das Universalkissen. Vergewissern Sie sich erneut, ob die zu pflegende Person bequem liegt.



DEKUBITUSTHERAPIE UND PATIENTENPOSITIONIERUNG MIT SYSTEM



Symbolbild

POSIMED®

- POSITIONIERUNGSKISSEN - *Rollenkissen*

Überreicht durch:



HILFSMITTELNUMMER
11.11.05.1029

Thermisch aufbereitbar
nach RKI-Richtlinien

Geeignet zur Schmerzlinderung
durch Entlastungslagerung

Zur Dekubitusprophylaxe
und -therapie

Bezug einfach zu desinfizieren

HMV-Nr.
11.11.05.1029

Zur druckentlastenden Lagerung von
gefährdeten Körperregionen wie Kopf,
Nacken- und Schulterbereich,
Becken, Knie und Beine

POSIMED®

- POSITIONIERUNGSKISSEN- *Rollenkissen*

5 JAHRE
GARANTIE *1

Kissen:

- Waschbar bis 60°C
- Autoklavierbar
- Wischdesinfizierbar
- Desinfektionsmittelbeständig*²
- Zur Desinfektion
mit Chlor geeignet*²

Biokompatibel



Kügelchenfüllung sorgt für:

- Schnelle Anpassung an die Körperkontur
- Sichere Patientenlagerung
- Physiologische Wärmeerhaltung

Wasserdampfdurchlässiger
Inkontinenzbezug gewährleistet
ein hervorragendes Mikroklima

Art. - Name

Größe

Art. - Nr.

Länge x Breite

Rollenkissen

60 x 21

PO-ROLL6021



Autoklavierbar




Bezugsmaterial
viren- und
bakteriendicht
gem. ASTM
1670 + 1671



Wasserdicht
dennoch
atmungsaktiv



Druckentlastung
durch Entlastungs-
lagerung

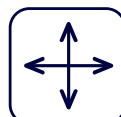

Bi-elastischer
Bezug zur
Minimierung
der Scherkräfte



CE- Kennzeichnung
MDR 2017/745



Wartungsfrei



Schwer
entflammbar
DIN EN 597 (1+2)



Leicht zu
reinigen durch
Wischdesinfektion



Max. 5000 ppm

*1 Garantie gilt auf funktionelle Eigenschaften (Pro-Rata-Garantie)!

*2 Details siehe Gebrauchsanweisung.

Statische Positionierungskissen für den Teilkörper helfen bei der Dekubitusprophylaxe und/oder -therapie. Sie dienen der Unterstützung der Entlastungslagerung und der Lageveränderung sowie der Stabilisierung von Lagepositionen von zu pflegenden Personen insbesondere im Bett. Die Positionierungskissen können die manuellen Positionswechsel nicht ersetzen, aber ggf. die Intervalle der Positionswechsel verlängern und die Positionierung ermöglichen. Die Intervalldauer ist vom individuellen Gesundheitszustand der zu pflegenden Person abhängig. Um den sicheren Einsatz des Positionierungskissens zu gewährleisten, muss die Pflegeperson über das entsprechende fachliche Know-how verfügen oder in die Anwendung des Produktes von einer Pflegefachkraft eingewiesen worden sein.

Indikationen:

- **Dekubitustherapie und -prophylaxe:** Durch die schonende Positionierung können gefährdete Körperregionen wie Kopf, Nacken- und Schulterbereich, Becken, Knie und Beine temporär entlastet werden.
- **Mobilitätseinschränkungen und/oder Schädigung der Körperwahrnehmung:** Das Positionierungskissen unterstützt die Reduktion der Stärke von Druck- und Scherkräften und die Sicherung der Lageposition bei zu pflegenden Personen, die einen eigenständigen Positionswechsel nicht mehr durchführen können.
- **Schmerzen:** Geeignet zur Schmerzlinderung durch Entlastungslagerung

Positionierungsbeispiele

Allgemeine Vorbereitung




A

Überprüfen Sie zuerst das Rollenkissen auf Sauberkeit und eventuelle Schäden.



B

Bitte achten Sie während des Lagerungsvorganges auf eine gleichmäßige Verteilung der Kügelchenfüllung im Kissen.

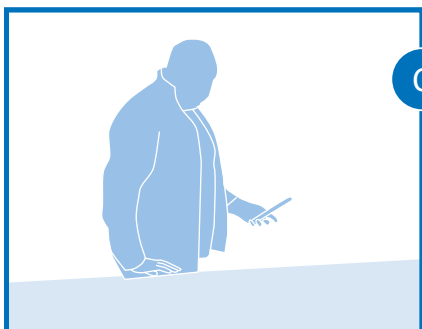


C

Das Pflegebett sollte auf die Arbeitshöhe der Pflegeperson eingestellt werden. Hierbei gilt die Höhe des Hüftkopfs der Pflegeperson als Orientierungspunkt.

Falls die zu pflegende Person ansprechbar ist, sollte sie über jeden Schritt informiert werden. Stellen Sie dabei Augenkontakt her und sofern von der zu pflegenden Person akzeptiert, legen Sie die Hand auf die Schulter.


Hochlagerung des Becken, Knie- und Beinbereiches

Das Rollenkissen dient zur druckentlastenden Positionierung von gefährdeten Körperregionen wie Kopf, Nacken- und Schulterbereich, Becken, Knie und Beine.

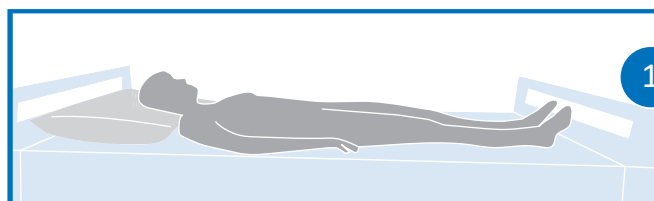


1.

Bei dieser Positionierung dient das Rollenkissen der leichten Beugung des Kniebereichs. Dadurch wird die Spannung der Bauchdecke reduziert und das Atmen fällt leichter. Gleichzeitig kommt es zu einer moderaten Druckentlastung im Kreuz-/Steißbeinbereich. Der Auflagedruck in diesem Bereich wird verringert, da ein Hohlkreuz aufgehoben wird und der ganze Rücken als Auflagefläche dient.

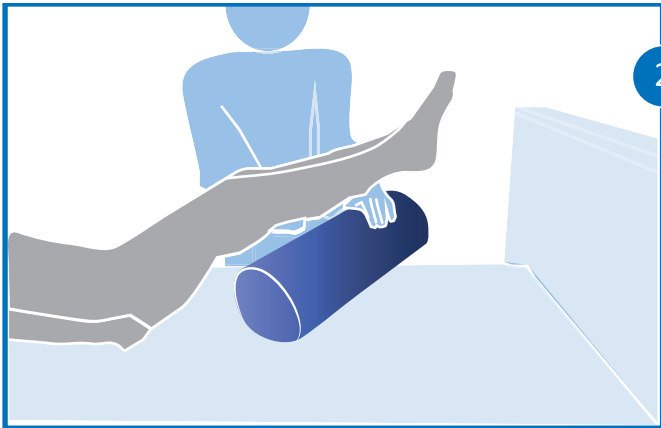

Die Pflegeperson fasst mit einem Arm unter die Unterschenkel der zu pflegenden Person, um die Beine vorsichtig anzuheben. Nun kann die Pflegeperson mit dem anderen Arm das Rollenkissen unter den unteren Teil der Oberschenkel platzieren.

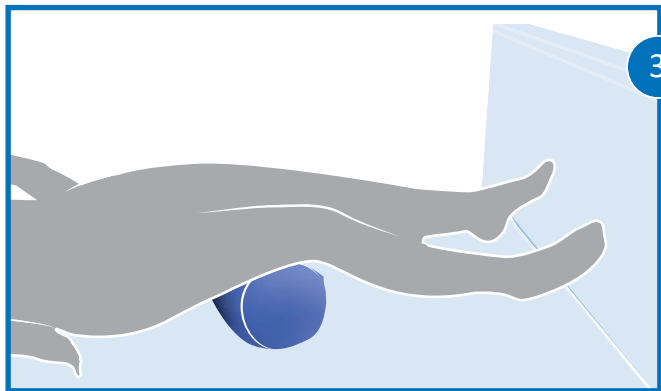

Die Pflegeperson sollte darauf achten, dass sich das Rollenkissen nicht direkt in der Kniekehle der zu pflegenden Person befindet, um die Nerven und Blutgefäße zu schützen.

Vergewissern Sie sich, falls möglich, ob die zu pflegende Person mit der Position einverstanden ist und überprüfen Sie die Beine nochmals auf eine gute Positionierung.

Um die zu pflegende Person wieder in die Ausgangsposition zu bringen, sollten folgende Maßnahmen ergriffen werden:

Die Pflegeperson hebt die Beine der zu pflegenden Person an und entfernt das Rollenkissen. Vergewissern Sie sich erneut, ob die zu pflegende Person bequem liegt.

Positionierung des Kopf-, Nacken- und Schulterbereiches


Das Rollenkissen dient zur druckentlastenden Positionierung von gefährdeten Körperregionen wie z.B. des Kopfes.

Bereiten Sie, wie im Bild A-C beschrieben, den Lagerungsvorgang vor.



1.

Die zu pflegende Person befindet sich dazu in der Rückenlage mittig im Bett.

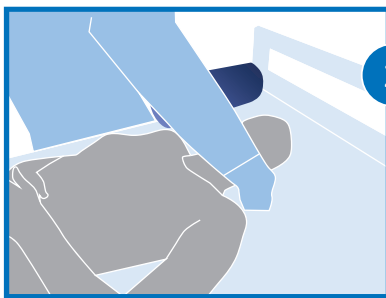

2.

Die Pflegeperson fasst mit der einen Hand um den Halswirbelsäulenbereich der zu pflegenden Person.



3.

Mit der anderen Hand schiebt die Pflegeperson das Rollenkissen in den Nackenbereich.



4.

Die Pflegeperson sollte darauf achten, dass das Rollenkissen nicht direkt unter den Hinterkopf der zu pflegenden Person liegt. Vergewissern Sie sich, falls möglich, ob die zu pflegenden Person mit der Position einverstanden ist und überprüfen Sie den Kopf nochmals auf eine gute Positionierung.

Um die zu pflegende Person wieder in die Ausgangsposition zu bringen, sollten folgende Maßnahmen ergriffen werden:

Die Pflegeperson hebt den Halswirbelsäulenbereich der zu pflegenden Person an und entfernt das Rollenkissen.

Vergewissern Sie sich erneut, ob die zu pflegende Person bequem liegt.



DEKUBITUSTHERAPIE UND PATIENTENPOSITIONIERUNG MIT SYSTEM



Symbolbild

POSIMED®

- POSITIONIERUNGSKISSEN -

*Full Body
Positionierungskissen*

Überreicht durch:



HILFSMITTELNUMMER
11.11.05.2009

Thermisch aufbereitbar
nach RKI-Richtlinien

Geeignet zur Schmerzlinderung
durch Entlastungslagerung

Zur Dekubitusprophylaxe
und -therapie

Bezug einfach zu desinfizieren

HMV-Nr.
11.11.05.2009

POSIMED®

- POSITIONIERUNGSKISSEN -

Full Body
Positionierungskissen

5 JAHRE
GARANTIE *1

Kissen:

- Waschbar bis 60°C
- Autoklavierbar
- Wischdesinfizierbar
- Desinfektionsmittelbeständig*²
- Zur Desinfektion mit Chlor geeignet*²

Biokompatibel

Wasserdampfdurchlässiger
Inkontinenzbezug gewährleistet
ein hervorragendes Mikroklima

Zur Unterstützung in der
30°- Seiten- und 135°- Seiten-/Bauchlagerung

Kügelchenfüllung sorgt für:

- Schnelle Anpassung an die Körperkontur
- Sichere Patientenstabilisierung
- Physiologische Wärmeerhaltung

Art. - Name

Größe

Art. - Nr.

Länge x Breite

Full Body Positionierungskissen Size M 170 / 74 PO-LAGE0165

Full Body Positionierungskissen Size L 182 / 54 PO-LAGE1165



Autoklavierbar




Bezugsmaterial
viren- und
bakteriendicht
gem. ASTM
1670 + 1671



Wasserdicht
dennoch
atmungsaktiv



Druckentlastung
durch Entlastungs-
lagerung

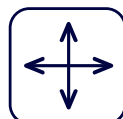

Bi-elastischer
Bezug zur
Minimierung
der Scherkräfte



CE- Kennzeichnung
MDR 2017/745



Wartungsfrei



Schwer
entflammbar
DIN EN 597 (1+2)



Leicht zu
reinigen durch
Wischdesinfektion



Max. 5000 ppm

*1 Garantie gilt auf funktionelle Eigenschaften (Pro-Rata-Garantie)!

*2 Details siehe Gebrauchsanweisung.

Statische Positionierungskissen für den ganzen Körper helfen bei der Dekubitusprophylaxe und/oder -therapie. Sie dienen der Unterstützung der Freilagerung und der Lageveränderung sowie der Stabilisierung von Lagepositionen von zu pflegenden Personen insbesondere im Bett. Die Positionierungskissen können die manuellen Positionswechsel nicht ersetzen, aber ggf. die Intervalle der Positionswechsel verlängern und die Positionierung ermöglichen. Die Intervalldauer ist vom individuellen Gesundheitszustand der zu pflegenden Person abhängig. Um den sicheren Einsatz des Positionierungskissens zu gewährleisten, muss die Pflegeperson über das entsprechende fachliche Know-how verfügen oder in die Anwendung des Produktes von einer Pflegefachkraft eingewiesen worden sein.

Indikationen:


- **Dekubitustherapie und -prophylaxe:** Durch schonende seitliche Positionierung können gefährdete Körperregionen wie Hinterkopf, Schulterblatt, Beckenkamm und vor allem Kreuz- und Steißbein temporär entlastet werden.
- **Mobilitätseinschränkungen und/oder Schädigung der Körperwahrnehmung:** Das Positionierungskissen unterstützt die Reduktion der Stärke von Druck- und Scherkräften und die Sicherung der Lageposition bei zu pflegenden Personen, die einen eigenständigen Positionswechsel nicht mehr durchführen können.
- **Schmerzen:** Geeignet zur Schmerzlinderung durch Entlastungslagerung

Positionierungsbeispiele


Allgemeine Vorbereitung



- A.** Überprüfen Sie zuerst das Full Body Positionierungskissen auf Sauberkeit und eventuelle Schäden.

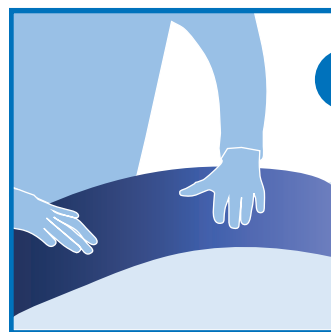


- B.** Bitte achten Sie während des Lagerungsvorganges auf eine gleichmäßige Verteilung der Kugelfüllung im Kissen.

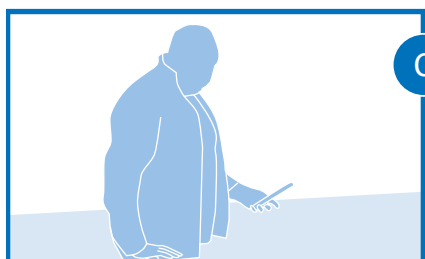

- C.** Das Pflegebett sollte auf die Arbeitshöhe der Pflegeperson eingestellt werden. Hierbei gilt die Höhe des Hüftkopfs der Pflegeperson als Orientierungspunkt.
Falls die zu pflegende Person ansprechbar ist, sollte sie über jeden Schritt informiert werden. Stellen Sie dabei Augenkontakt her und sofern von der zu pflegenden Person akzeptiert, legen Sie die Hand auf die Schulter.

Vorbereitung der Positionierung

Die zu pflegende Person sollte in die Ausgangslage gebracht werden, sodass die eigentliche Positionierung durchgeführt werden kann.

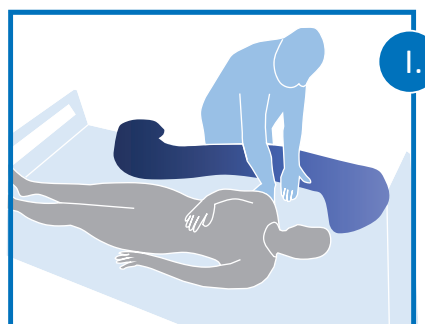


- I.** Liegt die zu pflegende Person mittig oder zu weit an der gegenüberliegenden Seite, muss Sie in die Nähe der Bettkante, an der die Pflegeperson steht, gelegt werden.
Um die zu pflegende Person an der Bettkante zu platzieren, hebt die Pflegeperson mit der rechten Hand die linke Schulter der zu pflegenden Person an und schiebt die linke Hand unter das Schulterblatt, bis zum Beginn der Wirbelsäule.



II.


Dann greift die rechte Hand der Pflegeperson an die linke Schulter der zu pflegenden Person, dreht diese leicht, sodass sie auf dem linken Unterarm der Pflegekraft zum Liegen kommt.

Beim Herausziehen des linken Unterarms dreht sich die zu pflegende Person auf den Rücken und kommt der Pflegeperson entgegen. Die zu pflegende Person sollte vor der Bettkante zum Liegen kommen.

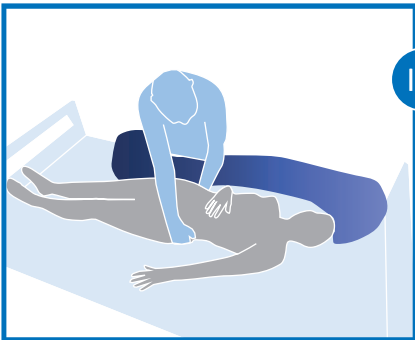

III.

Dieser Vorgang wird mit der Hüfte nach dem gleichen Schema wiederholt. Wird die andere Seite positioniert ist dieses Spiegelverkehrt zu handhaben.

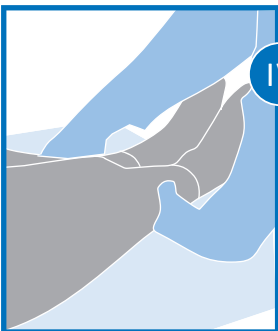


IV.

Dann werden die Beine unterhalb der Knie leicht angehoben und so abgelegt, dass die zu pflegende Person wieder gerade liegt.

Die 30°-Seitenlagerung


Das Full Body Positionierungskissen dient in der 30°-Seitenlagerung zur druckentlastenden Positionierung von gefährdeten Körperregionen wie Hinterkopf, Schulterblatt, Beckenkamm und vor allem Kreuz- und Steißbeinbereich.

Falls sich die zu pflegende Person falsch im Bett befindet, bitte folgen Sie Bild I.-IV.

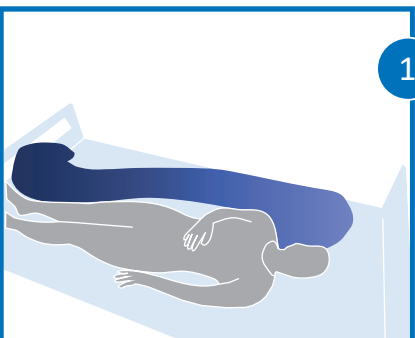

1.

Die zu pflegende Person sollte sich in Rückenlage in Nähe der Bettkante befinden, an der die Pflegeperson steht. Die Pflegeperson steht an der zu entlastenden Seite der zu pflegenden Person. Das Full Body Positionierungskissen wird an der Bettkante neben der zu pflegenden Person, zwischen Pflegekraft und Patient platziert.

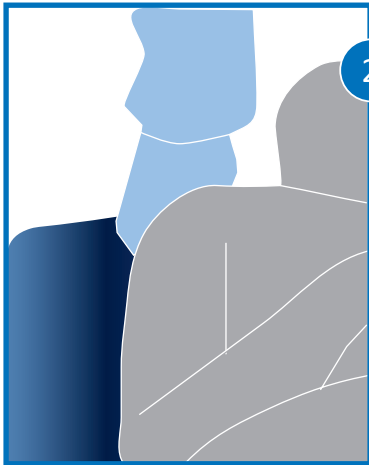

Das vor der Pflegeperson liegende Full Body Positionierungskissen wird unter die Körperhälfte der zu pflegenden Person geschoben. Dazu hebt die Pflegeperson die linke Schulter der zu pflegenden Person an. So wird nun auch mit der Hüfte verfahren.



Die Beine werden auch unterstützt. Mit vorsichtigen, bedachten Bewegungen wird das obenliegende Bein auf dem Full Body Positionierungskissen zum Liegen gebracht. Bitte beachten Sie, dass nicht an die Gelenke gefasst wird. Das obenliegende Bein kommt auf dem Kissen zum Liegen.



Vergewissern Sie sich, falls möglich, ob die zu pflegende Person mit der Position einverstanden ist und überprüfen Sie Kopf und Füße nochmal auf eine gute Positionierung.

Um die zu pflegende Person wieder in die Ausgangsposition zu bringen, sollten folgende Maßnahmen ergriffen werden:


Die Pflegeperson greift mit der rechten Hand an das Schulterblatt und hebt die zu pflegende Person vorsichtig an. Mit der linken Hand kann nun der obere Teil des Kissens herausgenommen werden. So wird auch mit dem Beckenbereich verfahren. Nun kann das Full Body Positionierungskissen entfernt werden. Anschließend sollte die zu pflegende Person wieder mittig im Bett positioniert werden. Die Vorgehensweise ist wie in Schritt I.-IV. Vergewissern Sie sich erneut, ob die zu pflegende Person bequem liegt.

Die 135°-Seiten- /Bauchlagerung

Das Full Body Positionierungskissen dient in der 135°-Seiten-/Bauchlagerung zur druckentlastenden Positionierung von gefährdeten Körperregionen wie Hinterkopf, Schulterblatt, Kreuz- und Steißbein.

Bereiten Sie, wie im Bild A-C beschrieben, den Lagerungsvorgang vor.

Falls sich die zu pflegende Person in der falschen Position im Bett befindet, folgen Sie der Beschreibung I.-IV.

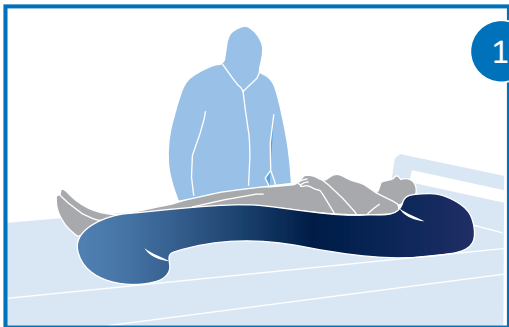

1.

Die Pflegeperson steht an der zu entlastenden Seite der zu pflegenden Person. Das Full Body Positionierungskissen wird an der gegenüberliegenden Bettkante platziert.





2.

Zur Sicherung der zu pflegenden Person sollte das vorhandene Bettgitter an der gegenüberliegenden Seite hochgestellt werden. Die Pflegeperson hebt mit der rechten Hand die Hüfte der zu pflegenden Person an und platziert den Arm der zu pflegenden Person mit der Handinnenfläche nach oben liegend, unter den Oberkörper.




3.

Das außenliegende Bein der zu pflegenden Person wird angewinkelt aufgestellt. Die Pflegeperson sollte darauf achten nicht fest zuzugreifen, sondern mit der rechten Hand das Bein nur zu führen.

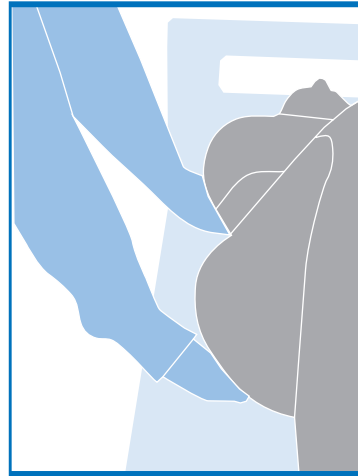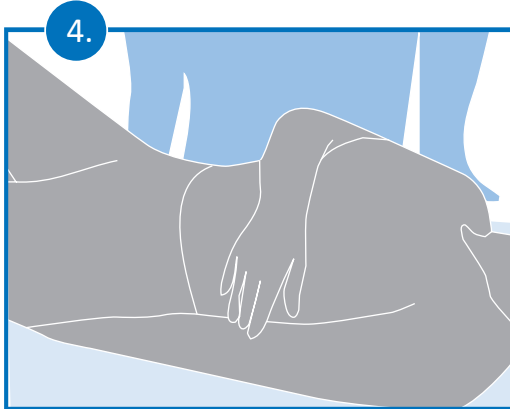

Nun platziert die Pflegeperson eine Hand unter der Schulter der zu pflegenden Person und eine Hand unter dem Kreuz- und Steißbeinbereich. Jetzt kann die zu pflegende Person zum Full Body Positionierungskissen hin gedreht werden.

Bei größerem Kraftaufwand kann das Knie der zu pflegenden Person als zusätzlicher Hebel genutzt werden.

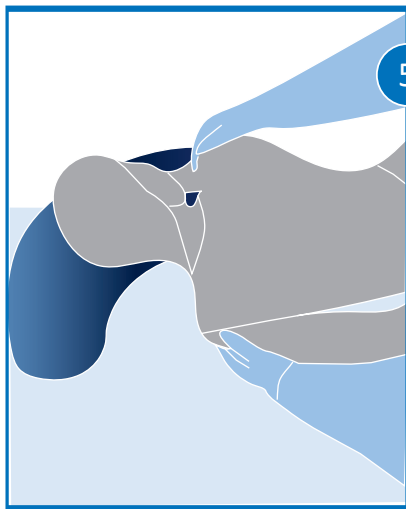

Befindet sich die zu pflegende Person in der Bauchlage, sollte die Pflegeperson die Position der untenliegenden Schulter nochmals überprüfen und ggf. die Schulter vorsichtig nach hinten rausziehen.



Vergewissern Sie sich, falls möglich, ob die zu pflegende Person mit der Position einverstanden ist. Überprüfen Sie Kopf und Füße nochmals auf eine gute Positionierung.

Um die zu pflegende Person wieder in die Ausgangsposition zu bringen, sollten folgende Maßnahmen ergriffen werden:
Die Pflegeperson greift mit einer Hand an die Schulter der zu pflegenden Person und mit der anderen Hand an den Kreuz- und Steißbeinbereich. Die zu pflegende Person kann über die Drehung wieder in die Rückenlage gebracht werden. Vergewissern Sie sich erneut, ob die zu pflegende Person bequem liegt.

DEKUBITUSTHERAPIE UND PATIENTENPOSITIONIERUNG MIT SYSTEM



Überreicht durch:

POSIMED®

- POSITIONIERUNGSKISSEN -

Thermisch aufbereitbar
nach RKI-Richtlinien

Geeignet zur Schmerzlinderung
durch Entlastungslagerung

Zur Dekubitusprophylaxe
und -therapie

Bezug einfach zu desinfizieren

POSIMED®

Positionierungskissen

5 JAHRE
GARANTIE
*1

Kissen:

- Waschbar bis 60°C
- Autoklavierbar
- Wischdesinfizierbar
- Desinfektionsmittelbeständig*²
- Zur Desinfektion mit Chlor geeignet*²

Biokompatibel

Wasserdampfdurchlässiger
Inkontinenzbezug gewährleistet
ein hervorragendes Mikroklima

Kügelchenfüllung sorgt für:

- Schnelle Anpassung an die Körperkontur
- Optimale Druckentlastung



Art. - Name	Größe	Art. - Nr.
	Länge x Breite	
Fersenschiene	39 x 21	PO-FERS3921
Unterarmschiene	39 x 21	PO-UNTE3921
Spreizkissen	60 x 35	PO-SPRE6035
Hüftspreizkissen	35 x 28	PO-HÜFT3528
Halbkreis	137 x 80	PO-HALB1378

Die POSIMED®-Positionierungskissen sind in vielen verschiedenen Formen und Größen erhältlich.



Autoklavierbar




Bezugsmaterial
viren- und
bakteriendicht
gem. ASTM
1670 + 1671



Wasserdicht
dennoch
atmungsaktiv



Druckentlastung
durch Entlastungs-
lagerung

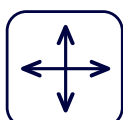

Bi-elastischer
Bezug zur
Minimierung
der Scherkräfte



CE- Kennzeichnung
MDR 2017/745



Wartungsfrei



Schwer
entflammbar
DIN EN 597 (1+2)



Leicht zu
reinigen durch
Wischdesinfektion



Max. 5000 ppm

*¹ Garantie gilt auf funktionelle Eigenschaften (Pro-Rata-Garantie)!

*² Details siehe Gebrauchsanweisung.

DEKUBITUSTHERAPIE MIT SYSTEM




 **POSIMED®**
HEEL PROTECT®
- FERSENFREILAGERUNGSSCHUH -



HILFSMITTELNUMMER

11.11.05.0036

Überreicht durch:

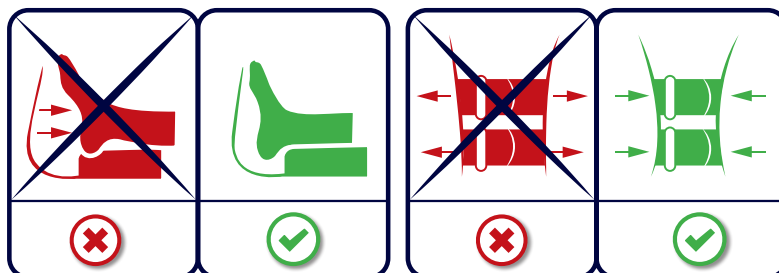

Thermisch aufbereitbar
nach RKI-Richtlinien

Geeignet zur Therapie
des diabetischen Fußes

Zur Dekubitusprophylaxe
und -therapie

Bezug einfach zu desinfizieren

HMV-Nr.
11.11.05.0036

POSIMED® HEEL PROTECT®


Fersenfreilagerungsschuh

1 JAHR
GARANTIE

*1

Soft-Verschluss

Klettverschluss zur
Spitzfußprophylaxe

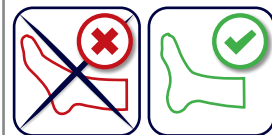

Mesh³-Gewebe für
maximalen Tragekomfort
und Klimaregulierung

Symbolbild

Bezug leicht zu reinigen:

- Waschbar bis 95°C
- Trocknergeeignet
- Autoklavierbar
- Wischdesinfizierbar
- Desinfektionsmittelbeständig*²
- Zur Desinfektion mit Chlor geeignet*²

ROTATION-STOP



Einzigartige
GELTOUCH®-Technologie
mit Cooling-Effekt

Größe

Art. - Nr.

ONE SIZE FITS ALL

PO-HEELPR




Offenporiger
atmungsaktiver
Geltouch®-Foam +
HR-Foam



Autoklavierbar



Optimierte
Druckentlastung

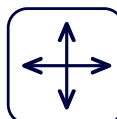

Bi-elastischer
Bezug zur
Minimierung
der Scherkräfte



CE- Kennzeichnung
MDR 2017/745




Einheitsgröße



Max. 5000 ppm



UMLAGERUNG MIT SYSTEM

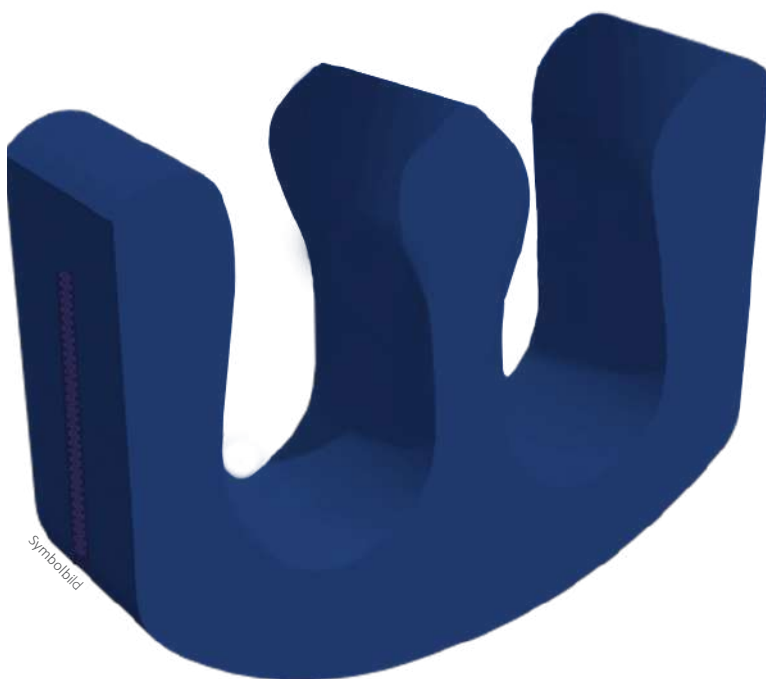

MobiTurn®

UMLAGER-/WENDEHILFE
FÜR IMMOBILE PATIENTEN



HILFSMITTELNUMMER
22.29.01.2077

Überreicht durch:



Thermisch aufbereitbar
nach RKI-Richtlinien

Ermöglicht rücken- und
kräfteschonendes Arbeiten

Bezug einfach zu desinfizieren

HMV-Nr.
22.29.01.2077

MobiTurn®

Umlager- und Wendehilfe
für immobile Patienten


2 JAHRE
GARANTIE

*1

Bezug:

- Abnehmbar
- Waschbar bis 95 °C
- Wischdesinfizierbar
- Desinfektionsmittelbeständig*²
- Zur Desinfektion mit Chlor geeignet*²
- Autoklavierbar

Ultraschall verschweißte
Nähte

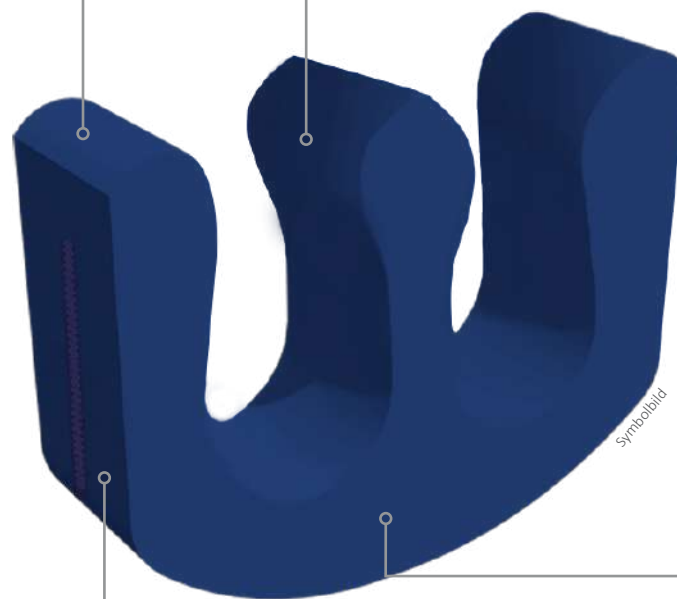

Kern: PU-Schaumstoff

Anwendungsbereiche:


- Ergonomische Form sorgt für eine optimale Patientenumlagerung
- Aufbau ermöglicht eine sichere und schmerzfreie Patientendrehung
- Rückengerechtes und kräfteschonendes Arbeiten für Pflegekräfte und pflegende Angehörige



Bezugsmaterial
viren- und
bakteriendicht
gem. ASTM
1670 + 1671



Wasserdicht
dennoch
atmungsaktiv

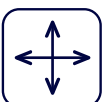

Bi-elastischer
Bezug zur
Minimierung
der Scherkräfte



CE- Kennzeichnung
MDR 2017/745



Wartungsfrei



Schwer
entflammbar
DIN EN 597 (1+2)



Autoklavierbar



Leicht zu
reinigen durch
Wischdesinfektion



Max. 5000 ppm



Rückengerecht
und kräfteschonend




Patientengewicht:
0 bis 250 kg



Einfache
Patientendrehung



Mit der Umlager-/Wendehilfe MobiTurn® können zu pflegende Personen sicher und schmerzfreier im Bett von der Rückenlage in die Seitenlage gebracht werden. Das Umlagern durch die Pflegekraft wird vereinfacht und somit ein rückengerechtes und kräfteschonendes Arbeiten ermöglicht. Zudem muss bei der Anwendung des Hilfsmittels die individuelle Situation und mögliche Erkrankungen berücksichtigt werden. Bei aufkommenden Fragen, sollte Rücksprache mit dem behandelnden Arzt gehalten werden.

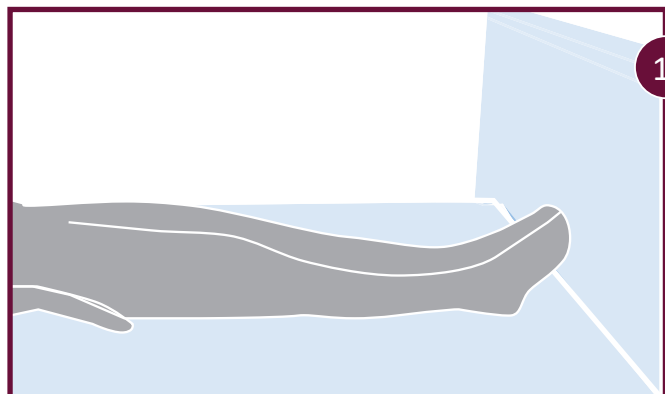

1.

Die zu pflegende Person befindet sich in der Rückenlage flach im Bett. Bitte beachten Sie, dass sich die zu pflegende Person nicht zu nah an der Bettkante befindet, ggf. sollte das vorhandene Bettgitter an der Seite, zu der die zu pflegende Person gedreht werden soll, hochgestellt werden. Dadurch wird das Rausfallen bei der Drehung vermieden.



2.

Die Beine der zu pflegenden Person werden von der Pflegekraft angehoben und das MobiTurn® wird flach unter die Beine gelegt.



3.

Die Beine der zu pflegenden Person müssen gerade in die Aussparungen der Umlager-/Wendehilfe MobiTurn® gelegt werden.



4.

Im nächsten Schritt wird das MobiTurn® aufgestellt. Das MobiTurn® sollte sich im Bereich der Knie der zu pflegenden Person befinden.






5.

Nun wird die zu pflegende Person zum Wenden vorbereitet. Der Arm, welcher von der gewünschten Lagerungsrichtung abgewandt ist, wird auf den Bauch der zu pflegenden Person gelegt. Der andere Arm, welcher sich auf der Lagerungsseite befindet, wird im 90°-Winkel kopfwärts gelagert.



6.


Die Pflegekraft platziert eine Hand am MobiTurn® und eine Hand an der Schulter der zu pflegenden Person, um sie möglichst schonend in die Seitenlagerung zu bringen.

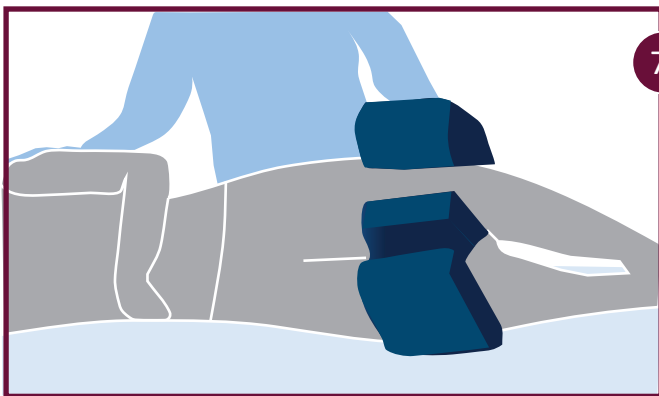

7.

Die zu pflegende Person befindet sich nun in der Seitenlagerung. Nach Stabilisierung der zu pflegenden Person muss die Umlager-/Wendehilfe MobiTurn® entfernt werden.

Falls nur eine kurzzeitige Behandlung in der Seitenlage erfolgen soll, wird die Umlager-/Wendehilfe erst entfernt, wenn die zu pflegende Person nach der Behandlung wieder in die Rückenlage gebracht wurde.

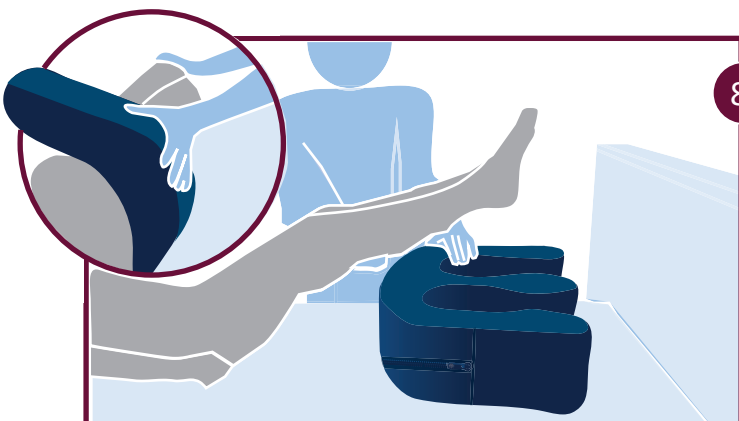

8.

Um die zu pflegende Person wieder in die Rückenlage zu bringen, platziert die Pflegekraft eine Hand am MobiTurn® im Bereich der Kniebeuge und eine Hand an der Schulter der zu pflegenden Person und dreht sie auf den Rücken zurück.

Um das MobiTurn® zu entfernen, wird es in Richtung Bettende gekippt, sodass es flach auf der Matratze liegt. Die Beine der zu pflegenden Person werden angehoben und das MobiTurn® kann entfernt werden.

Scan me!



Hier gelangen Sie zur
aktuellen Online-Version.

www.funke-medical.de

Scan me!



Hier gelangen Sie zur
aktuellen Online-Version.

Über unsere Funke Medical Social-Media-Kanäle
verpassen Sie keine unserer Neuigkeiten mehr:

